



pa-on Sonde

Anbindung an DIOS ZX

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Vorwort

Diese Anleitung enthält eine genaue Beschreibung über die Anbindung mit der Praxissoftware DIOS ZX.


Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen unsere Support Hotline unter folgender Rufnummer 00 49 7351 474 99 0 zur Verfügung. Gern können Sie ebenfalls Ihren Ansprechpartner im Hause DIOS ZX unter der bekannten Rufnummer kontaktieren.

Diese Anleitung gehört zu dem von Ihnen erworbenen pa-on Parometer. Bewahren Sie diese griffbereit auf.

Copyright(s) und Warzeichen

DIOS ZX ist eine eingetragene Marke in Deutschland und/oder anderen Ländern.


DIOS ZX starten – System - Optionen

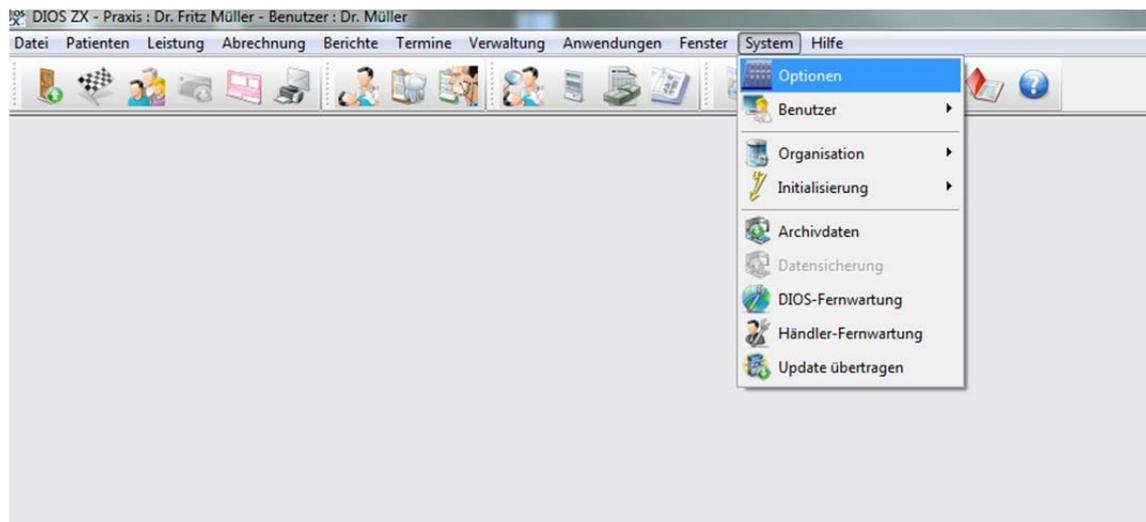

1. Anwendungen auswählen (Punkt 1), nun eine neue Anwendung hinzufügen (Punkt 2).
2. Den gesuchten Pfad ‚byzzparo.exe‘ auswählen und bestätigen.


>> bei einer byzzinstallation: C:\byzz\byzzparo.exe

>> bei einer Direktanbindung **ohne** byzz: C:\Programme\pa-on\byzzparo.exe

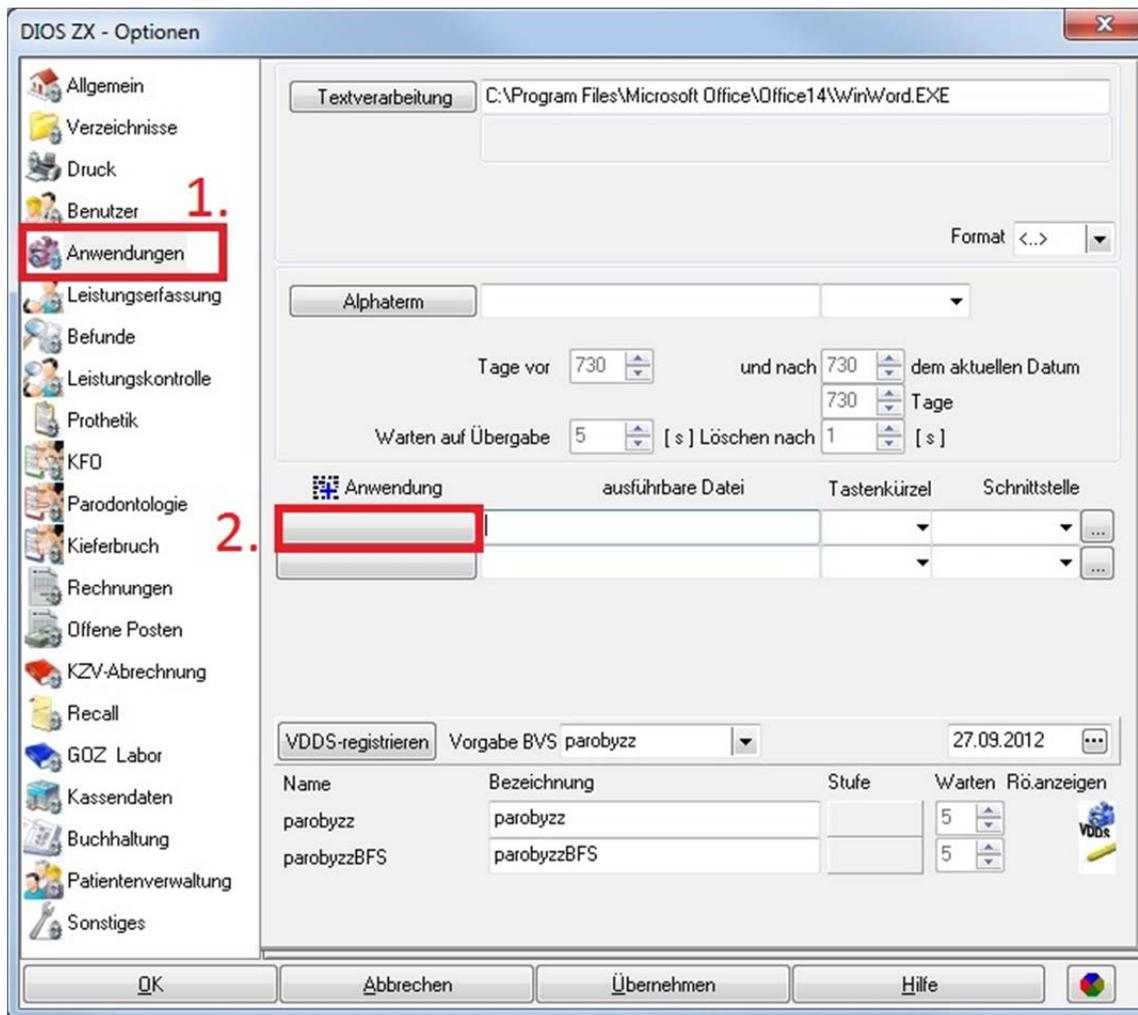


Der ‚Hotkey‘ nach Kundenwunsch auswählen.

>> **WICHTIG** ist die Schnittstelle – pa-on

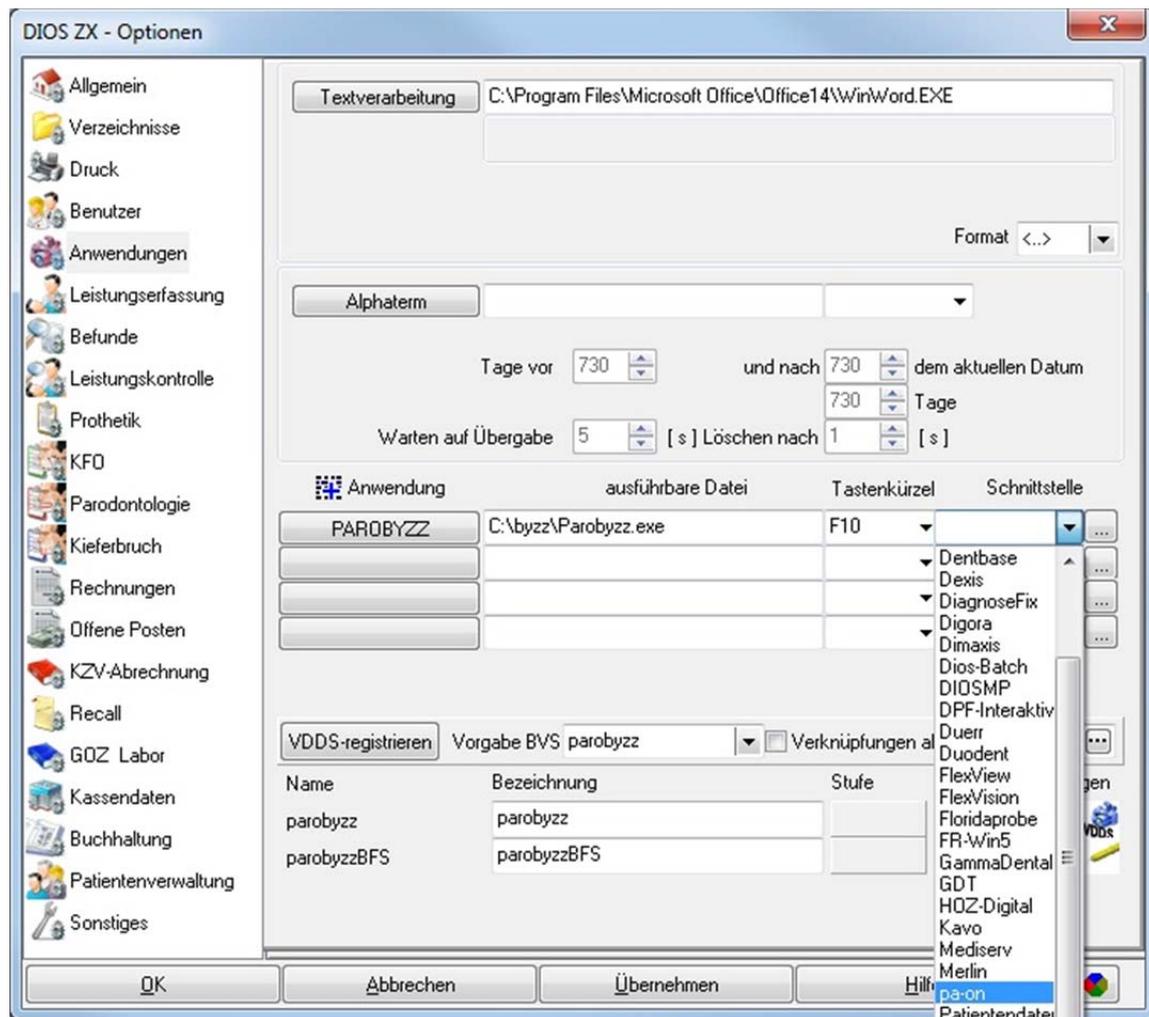


Die Schnittstelle wird abgefragt.

WICHTIG: Nur folgende auswählen: C:\USER\MaxMustermann >> Die Schnittstelle wird dann automatisch ausgewählt.

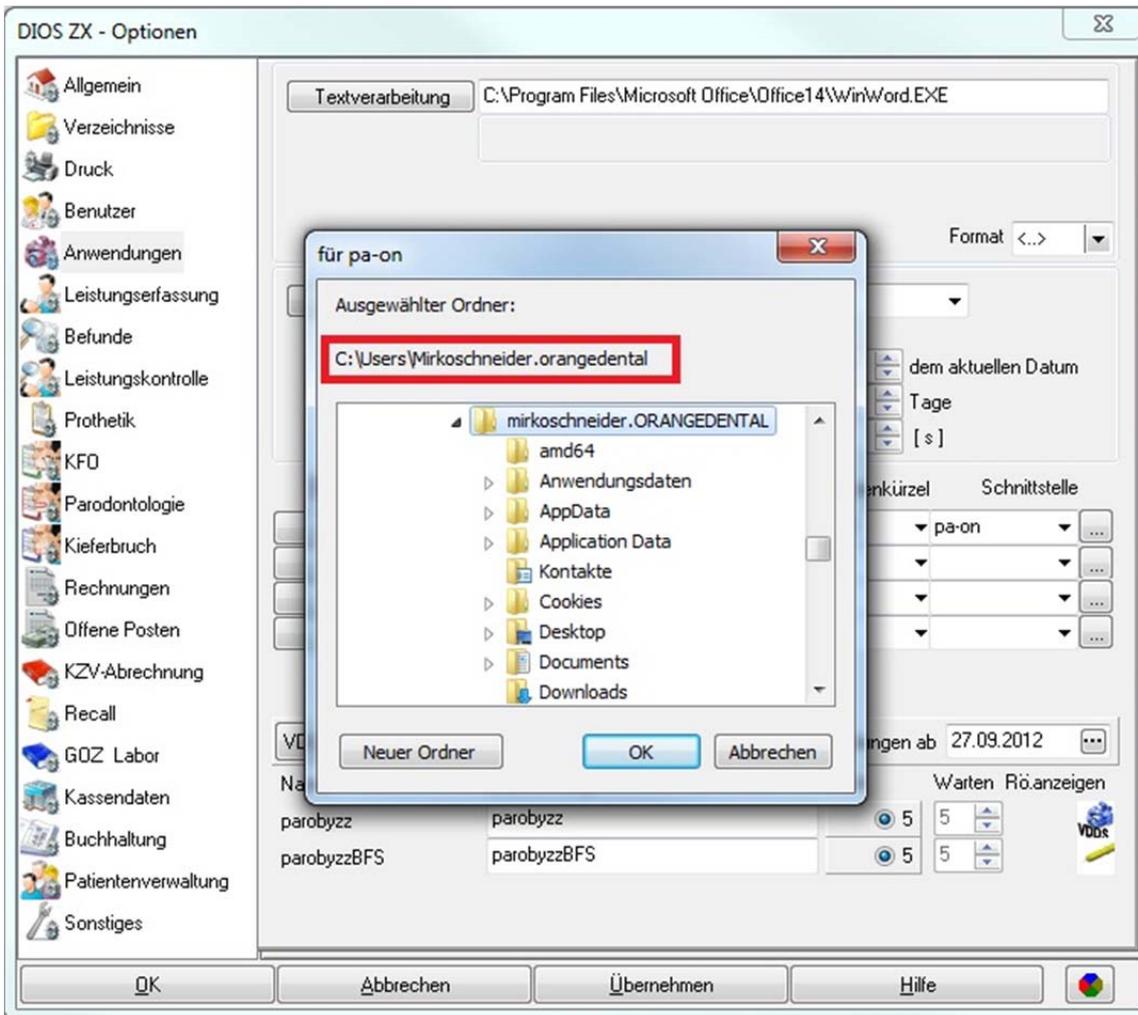


Einstellung mit ‚OK‘ bestätigen, das Fenster ‚Optionen‘ wird geschlossen.


Leistungserfassung (Punkt 1) aufrufen und einen Patienten auswählen (Punkt 2).

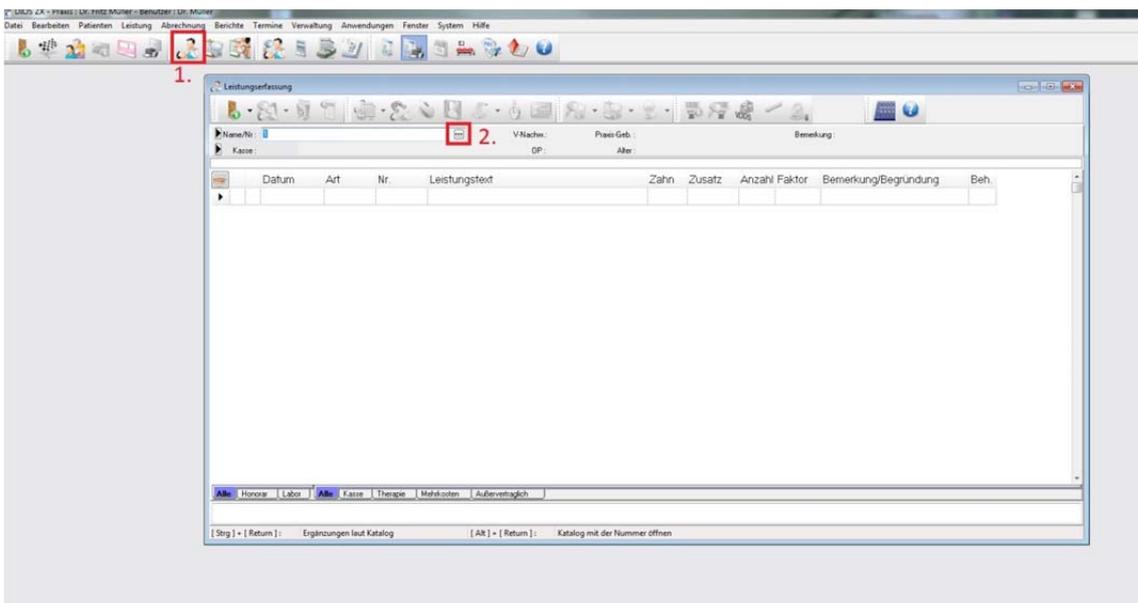


Ist die Leistungserfassung zu einem Patienten geöffnet, kann der 01 Befund angesehen werden.

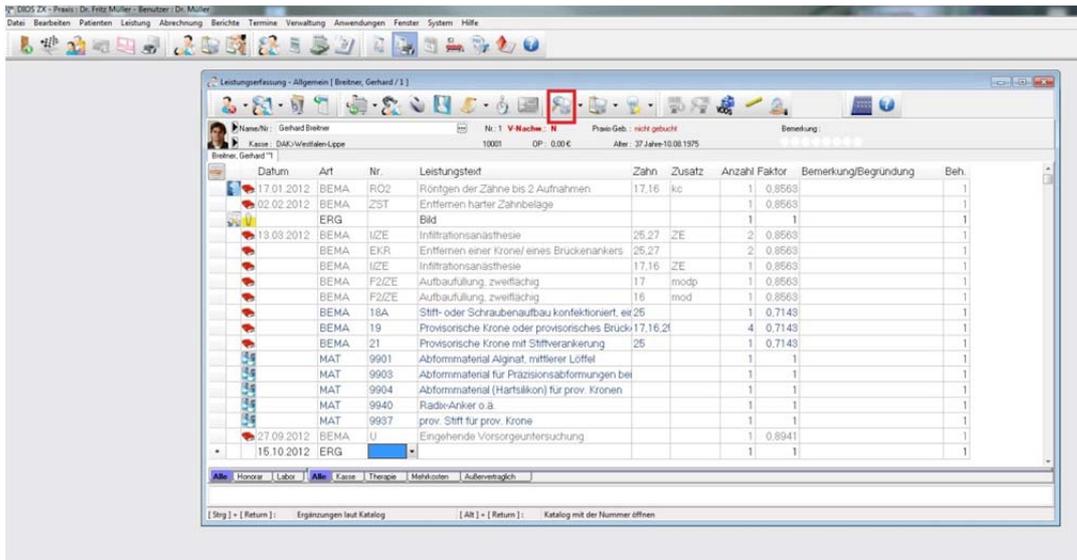


Der 01 Befund ist geöffnet und kann mit klicken auf ‚Details‘ (Punkt 1) um das PA-Modul erweitert werden. Mit der Auswahl (Punkt 2) und dem Button (Punkt 3) wird nun die Messung gestartet.

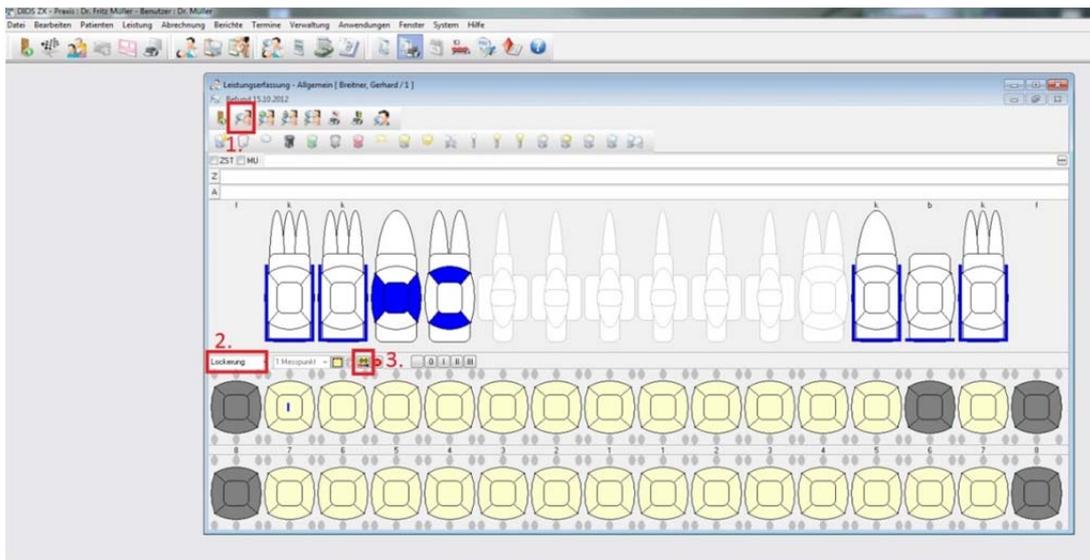

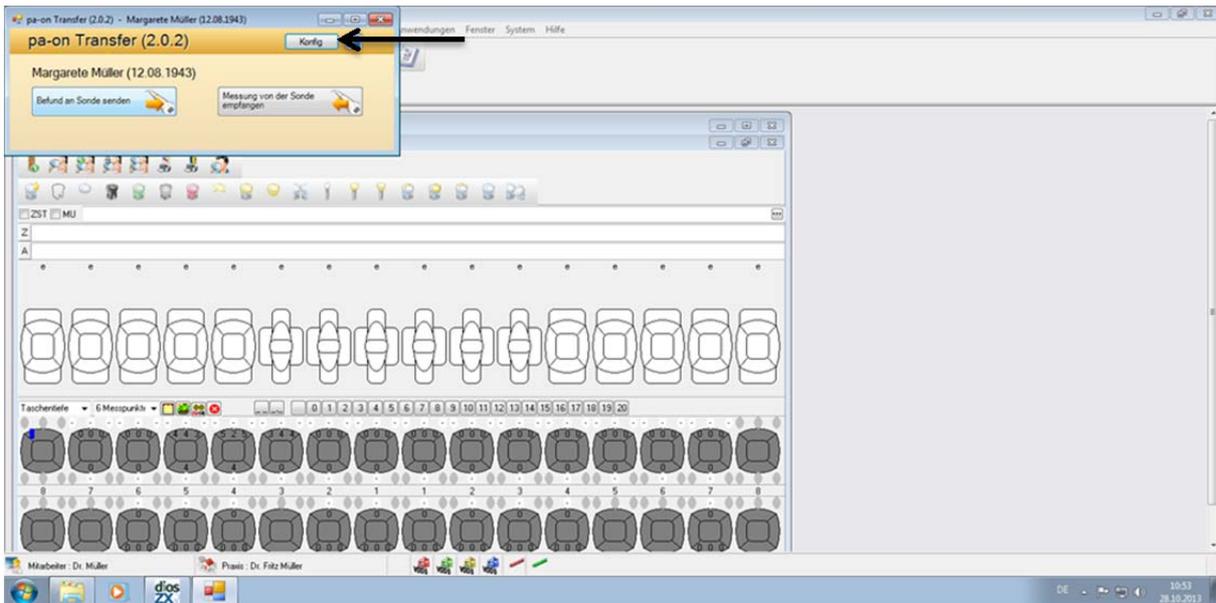


Einmalige Konfiguration der pa_on Transfer unter **Konfig**.

WICHTIG: Unter pa_on Transfer >> Konfig >> ‚Export CSV orangedental‘ einstellen und mit ‚OK‘ bestätigen.

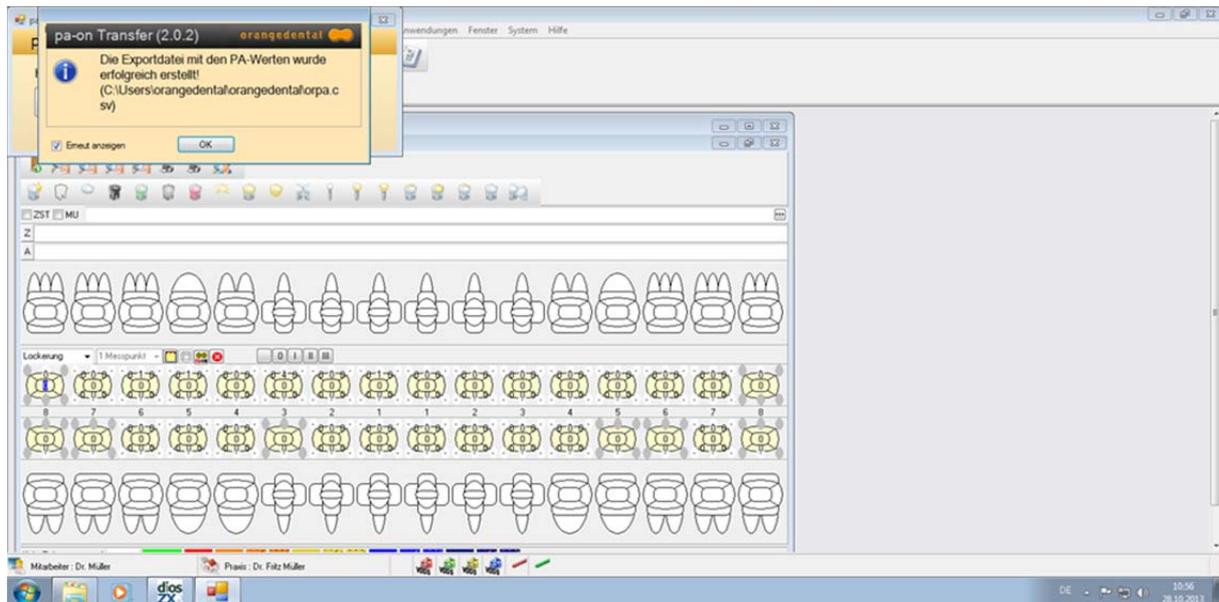

Nach Beendigung der Messung werden die Daten wieder durch den Button ‚pa-on‘ importiert.

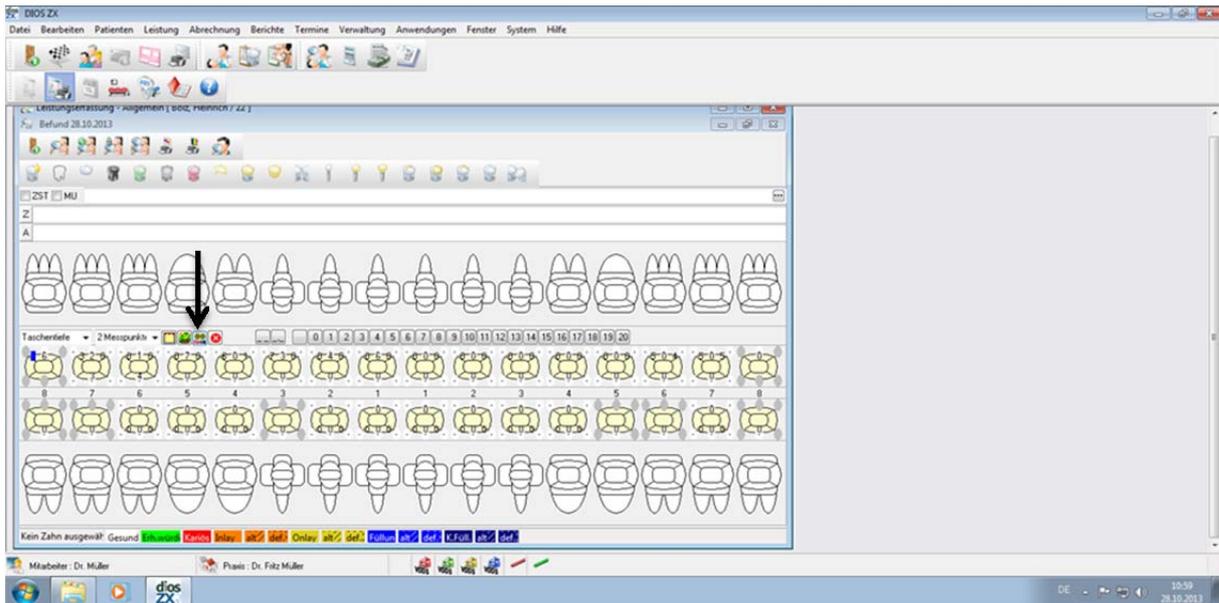

Gegebenenfalls müssen Sie DIOS ZX beenden und neu starten.

