



pa-on Sonde

Anbindung an Ergodent

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE


Vorwort

Diese Anleitung enthält eine genaue Beschreibung über die Anbindung mit der Praxissoftware Ergodent. Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen telefonisch oder per Email gern zur Verfügung.


Copyright(s) und Warzeichen

Ergodent ist eine eingetragene Marke in Deutschland und/oder anderen Ländern.


1. Starten Sie das Programm. Wählen Sie das Teilprogramm **PA-Abrechnung** aus oder drücken Sie die Taste F3.

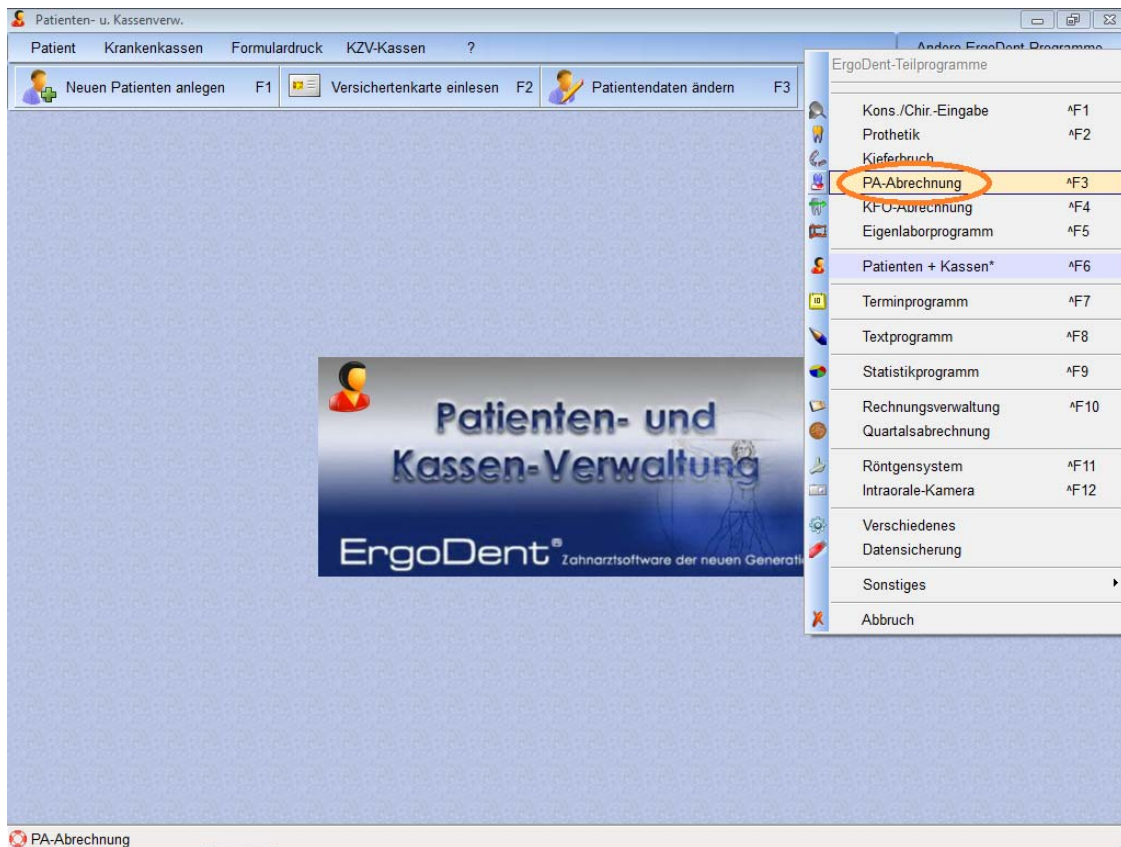


2. Klicken Sie auf den Karteireiter **Neuer PA-Plan** (F1) oder alternativ **Plan ändern** (F3).

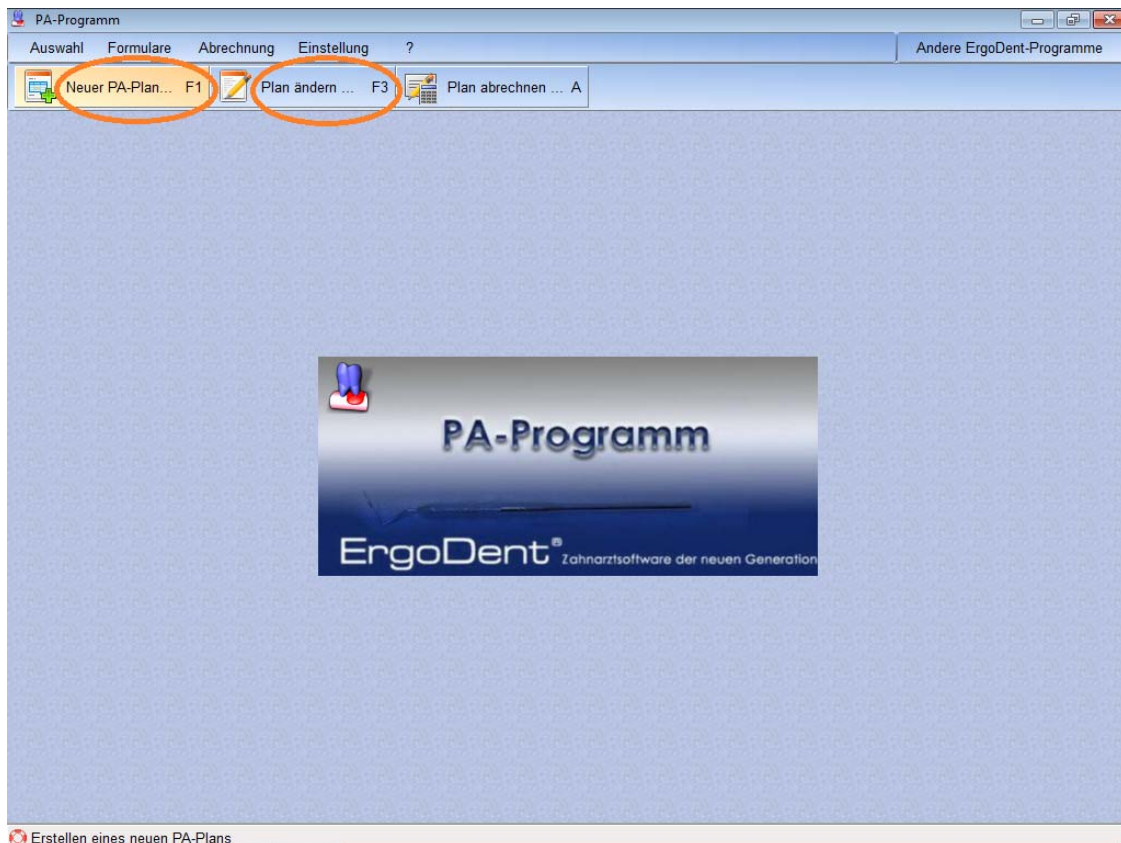


3. Wählen Sie zuerst Patienten aus. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf der linken Seiten die Schaltfläche ‚PA-Status‘.

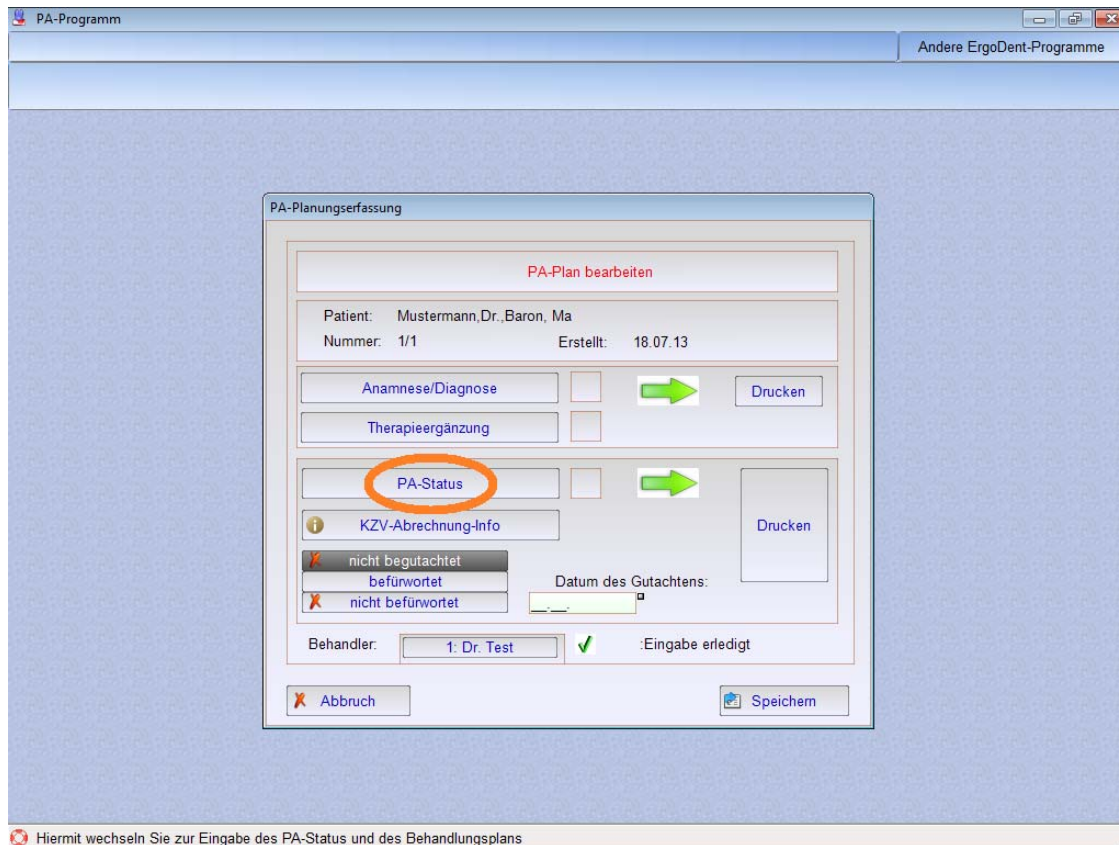

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚PA-On Start‘.

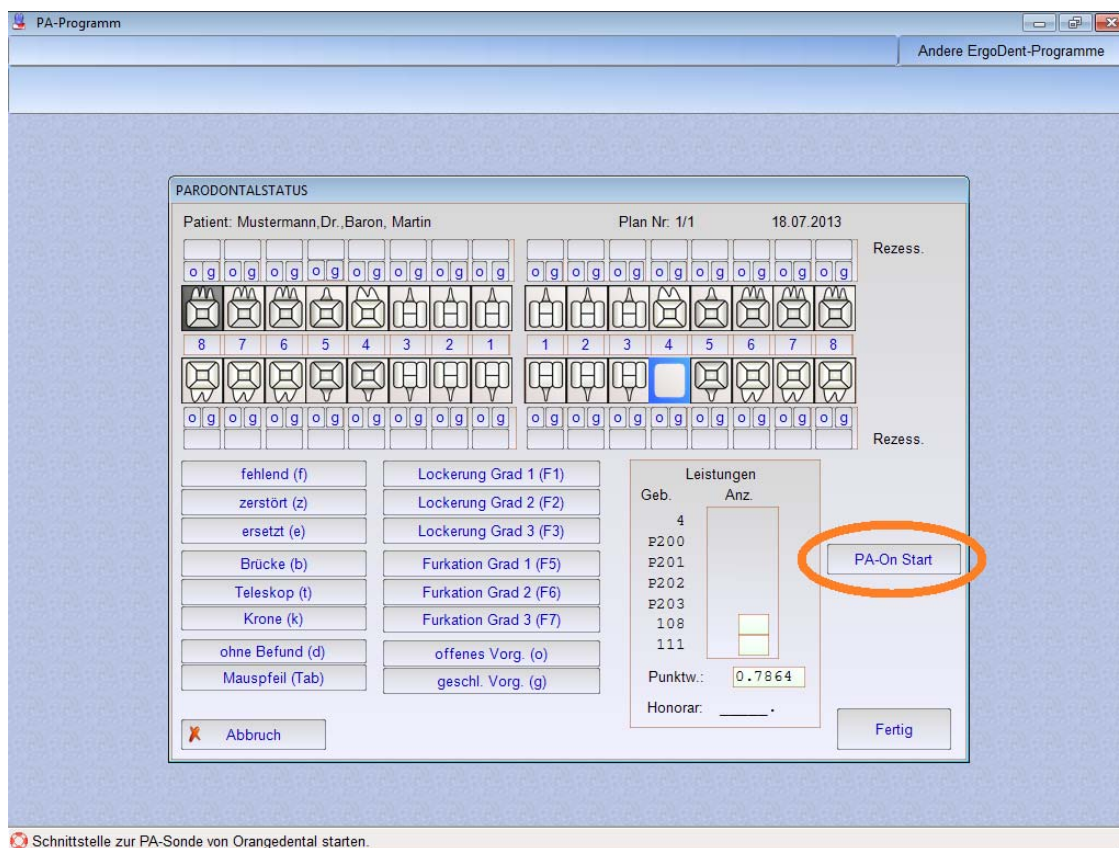


Dies startet die Software **pa-on Transfer**.

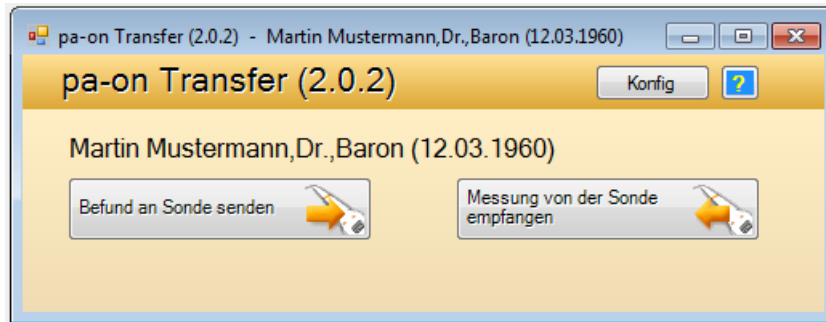

Hinweis: Wenn Sie beim Anklicken des **„PA-On Start“**-Knopfes gleichzeitig die Alt-Taste an der Tastatur drücken, wird das umfangreichere byzz Programm gestartet.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Konfig“**. Wählen Sie auf der rechten Seite unter **„Grundeinstellungen“** bei **„Export“** die Option **„INI“**, und bestätigen Sie diese Einstellungen mit **„Schließen“**.

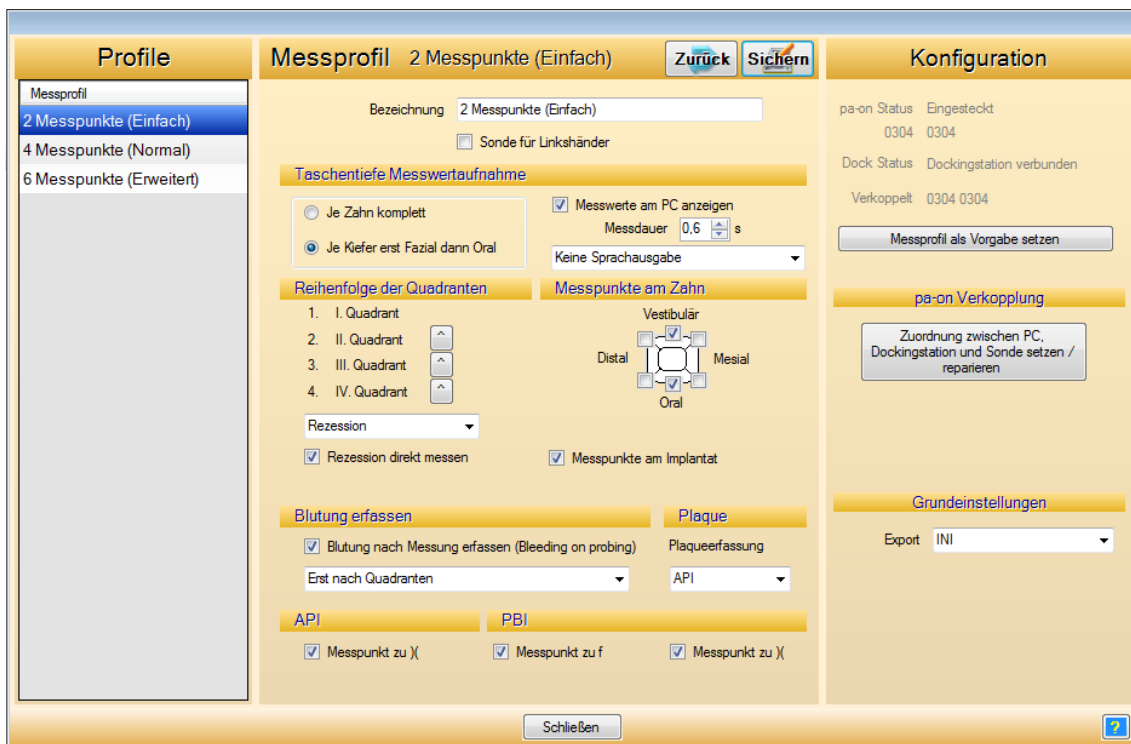

Hinweis: Erläuterungen zu den einzelnen Optionen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der pa-on.

Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt wird nun die Befunderhebung erfolgen und im Anschluss dieser mit einem Klick auf die Schaltfläche **„Messung von der Sonde empfangen“** exportiert werden. Der erfolgreiche Export wird Ihnen mit der nachfolgend dargestellten Meldung mitgeteilt werden.

