



pa-on Sonde

Anbindung an EVIDENT

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Vorwort

Diese Anleitung enthält eine genaue Beschreibung über die Anbindung mit der Praxissoftware EVIDENT.


Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen unsere Support Hotline unter folgender Rufnummer 00 49 7351 474 99 0 zur Verfügung. Gern können Sie ebenfalls Ihren Ansprechpartner im Hause Evident unter der bekannten Rufnummer kontaktieren.

Diese Anleitung gehört zu dem von Ihnen erworbenen pa-on Parameter. Bewahren Sie diese griffbereit auf.


Copyright(s) und Warzeichen

EVIDENT ist eine eingetragene Marke in Deutschland und/oder anderen Ländern.


Wählen Sie in Evident ihren Patienten aus.

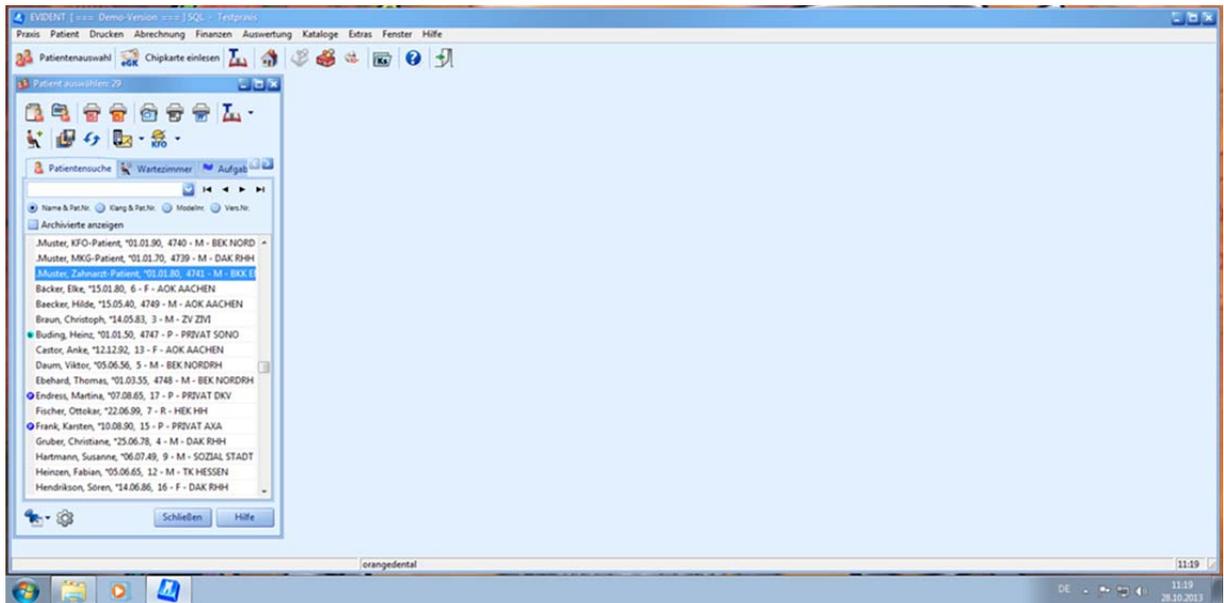


Über den Reiter ‚Pläne‘ erstellen Sie einen neuen ‚PA-Behandlungsplan‘.

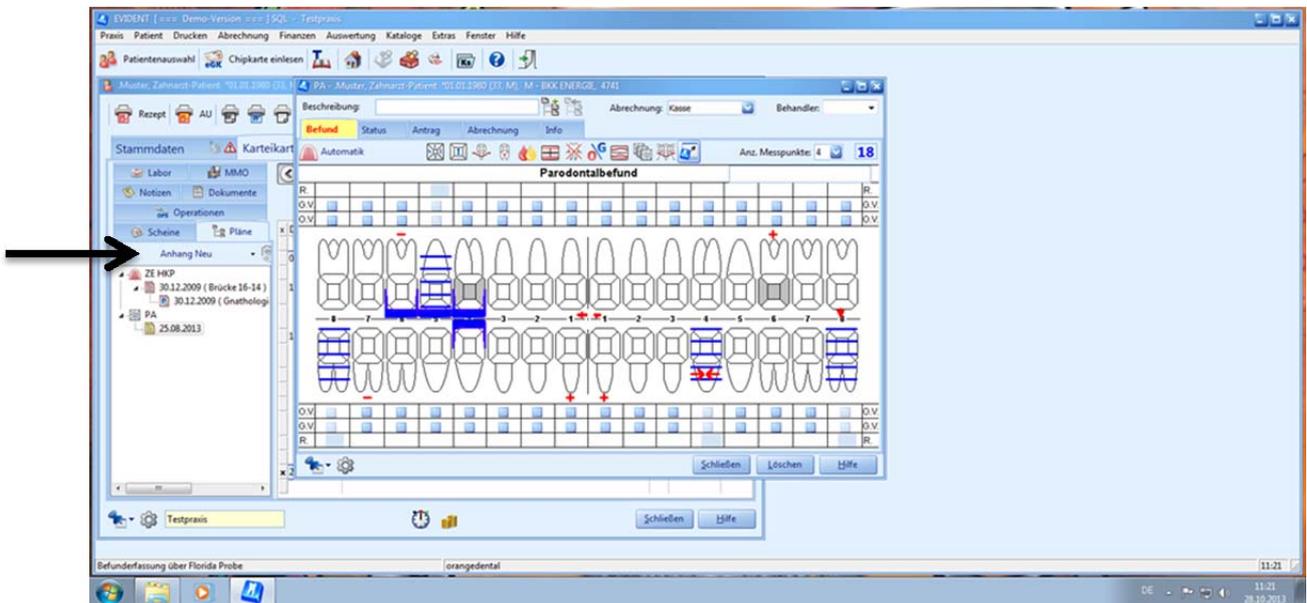


Ein leerer PA-Plan öffnet sich.

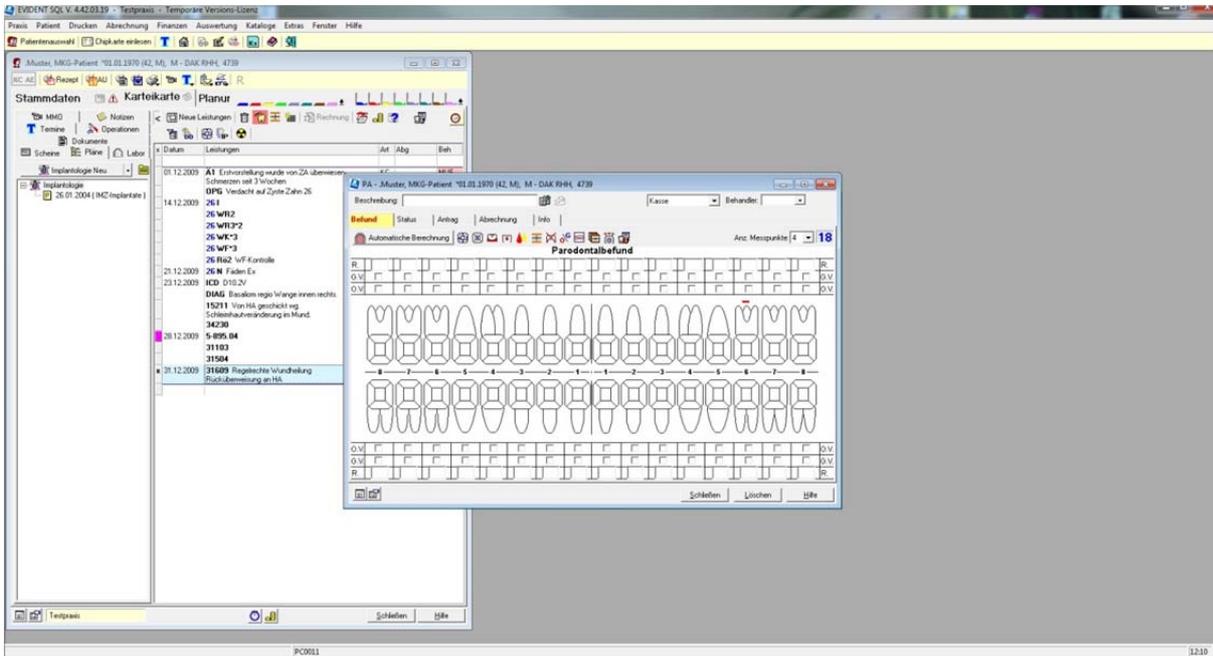

Bei der Installation muss nun einmalig die Schnittstelle zur pa-on Sonde definiert werden. Hierzu klicken Sie auf den ‚Konfigurations-Button‘ (rot markiert).

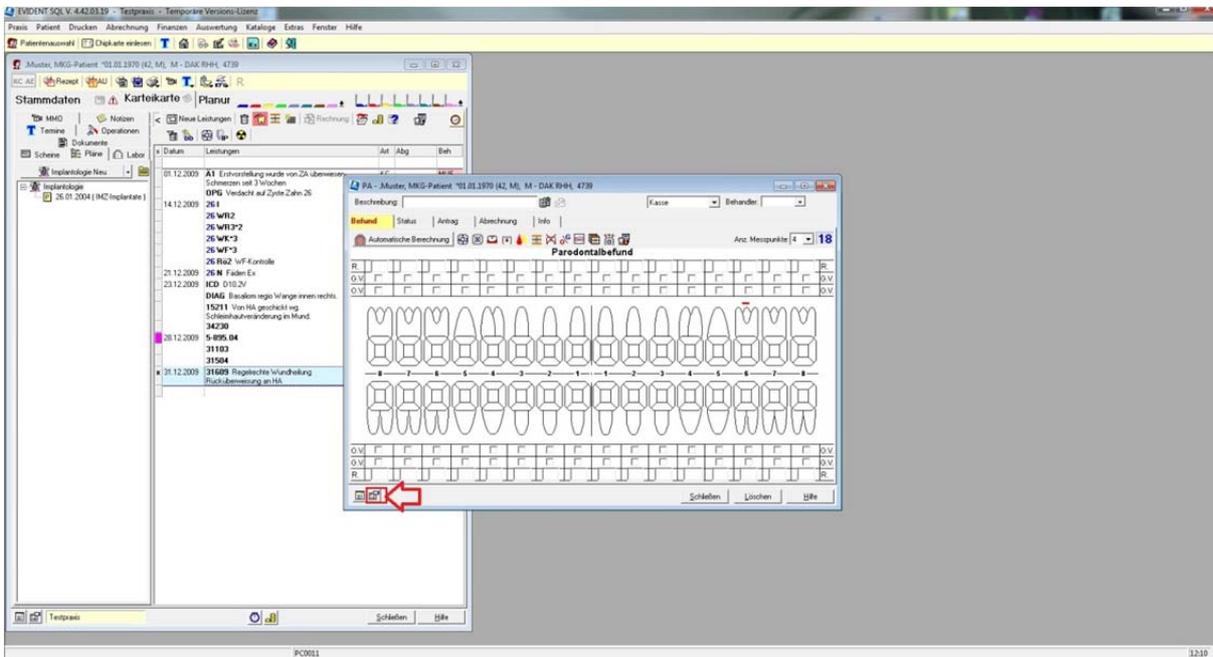


Folgende Einstellungen müssen durchgeführt werden.

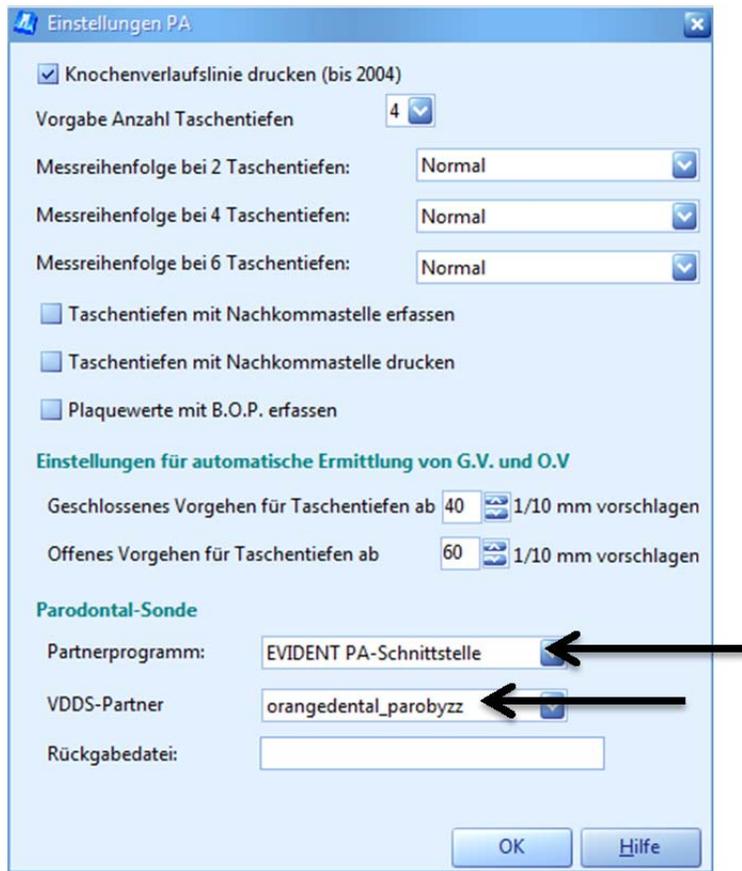


- a. Partnerprogramm: EVIDENT PA-Schnittstelle
- b. VDDS-Partner: orangedental_parobyyz

Bestätigen Sie diese Einstellungen mit ‚ok‘.

Bei erfolgreicher Konfiguration wird der ‚Button‘ mit einem Link zur ‚pa-on Transfer Software‘ erzeugt.

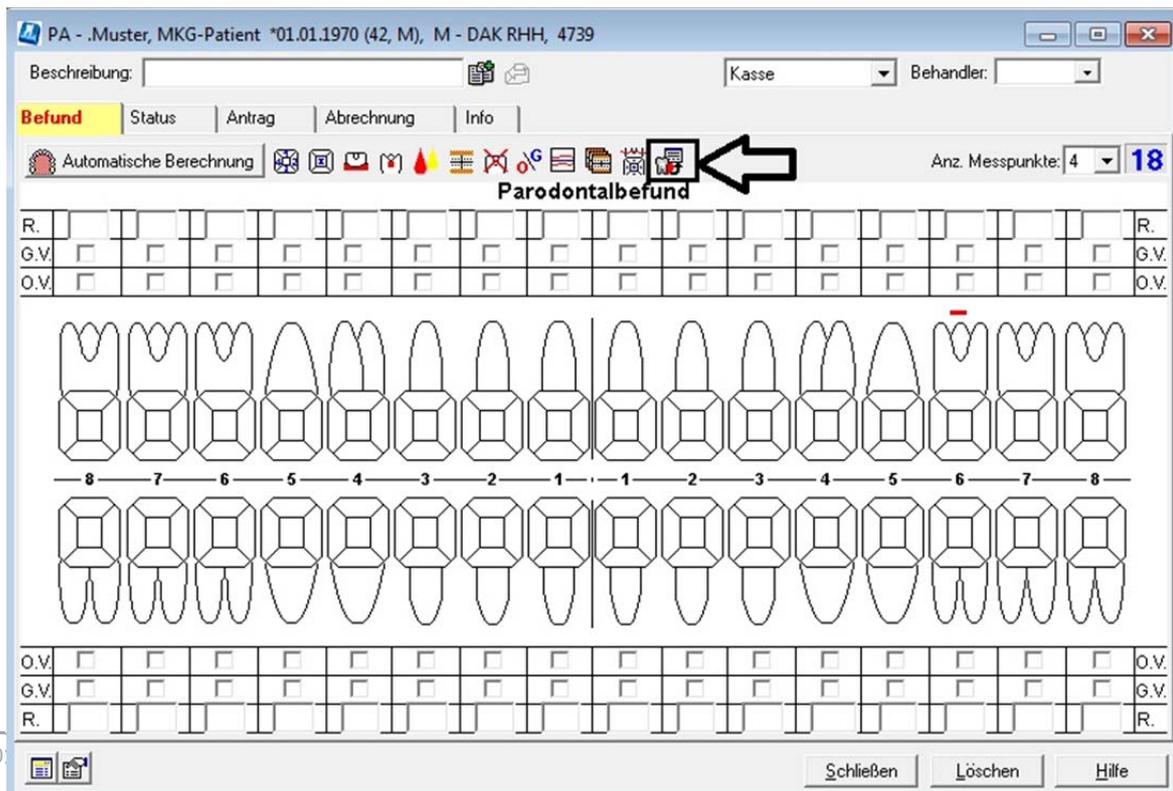


Öffnen Sie beim Installationsvorgang die Konfiguration der ‚pa-on Transfer Software‘ unter dem Button **Konfig**. Hier müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen.

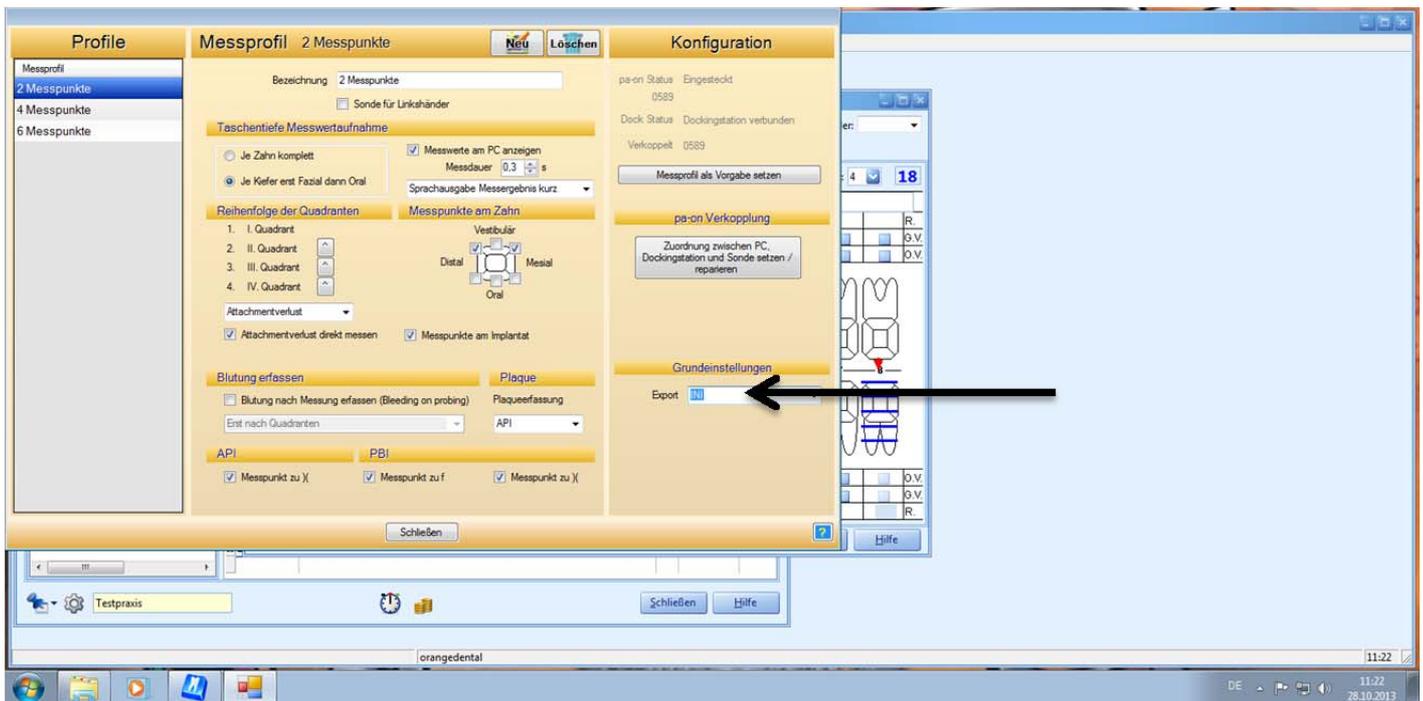


- a. Zu 1. Export INI einstellen
- b. Zu 2. Messpunkte am Zahn -> WICHTIG: bei einer 4 Punkt Messung muss die Konfiguration wie auf dem Bild gezeigt übernommen werden.


Schließen Sie nun die Konfigurationsseite der ‚pa-on Transfer Software‘ und übertragen Sie dem 01 Befund auf die Sonde. Führen Sie die Messung wie in der Bedienungsanleitung der Sonde beschrieben durch und lesen Sie die Messergebnisse aus.

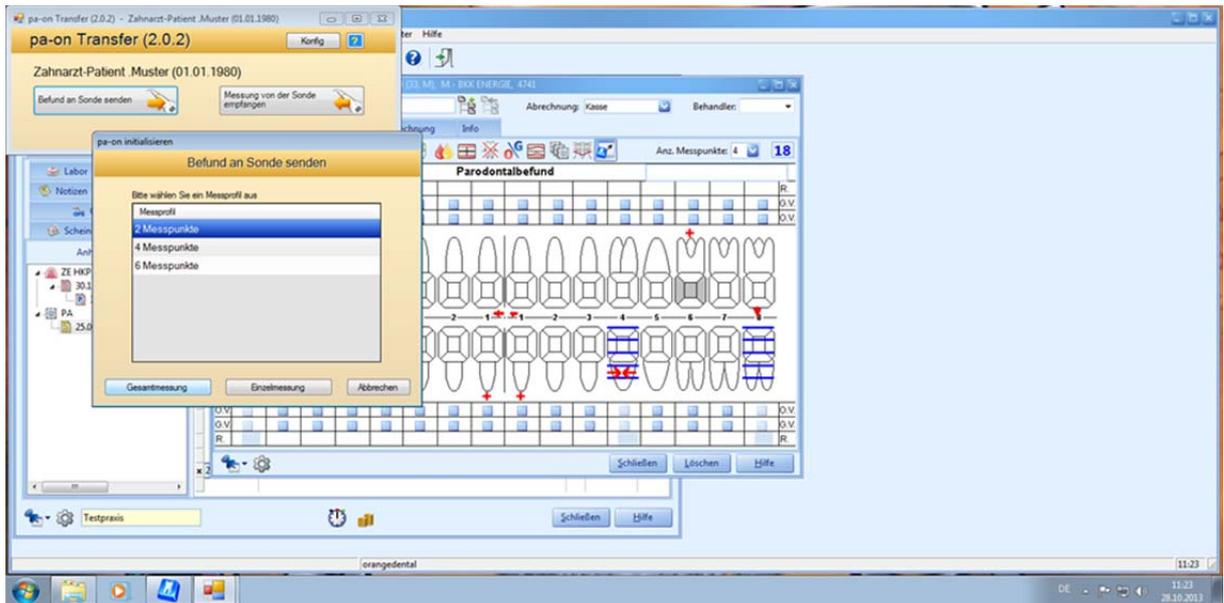

Wurden die Messergebnisse erfolgreich ausgelesen, wird Ihnen das in einem Informationsfeld angezeigt. Hier wird auch der Pfad der gespeichert Datei genannt.

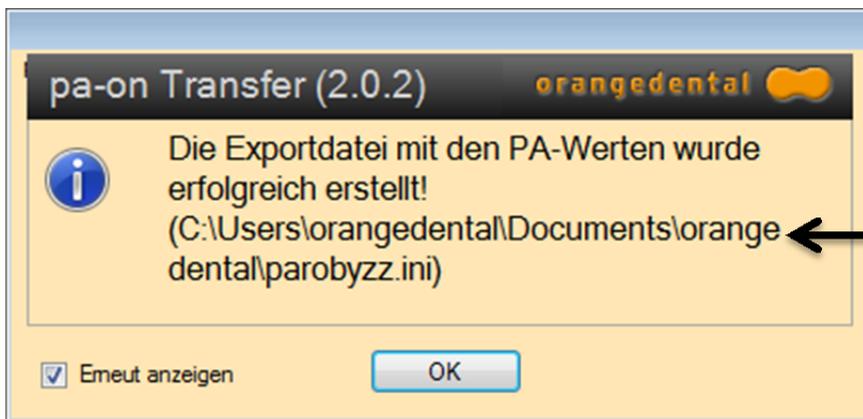

- a. Dieser Pfad (wie hier im Beispiel C:\Users\orangedental\Documents\orangedental\parobyzz.ini) muss nun EINMALIG in Evident eingestellt werden. Hierzu öffnen Sie die Schnittstellenkonfiguration in Evident. In das Eingabefenster ‚Rückgabedetail‘ tragen Sie den Pfad ein, der Ihnen im Übergabefenster genannt wird.

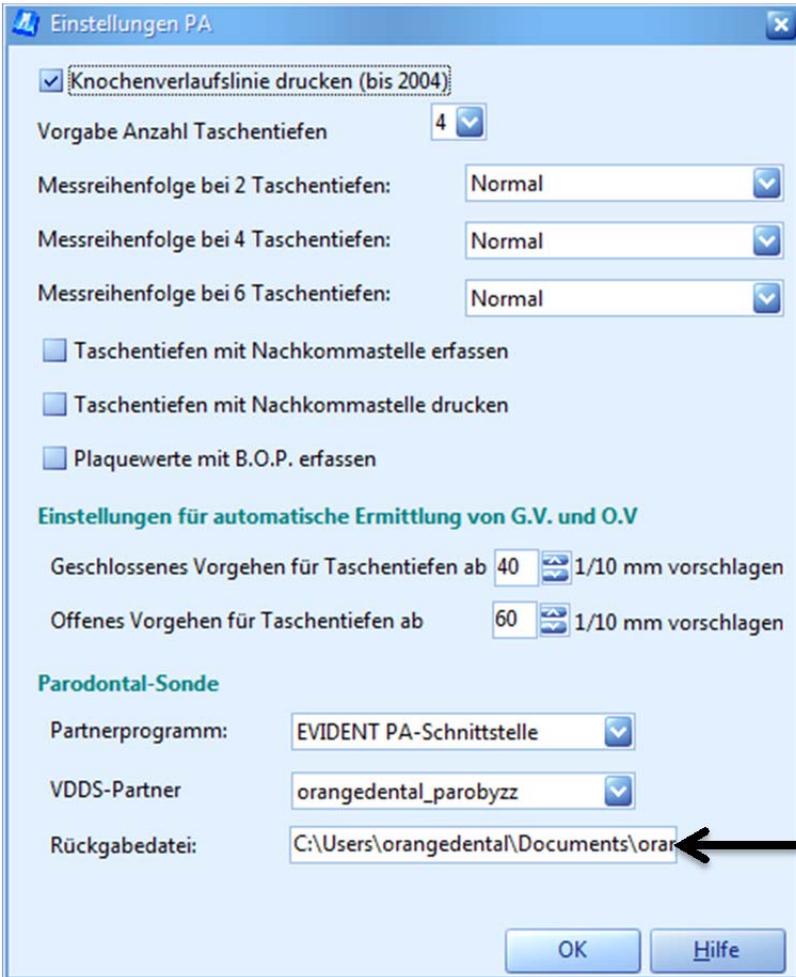

Einstellungen PA

Knochenverlaufslinie drucken (bis 2004)

Vorgabe Anzahl Taschentiefen: 4

Messreihenfolge bei 2 Taschentiefen: Normal

Messreihenfolge bei 4 Taschentiefen: Normal

Messreihenfolge bei 6 Taschentiefen: Normal

Taschentiefen mit Nachkommastelle erfassen

Taschentiefen mit Nachkommastelle drucken

Plaquewerte mit B.O.P. erfassen

Einstellungen für automatische Ermittlung von G.V. und O.V

Geschlossenes Vorgehen für Taschentiefen ab 40 1/10 mm vorschlagen

Offenes Vorgehen für Taschentiefen ab 60 1/10 mm vorschlagen

Parodontal-Sonde


Partnerprogramm: EVIDENT PA-Schnittstelle

VDDS-Partner: orangedental_parobyzz

Rückgabedatei: C:\Users\orangedental\Documents\ora...

OK Hilfe

1. Der Befund wird nun in den PA-Plan übernommen.

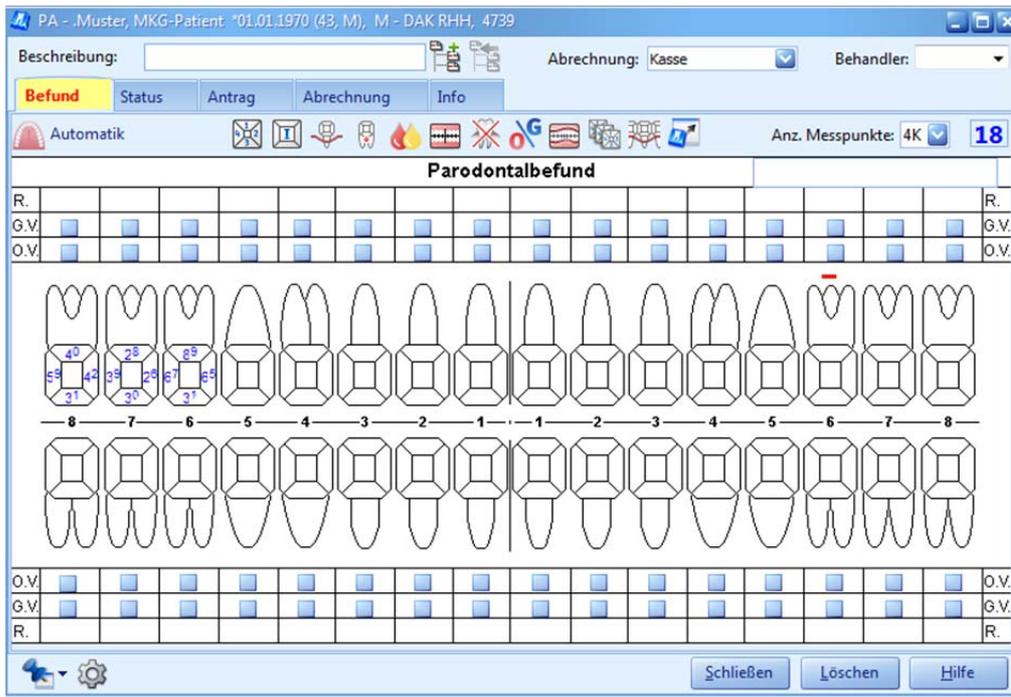

2. Gegebenenfalls müssen Sie Evident schließen und neu starten.

