



pa-on Sonde

Anbindung an KOPFWERK

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Vorwort


Diese Anleitung enthält eine genaue Beschreibung über die Anbindung mit der Praxissoftware KOPFWERK. Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen telefonisch oder per Email gern zur Verfügung.

Diese Anleitung gehört zum pa-on Parameter. Bewahren Sie sie griffbereit auf.


Copyright(s) und Warzeichen

KOPFWERK ist eine eingetragene Marke in Österreich und/oder anderen Ländern.


1. Installieren Sie das Power.Dent-Programm: CD >> Powerdent >> setup.exe
2. Kopieren Sie die Datenbank auf den Computer: CD >> Ordner >> ‚DentDatei‘
3. Doppelklicken Sie die Datei „Dentdatei.kpd“ im Ordner „DentDatei“, dadurch wird das Programm gestartet. Bestätigen Sie die Lizenzmeldung mit ‚Ja‘ und melden sich bei der Benutzeranmeldung mit ‚Verwalter‘ ohne Passwort an.

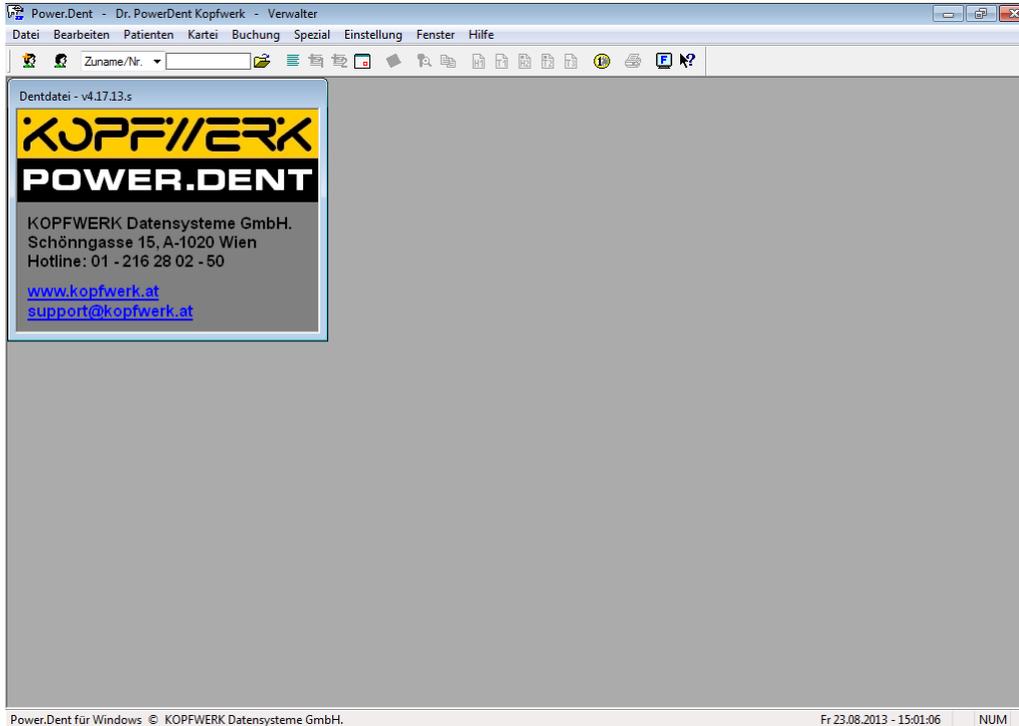


4. VDDS-Schnittstelle zu parobyzz einrichten.
Menü ‚Einstellung >> Aktueller Arbeitsplatz >> Partnerprogramme‘.

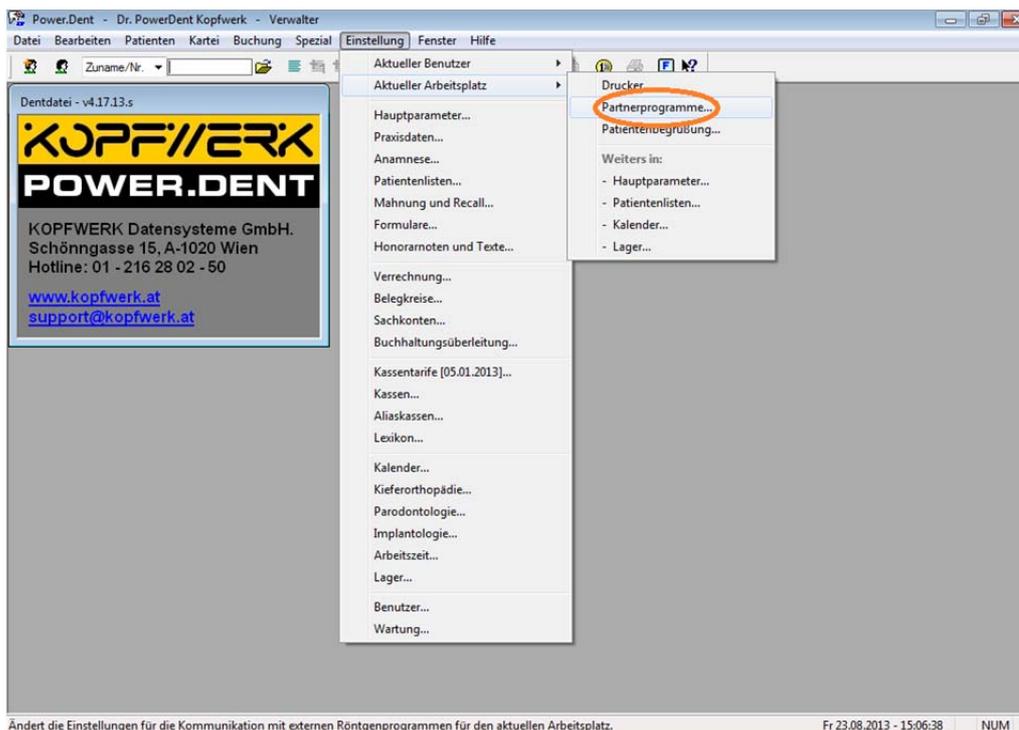

Aktivieren Sie zuerst am Reiter ‚Allgemein‘ VDDS.

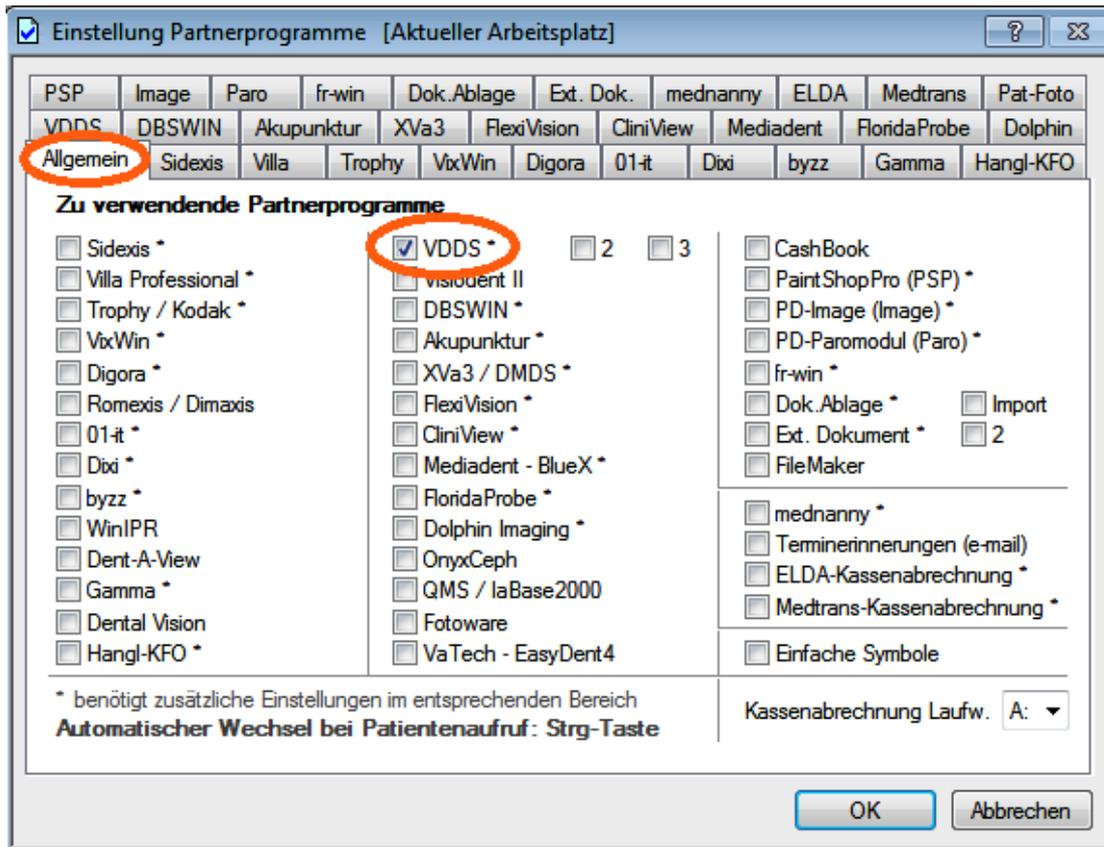

Wählen Sie jetzt für den Reiter ‚VDDS‘ parobyzz aus. Die Formatierung der Patientennummer schlagen wir „5-stellig“ vor. Das ist immer ein Thema, wenn weitere Programme zusammenspielen sollen, oder nach einem Anbieterwechsel die Weiterverwendung der Altdaten gegeben sein muss. Bestätigen Sie mit ‚OK‘.

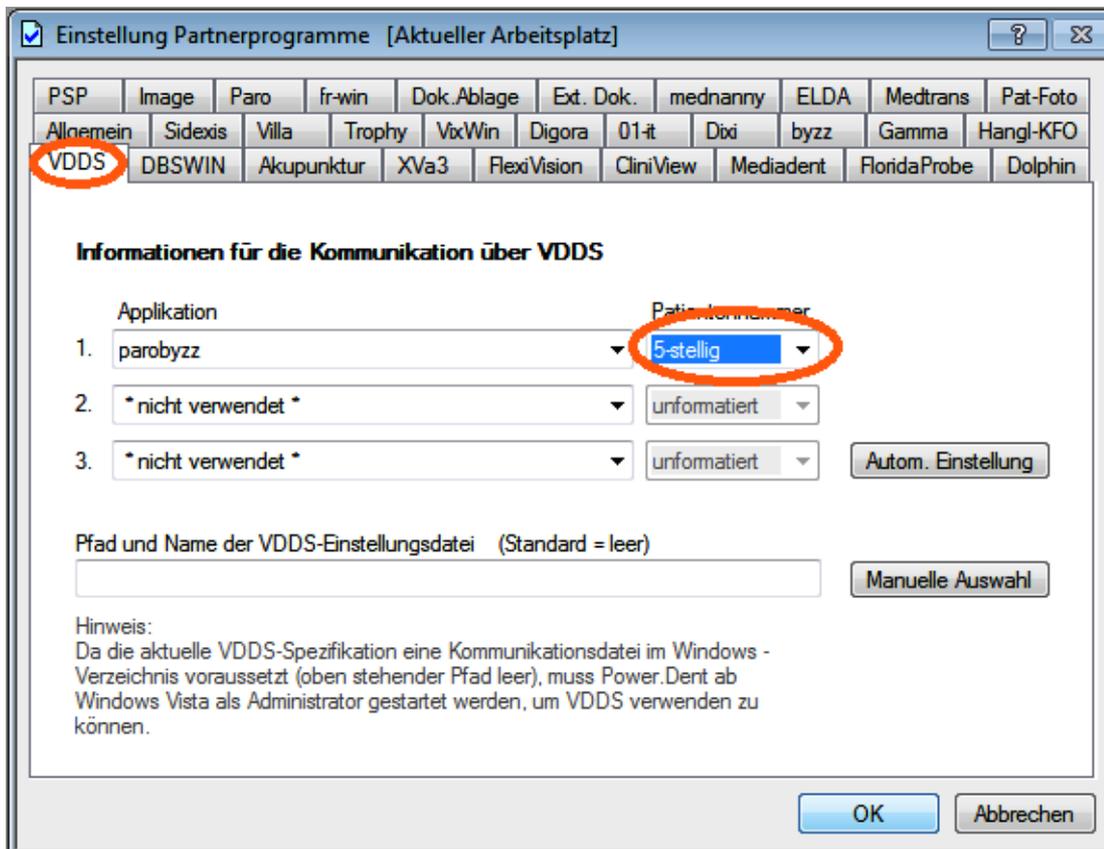

5. Danach taucht in der Symbolleiste ein neues Symbol auf. Klicken Sie das Röntgensymbol in der Mitte der Symbolleiste. Dies startet die Software pa-on Transfer.



6. Klicken Sie in pa-on Transfer auf die Schaltfläche ‚Konfig‘, dies öffnet einen Dialog in dem die Einstellungen für die pa-on vorgenommen werden können.



7. Wählen Sie auf der rechten Seite unter ‚Grundeinstellungen‘ bei ‚Export‘ die Option ‚CSV orangedental‘ und bestätigen Sie diese Einstellungen mit ‚Schließen‘.




Hinweis: Erläuterung zu den einzelnen Optionen finden Sie im Handbuch der pa-on.




Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt wird nun die Befunderhebung erfolgen und im Anschluss dieser mit einem Klick auf die Schaltfläche ‚Messung von der Sonde Empfangen‘ exportiert werden. Der erfolgreiche Export wird Ihnen mit der nachfolgend dargestellten Meldung mitgeteilt werden.

8. Klicken Sie das zweite Symbol links in der Symbolleiste und geben Sie ‚1‘ oder ‚Test‘ ein. Die Patientenakte wird dann aufgerufen. Wechseln Sie anschließend in den Reiter ‚Paro‘.

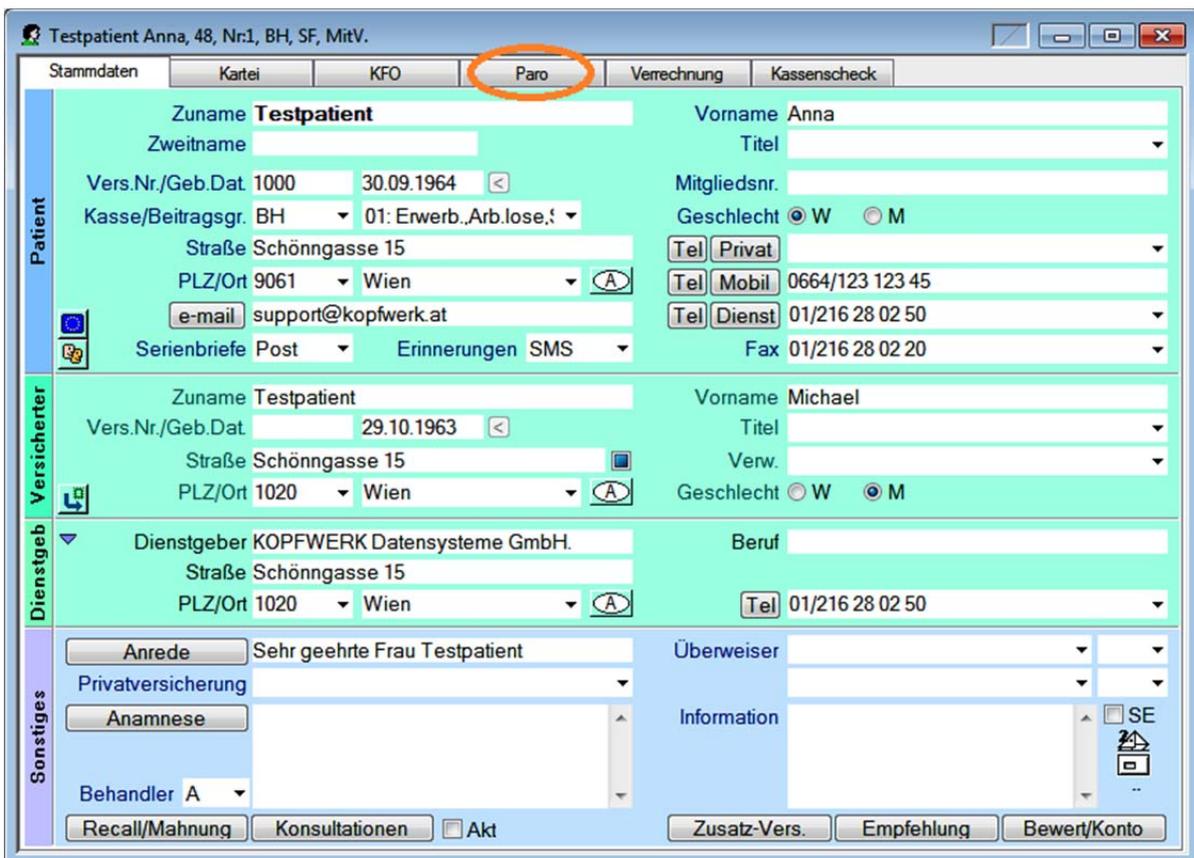

Tab	Field	Value
Patient	Zuname	Testpatient
	Vorname	Anna
	Zweitname	
	Titel	
	Vers.Nr./Geb.Dat	1000 30.09.1964
	Mitgliedsnr.	
	Kasse/Beitragsgr.	BH 01: Erwerb., Arb.lose, f
	Geschlecht	<input checked="" type="radio"/> W <input type="radio"/> M
	Straße	Schöngasse 15
	PLZ/Ort	9061 Wien
Versicherter	Zuname	Testpatient
	Vorname	Michael
	Vers.Nr./Geb.Dat	29.10.1963
	Titel	
Dienstgeb	Dienstgeber	KOPFWERK Datensysteme GmbH.
	Beruf	
	Tel	01/216 28 02 50
Sonstiges	Anrede	Sehr geehrte Frau Testpatient
	Überweiser	
	Privatversicherung	
	Information	
	Behandler	A

- Wechseln Sie jetzt in den Reiter ‚Paro‘ und klicken Sie mit rechter Maustaste in den unteren Listenbereich. Danach klicken Sie den Befehl ‚Importiere aus orangedental‘.

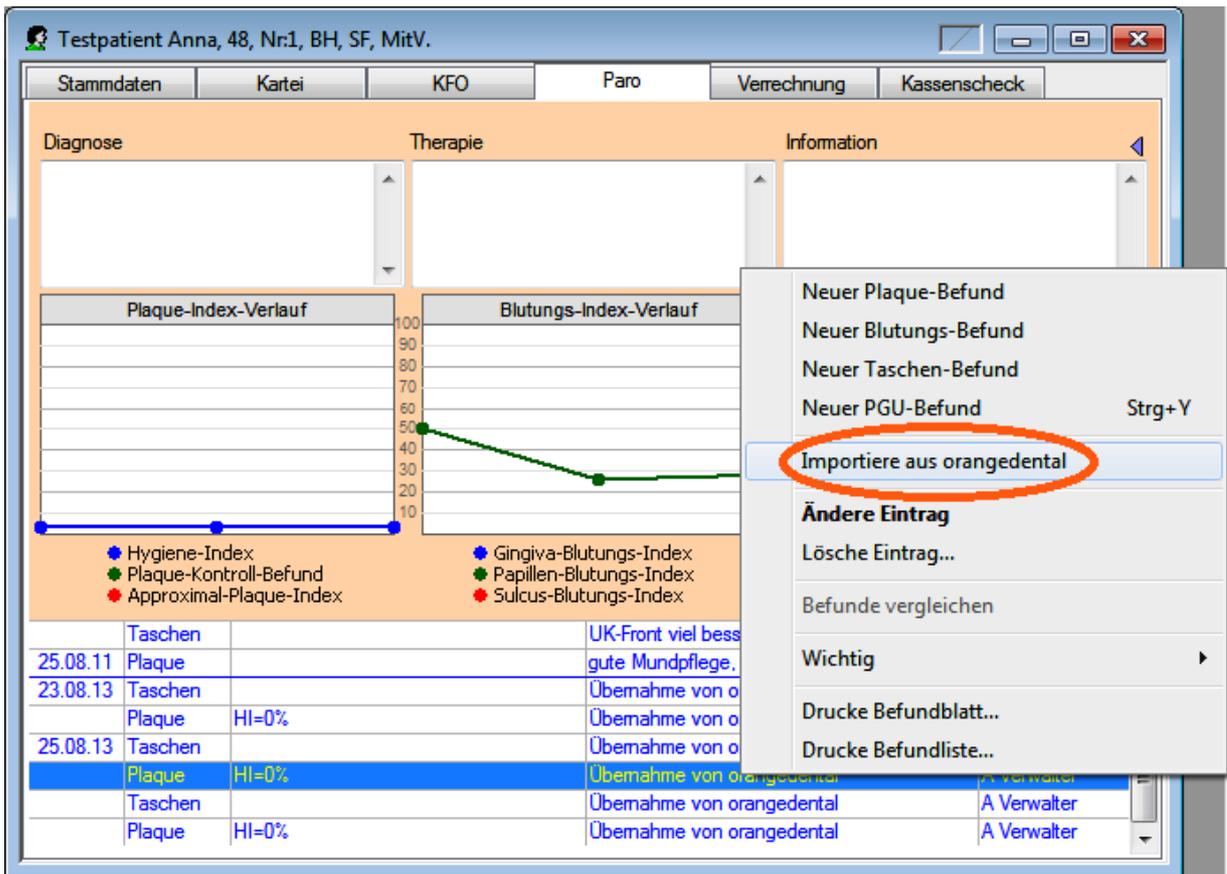

- Die Daten werden nun importiert.

