
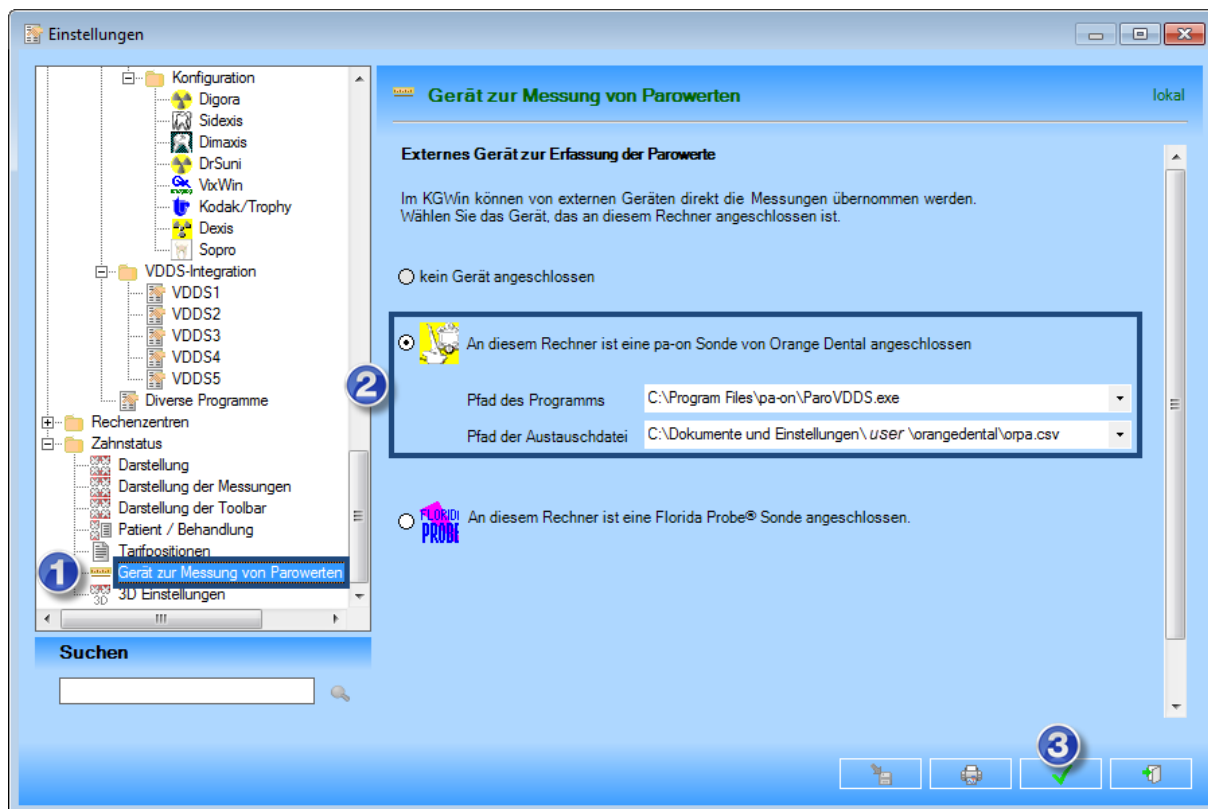


Schnittstelle zu pa-on (Firma Orangedental) aktivieren


Aktivieren der Schnittstelle für die pa-on Sonde

Optionen Lokal aufrufen

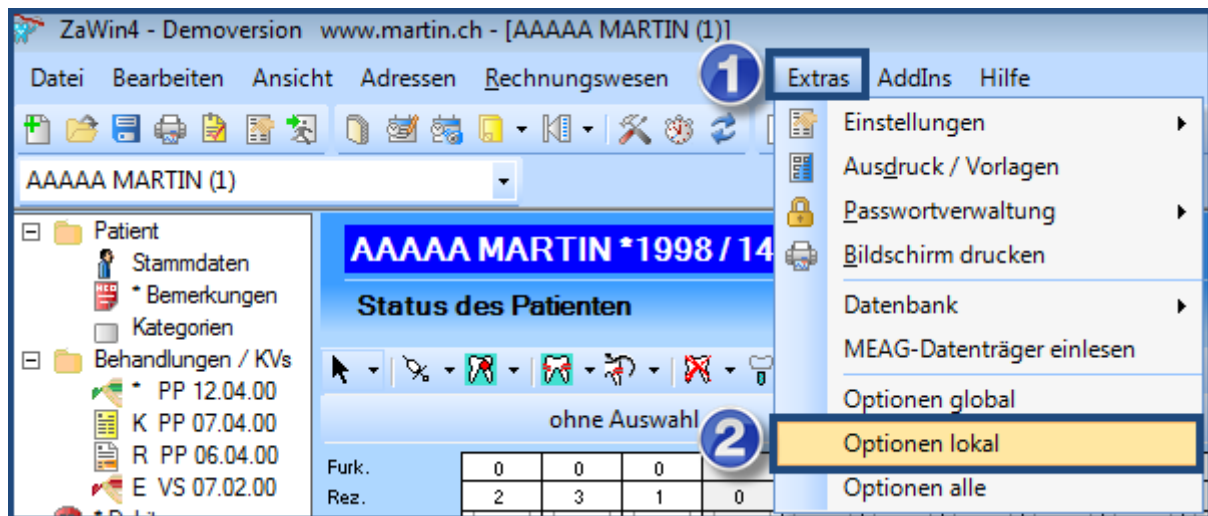


Wurde für die pa-on Software eine Standardinstallation durchgeführt, sind bei den Pfadeinstellungen keine Änderungen notwendig. Fenster mit Speichern verlassen und ZaWin4 neu starten.

Daten an die pa-on Sonde übertragen

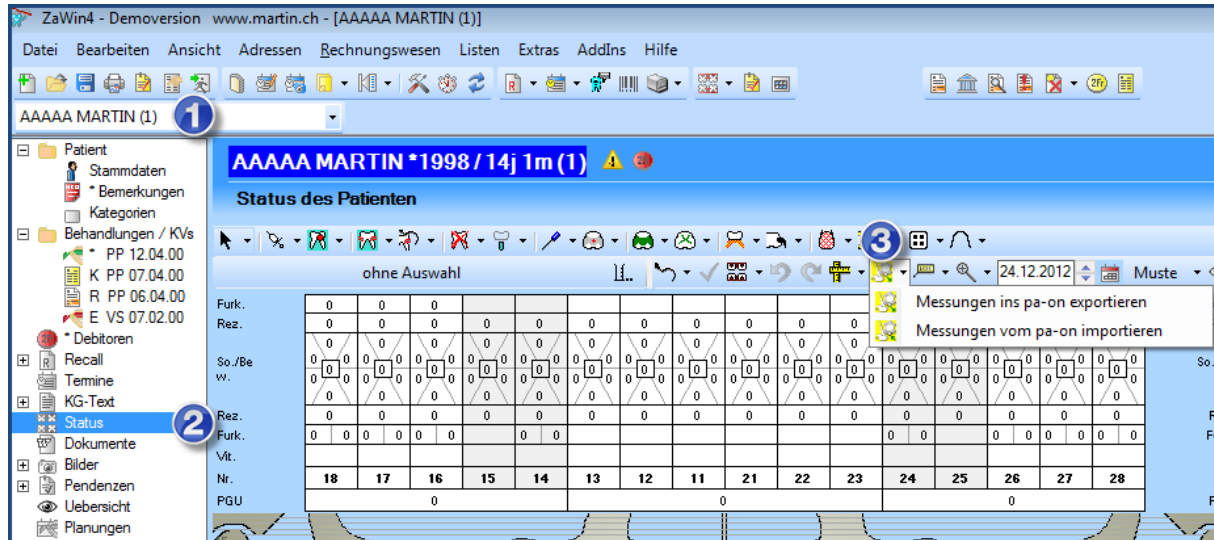

1. Patient aufrufen
2. zu Status wechseln
3. Auf das Icon selber oder auf den Pfeil klicken und <Messungen ins pa-on exportieren> wählen.

- Nun startet die Software zur Übertragung der Daten an die Sonde
- Daten an die Sonde übertragen

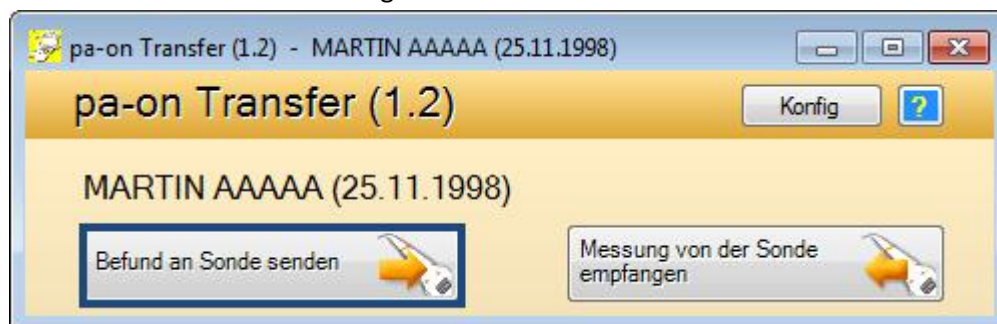


- Messung(en) mit der pa-on Sonde durchführen

Martin Engineering AG
Gewerbstrasse 1
CH-8606 Nänikon
www.martin.ch


Telefon +41 44 905 25 25
Telefax +41 44 942 15 15
Hotline +41 44 905 25 55
info@martin.ch



Messdaten von der Sonde abholen

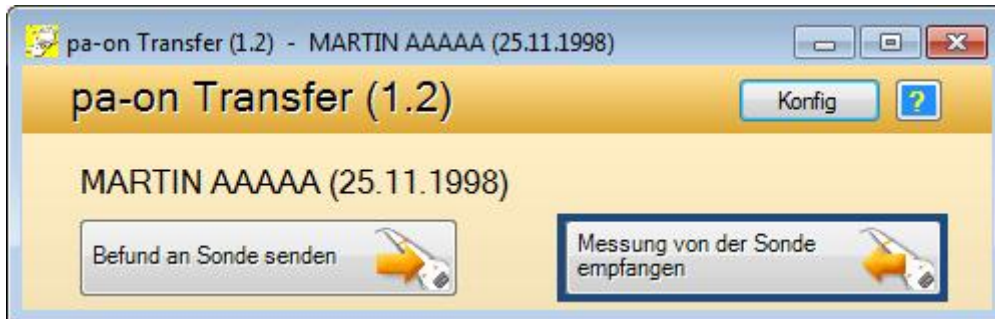

Daten in ZaWin4 importieren

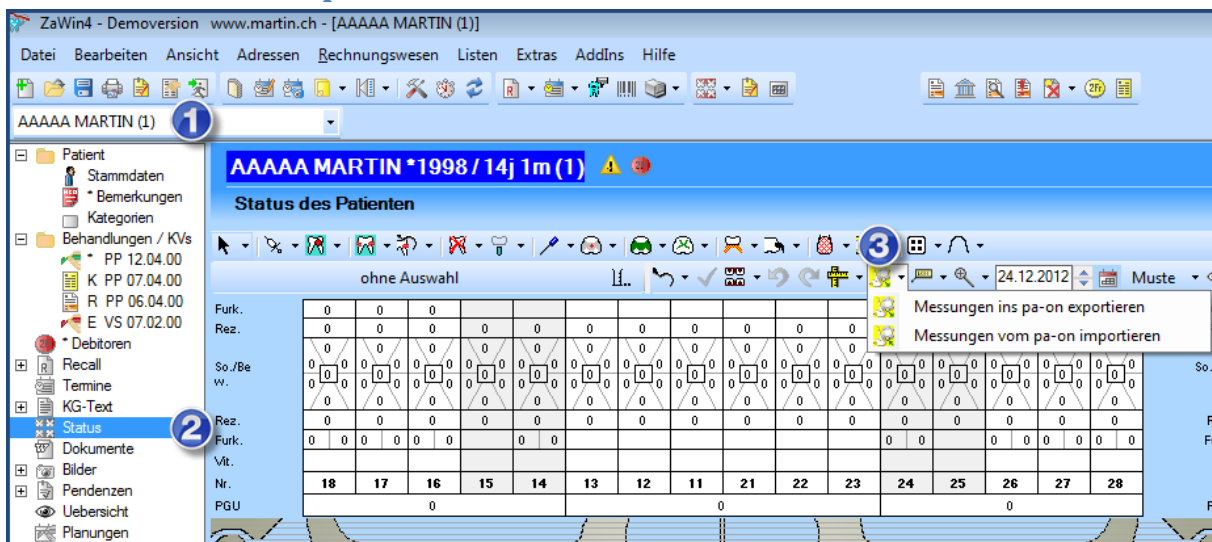

3. Auf das Icon selber oder auf den Pfeil klicken und <Messungen vom pa-on importieren> wählen.