

Quickstart Anwender



spot-on® cordfree




Werkseinstellung

- Winkelabhängige Abschaltautomatik ist, nach einmaligem Unterschreiten des Abschaltwinkels, aktiviert.
- Leuchtstärkeneinstellung: 10000 Lux


1. Inbetriebnahme (siehe BDA: Kapitel 3)

Akku einsetzen, Touchbutton dabei nicht berühren (Sensor wird kalibriert). Licht geht an und nach ein paar Sekunden wieder aus. Licht ist jetzt betriebsbereit.

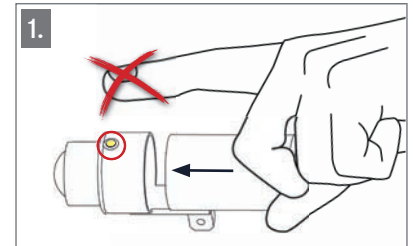

2. An-/ Ausschalten des Lichts (siehe BDA: Kapitel 4)

Durch Berühren des Touchbuttons geht das Licht an, durch nochmaliges Berühren wieder aus. Falls Sie Schwierigkeiten haben, den Touchsensor zu ertasten, streichen Sie mit Ihrem Finger von der Akkueinheit aus nach vorne.

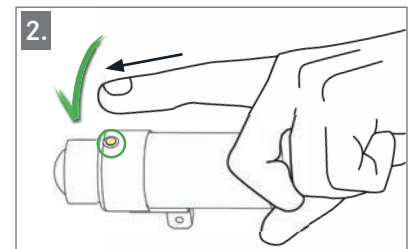

3. Verstellen der Helligkeit (siehe BDA: Kapitel 4.1.1)

Wird das Licht, über den Button, 3x an- und ausgeschaltet, gelangt man in den Modus, in dem die Helligkeit verstellt werden kann. Jedes weitere Berühren verstellt die Helligkeit von der niedrigsten Stufe, über die mittlere Stufe, zur höchsten und von der höchsten, zurück über die mittlere, zur niedrigsten. Wird der Touchbutton drei Sekunden lang nicht mehr betätigt, verlässt man den Einstellungsmodus und die Einstellung wird gespeichert.


4. Verstellen der winkelabhängigen Abschaltautomatik (siehe BDA: Kapitel 4.1.2)

4 mögliche Einstellungen: 3 verschiedene Winkelstufen und Dauerlicht.

a) Licht einschalten und **b)** innerhalb der nächsten 15 Sekunden mit 2 Fingern an den rechten oder linken Bügel klopfen („Doppel-Tap“): Ein erfolgreicher Doppel-Tap wird mit einem kurzen Blinken quittiert.

c) Dann das Licht, über den Button, 3x an- und ausschalten, danach können die 3 Winkel durchgeschaltet werden. 1x Blinken: Winkel **klein**; 2x Blinken: Winkel **mittel**; 3x Blinken: Winkel **groß**. (siehe Abbildung rechts)


4x Blinken (Licht „flackert“) Winkel ist deaktiviert → Dauerlicht.

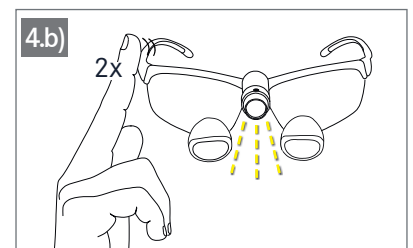

Ist der passende Winkel gefunden, muss 6 Sek. gewartet werden, dann wird diese Einstellung gespeichert. Achten Sie bei der Bedienung der Leuchte darauf, dass die Abschaltautomatik erst nach 0,5 Sek. auslöst.

5. Sonstiges

- Batteriesparmodus: Wird die Brille abgelegt und es wird keine Bewegung mehr registriert, schaltet sich das Licht nach 3 Minuten automatisch ab.
- „Reset“ des Lichts durch das Entfernen des Akkus. (Siehe 1.). Allerdings bleiben die Einstellungen bzgl. Helligkeit und Abschaltautomatik gespeichert.
- Akku ist nach ca. 1 Std. vollständig geladen.

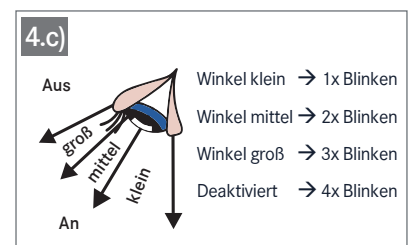

Stand: 05.12.2018

Hinweis: Quickstart ersetzt nicht die Lektüre der Bedienungsanleitung (BDA) der spot-on® cordfree.

00.008.864 - 03 | DE

Tel.: +49 (0) 7351 . 47499 . 0
Fax: +49 (0) 7351 . 47499 . 44

info@orangedental.de
www.orangedental.de

Aspachstraße 11
D- 88400 Biberach

orangedental 
premium innovations