


Webinar #10/2023

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind

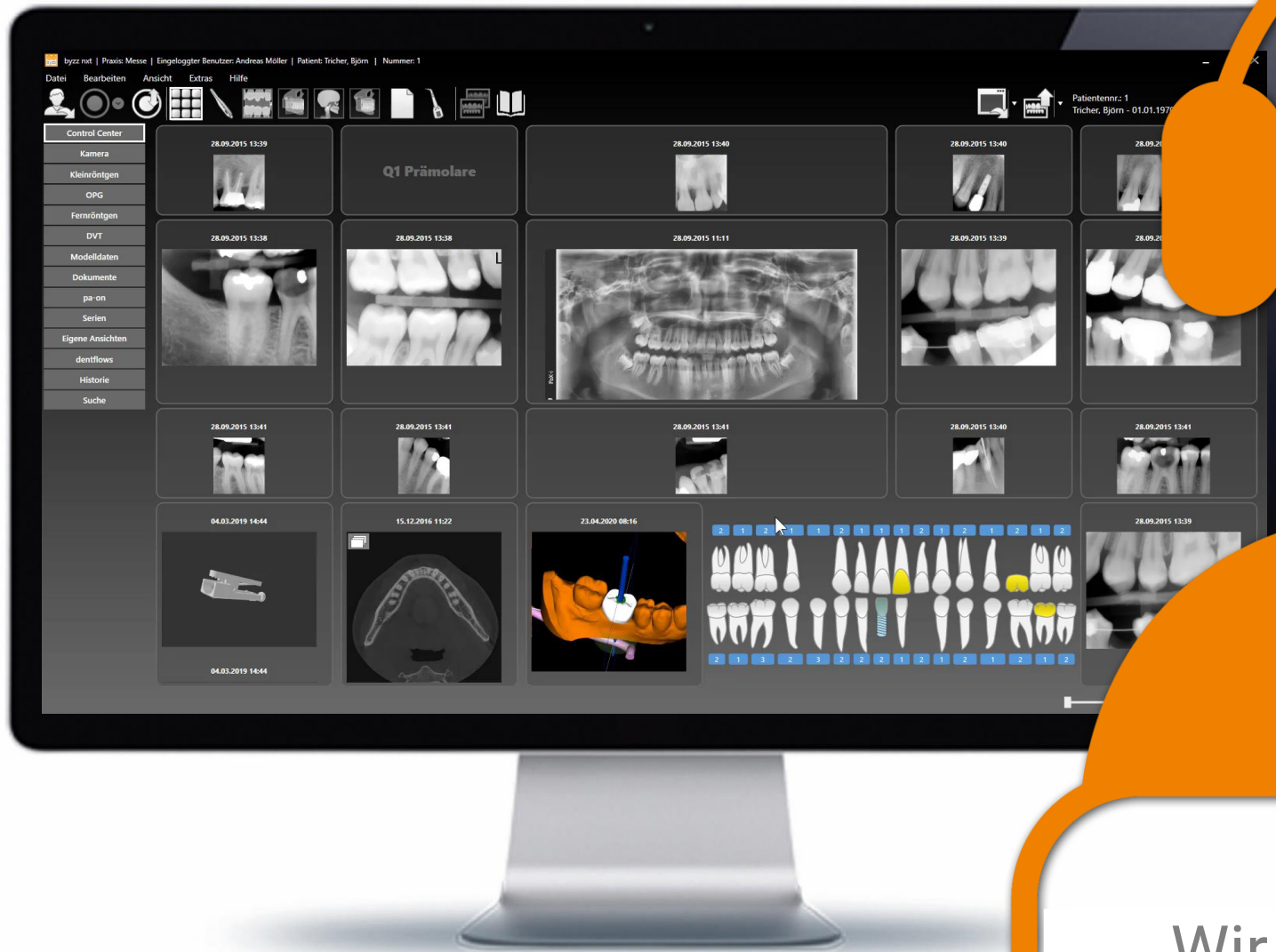

Wir starten um 18:30 Uhr

Willkommen beim od – Webinar Teil #10/2023

Was ich schon immer wissen wollte und was
man gegen Cyberattacken unternehmen kann

Ihre Moderatoren heute Abend

Thomas Klinger




Jan Kliewer




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.

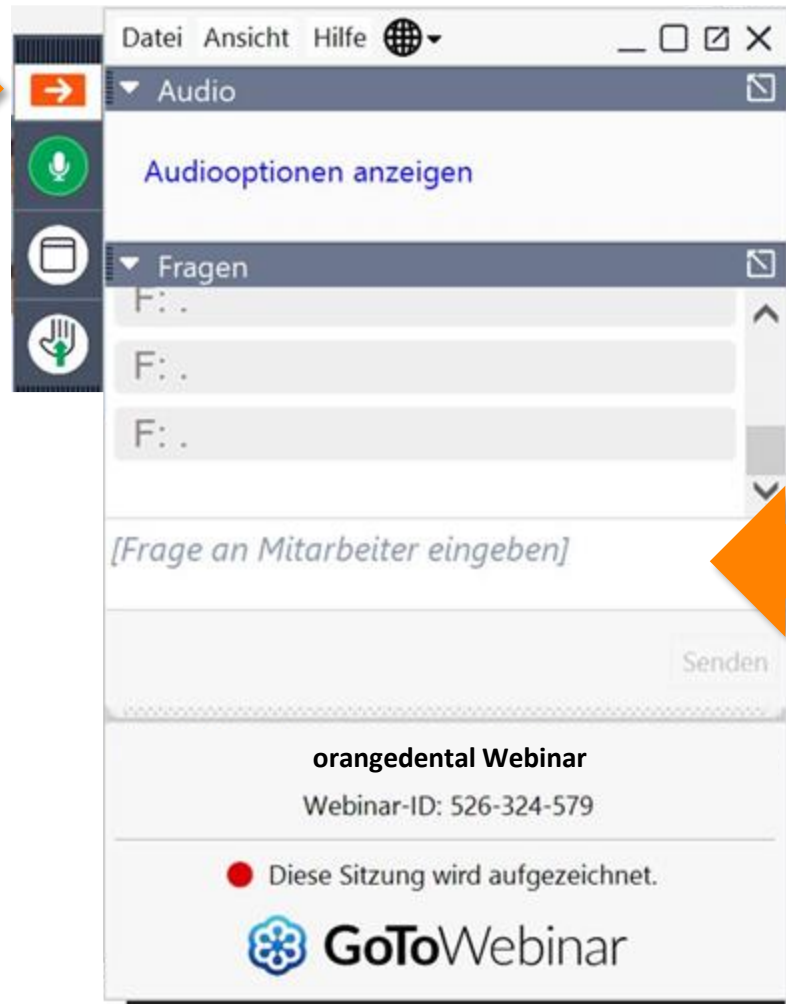

2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster

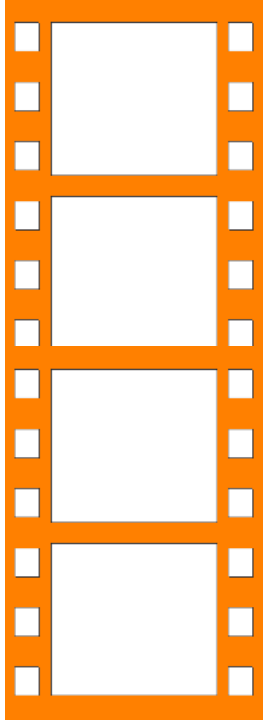

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auf für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.





Ihre Meinungen und Wünsche sind uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.



>> Fragen aus der Hotline – Was ich schon immer wissen wollte und nie zu fragen wagte


>> Wie erreiche ich heutzutage ein Maximum an Sicherheit in meiner Praxis

>> Und nun geht es los ...

>> Umfrage

1 von 2. Haben Sie die technische Hotline von orangedental schon mal kontaktiert?

Multiple-Choice mit einer Antwort

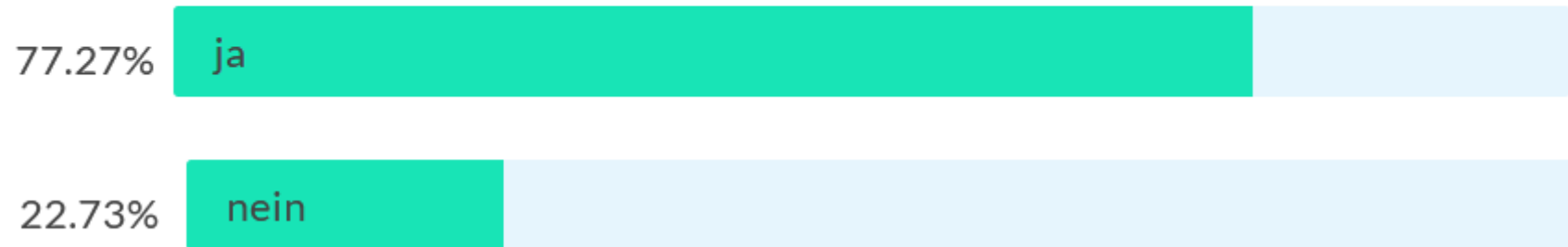

>> FAQ aus der Hotline – was ich schon immer wissen wollte ...

- Welche byzz nxt Version haben Sie im Einsatz ? (Hilfe Info über...)
- Aufnahme wurde beim falschen Patienten erstellt (Aufnahme markieren, Menüleise „Datei“, ausgewählte Aufnahmen verschieben)
- Export der Daten Zahnärztekammer (ByzzNxt Constancy, Export für Prüfung)
- Import / Export von Aufnahmen (Drag and Drop, oder über Rechtsklick für Export / Menüleiste)
- Wo ist das Röntgenkontrollbuch zu finden (Extras, Röntgenkontrollbuch)
- Rechtfertige Indikation einfügen / ändern (Extras, Einstellungen, Metadaten)
- Behandler und Ärzte anlegen. (Extras, Einstellungen, Praxisverwaltung)
- Filter auf Aufnahmen Rückgängig machen (Aufnahme öffnen, über Rückgängig Pfeil)
- Export DVT Daten mit Viewer, EZ3D Plus und EZ3Di
- Warum kann ich die .dcm nicht öffnen bzw. anschauen
- Wo ist der TeamViewer zu finden ? (Hilfe Fernwartung)
- Jahreswechsel DVTpro (s. bereit liegendes Dokument)
- Einstellungen Viren-Scanner (s. bereit liegendes Dokument)

>> Teil 1 - Live ...

>> Umfrage

2 von 2. Haben Sie eine Versichersicherung gegen Cyberattacken?

Multiple-Choice mit einer Antwort

25%

ja

75%

nein

>> Teil 2 - Live ...



Jan Klierer: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 432 079 82
Mail: ijkl@orangedental.de

PLZ: 20-33, 38



Martin Loeffen: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 515 86 23 3
Mail: mlo@orangedental.de

PLZ: 41, 45-49



Uwe Baltes: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 170. 189 40 02
Mail: uba@orangedental.de

PLZ: 34-37, 40, 42, 44, 50-59





Andreas Möller: Verkaufsleitung (BW/CH)
Leiter Softwareentwicklung (BC)

Mobil: +49 (0) 173. 966 84 36
Mail: am@orangedental.de

PLZ: 70-72, 75-79, 88 + Schweiz

Legende:

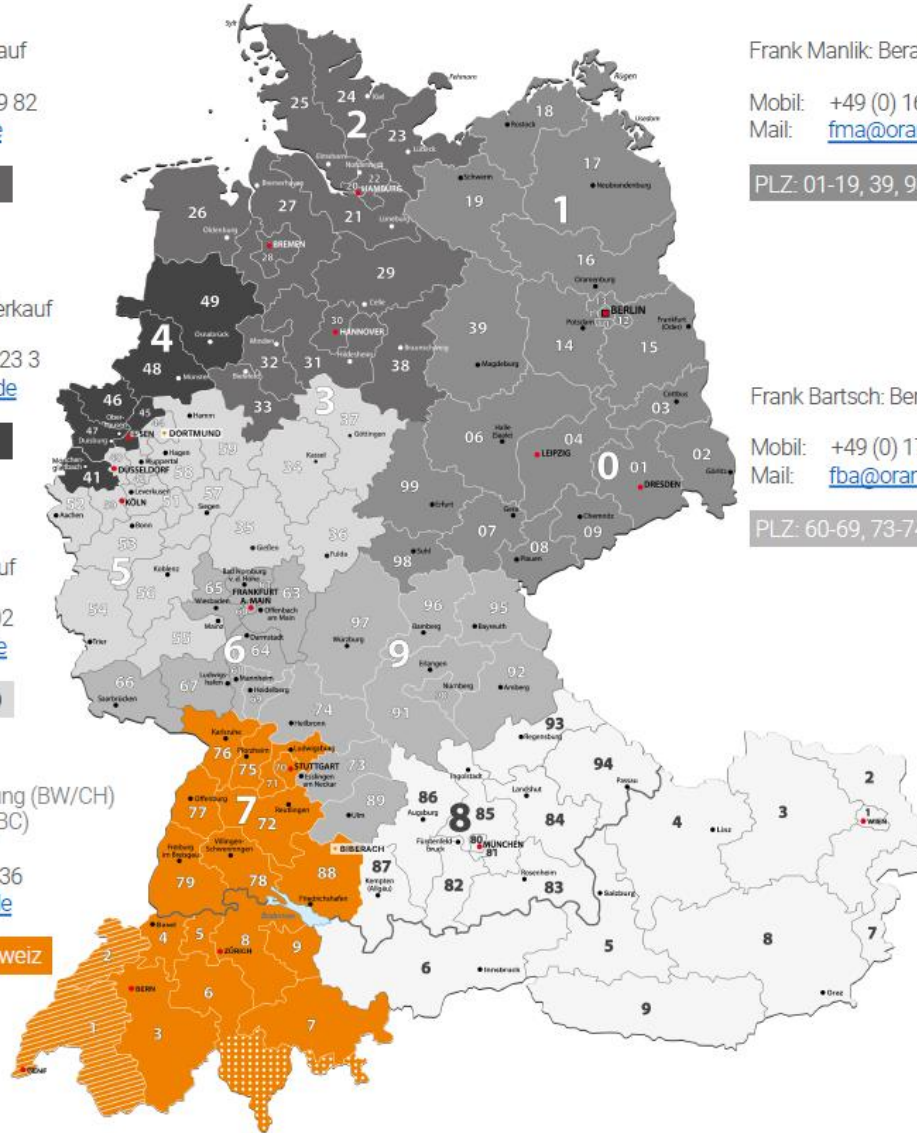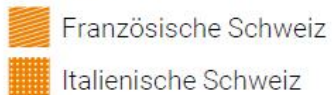

Frank Manlik: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 163. 251 631 0
Mail: fma@orangedental.de

PLZ: 01-19, 39, 98, 99



Frank Bartsch: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 173. 967 55 11
Mail: fba@orangedental.de

PLZ: 60-69, 73-74, 89-92, 95-97



Stefano Soprano: Beratung / Verkauf

Mobil: +43 (0) 676. 510 60 73 (AT)
+49 (0) 160. 944 58 045 (D)
Mail: sso@orangedental.de

PLZ: 80-87, 93-94 + Österreich

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym
abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver als jedes Lob.



Image by rawpixel.com on Freepik

FROHE
WEIHNACHTEN

Wir wünschen Ihnen
eine besinnliche
Adventszeit und ein
friedliches
Weihnachtsfest