

Willkommen beim od – Webinar Teil #2

byzz^{nxt} – Der Daten- & Bilderspezialist für Ihre Praxis

byzz^{nxt} optimal einsetzen & die Effizienz der Praxis erhöhen

Ihre Moderatoren heute Abend


Aline Ziemba




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.

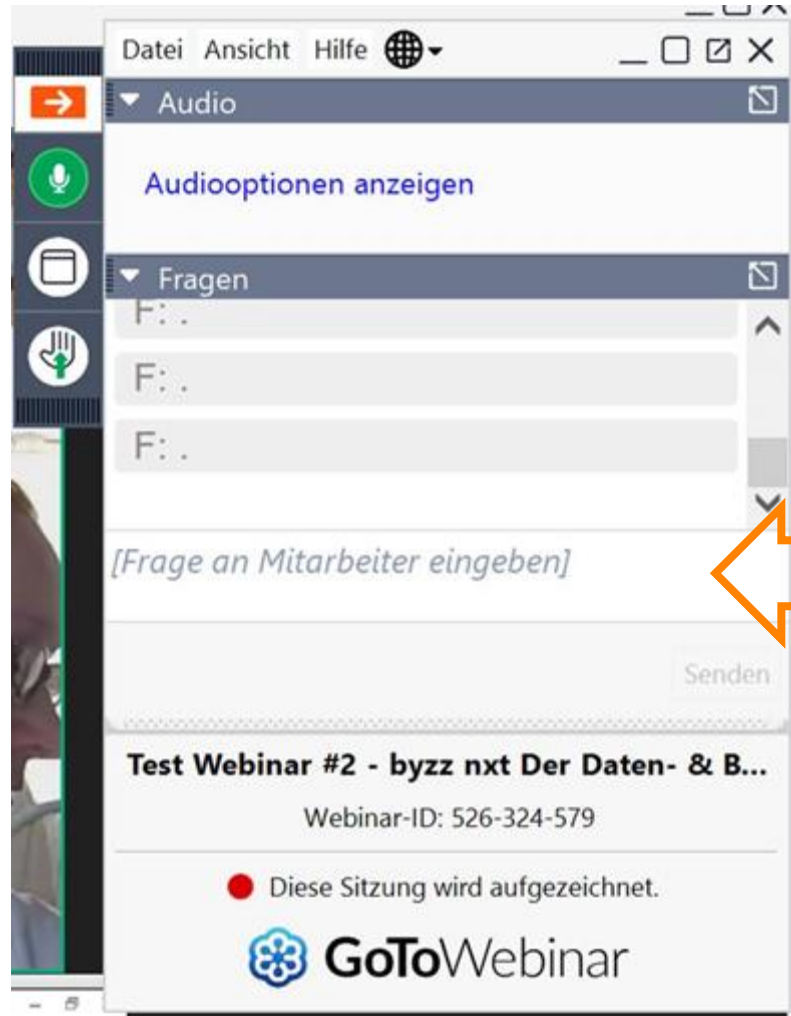

2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster

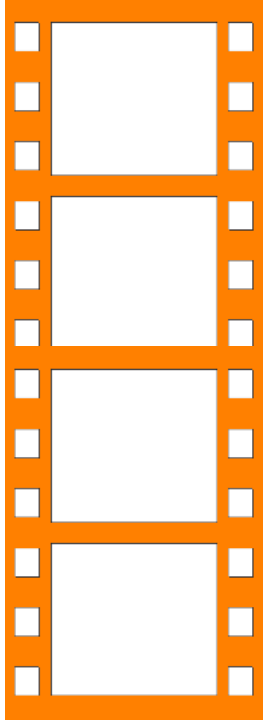

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auch für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.



Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.

>> Ablauf – Bevor wir starten ...

>> Und nun geht es los ...

>> Was kann byzz^{nxt} mehr oder besser als andere Bildverarbeitungs-Prg.?

>> Von Ihrer Abrechnungssoftware zu byzz^{nxt}

>> Übergabe Ihrer 01 an die byzz^{nxt}

- byzz Control Center
- Das Diagnostikfenster und die Bearbeitungswerkzeuge

>> Der Praxisalltag

- Import + Export von Patientendaten – Ihr Datenzentrum
- Patienten-Dokumentation / -Beratungskatalog -
- Röntgenaufnahmen / Röntgenaufträge – richtig dokumentieren

Besondere Features:

- ✓ Terminal-Server fähig
- ✓ Mehrpraxen-Fähig
- ✓ Alle relevanten Patienten-Daten auf einem anpassbaren Bildschirm (byzz ControlCenter)
- ✓ Röntgenaufträge an alle Röntgeneinrichtungen inkl. kompletter Dokumentation möglich (ausführender Arzt / Rechtfertigende Indikation)
- ✓ Röntgenkontrollbuch nach den neusten Anforderungen, d.h. inkl. der rechtfertigenden Indikation
- ✓ VDDS-Media-Import (Bilder) aus anderen Bildverarbeitungsprogrammen (z.B. DBSWin, Soredex, Carestream usw.)
- ✓ Komplette Windows-Integration mit Drag & Drop (Import / Export auch aus Outlook u.ä.)
- ✓ Integration (fast) aller digitalen Informationsquellen in der dentalen Praxis (Sensoren, Scanner, OPGs)

byzz[®]nxt Live - Demo

Ihre Fragen

Senden Sie auch ein Teilnahmezertifikat ?

Wenn Sie ein Zertifikat wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Mail an:
ck@orangedental.de (Claudia König) oder am@orangedental.de (Andreas Möller)

Ist die Benutzung des Kataloges kostenlos?

Sie erhalten den Beratungskatalog mit diesen Daten als kostenlosen Download. Sollten Sie beim Import der Daten eine Lizenzfrage bekommen, kontaktieren Sie bitte die Hotline, damit wir Ihnen dieses Feature kostenfrei freischalten können. Nach dem Import des Bilder können Sie den Katalog nach Ihren Bedürfnissen weiter ausbauen und benutzen.

Sind auch andere Geräte mit byzz^{next} kompatibel?

byzz^{next} kann (fast) alle 2D-Geräte ansteuern – darunter OPGs, Sensoren, Röntgenscanner, intraorale Kameras u.v.m. Im Bereich 3D können wir z.Zt. nur unsere eigenen Geräte ansteuern, jedoch arbeiten wir auch in diesem Bereich an einer Lösung, die wahrscheinlich im nächsten Jahr verfügbar sein wird.

Können externe Formulare, z.B. für die Patientenberatung, Dokumentation u.ä., patientenbezogen integriert werden?

In der nächsten Version, die wir intern schon projiziert haben, können Sie jedes Formular (z.B. PDF, DOCX) integrieren, ausfüllen und danach patientenbezogen abspeichern.

Müssen die Bilder mit einer Messkugel kalibriert werden?

Wenn die Bilder von unseren Geräten kommen, bzw. diese Daten mit Seitenmaßen importiert werden, z.B. Sensoren oder Röntgenscanner, müssen diese nicht mehr kalibriert werden.

Voraussetzungen sind natürlich die Rechtwinkeltechnik bei Kleinröntgen und eine gute Positionierung bei OPGs.

Können Die Daten (aus dem Export-Dialog) auch zu anderen Empfängern versendet werden?

Ja - Die Daten können auch zu festgelegten Partnern (Überweiser, Labor, etc.) gesendet werden.

Diese legen Sie unter Extras -> Einstellungen -> Praxisverwaltung an und sind dann nach der Aktivierung im Export wählbar.

Können auch andere Verschlüsselungsprogramme benutzt werden?

Leider nein, da es hier zu wenig Schnittstellen gibt. Die für den Verschlüsselungsprozess benutzen Schnittstellen werden meist über ein Web-Interface oder einen Browser initiiert. Die dahinter stehenden Prozesse sind, aus Sicherheitsaspekten, nicht ohne weiteres von externen Programmen zu benutzen.

Kann man DVTs auch per Mail versenden?

Bei den normalen Mail-Providern (Telekom, GMX, Web.de, u.v.m) gibt es eine „natürliche“ Grenze der Mailanhänge (OPGs, Bilder) von 10-15 MB. Wird diese Grenze überschritten, werden die Mails vom Empfänger meist sofort gelöscht und Sie erhalten eine dementsprechende Nachricht. Aus diesem Grund haben wir TransCrypt implementiert – hier können Daten bis 4 GB, also auch DVTs versendet werden.

Ist es mittlerweile möglich die Kamerafotos in gewünschte Vorlagen zu sortieren und dann auszudrucken?

Der erste Schritt ist schon möglich über den Reiter „Eigene Ansichten“ – der zweite Schritt steht bei unserer Wunschliste ziemlich weit oben und kommt evtl. in die übernächste Version mit rein.

Wir danken für Ihre vielen Fragen und die aktive Mitwirkung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen den SW-Wartungsvertrag für byzz^{next} für 590 € / Jahr an – darin sind inkludiert:

>> kostenfreie 365 Tage Hotline

Montag bis Donnerstag:	8:00 bis 18:00 Uhr
Freitags:	8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag / Sonntag	10:00 bis 16:00 Uhr

>> alle zukünftigen byzz next Updates

>> Kostenfreie Unterstützung telefonisch und per Fernwartung bei der Installation und Fehlersuche an Produkten von orangedental

>> Ihre Ansprechpartner



Martin Loeffen
Beratung & Verkauf

fon.

+49 151 515 86 23 3

email.

mlo@orangedental.de

PLZ

20-29, 30-34, 37, 38,
48-49



Rainer vom Stein
Beratung & Verkauf

fon.

+49 170 189 40 02

email.

rvs@orangedental.de

PLZ

35, 36, 40-47, 50-59,
60-63, 65, 97



Andreas Möller
Verkaufsleitung BW &
CH

fon.


+49 173 966 84 36

email.

am@orangedental.de

PLZ

64, 66-79, 88-89 &
Schweiz

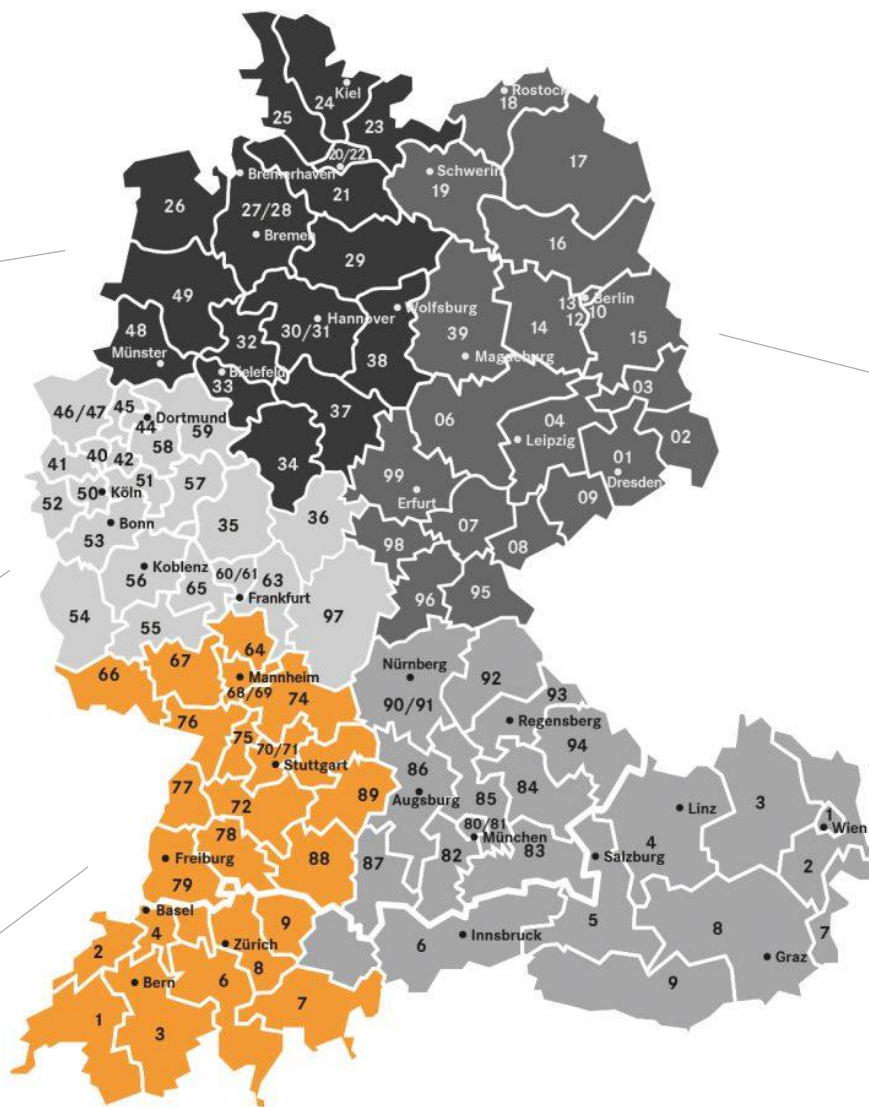

Aline Ziemba
Beratung & Verkauf

fon.

+49 163 251 63 10

email.

azi@orangedental.de

PLZ

01-19, 39, 95, 96, 98, 99



Stefano Soprano
Beratung & Verkauf

fon.

+43 676 510 60 73 [A]

email.

sso@orangedental.de

PLZ

80-87, 90-94 &
Österreich



Webinar 3

byzz^{nxt} & Ez3D-i
Einführung in den 2D/3D Workflow
DVT-Diagnostik, Implantat-Planung und
Matchen mit Abdruckdaten

Datum: **Dienstag, 07.07.2020**

Uhrzeit: **18:30 – 19:30 Uhr**

Ihr Anmelde-Link für Webinar #3: <https://attendee.gotowebinar.com/register/8073066677744517902>

Die weiteren Webinare finden Sie auf unserer Homepage, auf Facebook oder Instagram.

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Wohltuende Kritik ist konstruktiver
als jedes Lob.

od-Webinar



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend
und bleiben Sie und Ihr Team weiterhin gesund.

Ihr **orangedental** Team

Sie finden unsere News auch über:

