


Webinar #21.1 – byzz^{nxt} Workshop (Teil 2)

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind

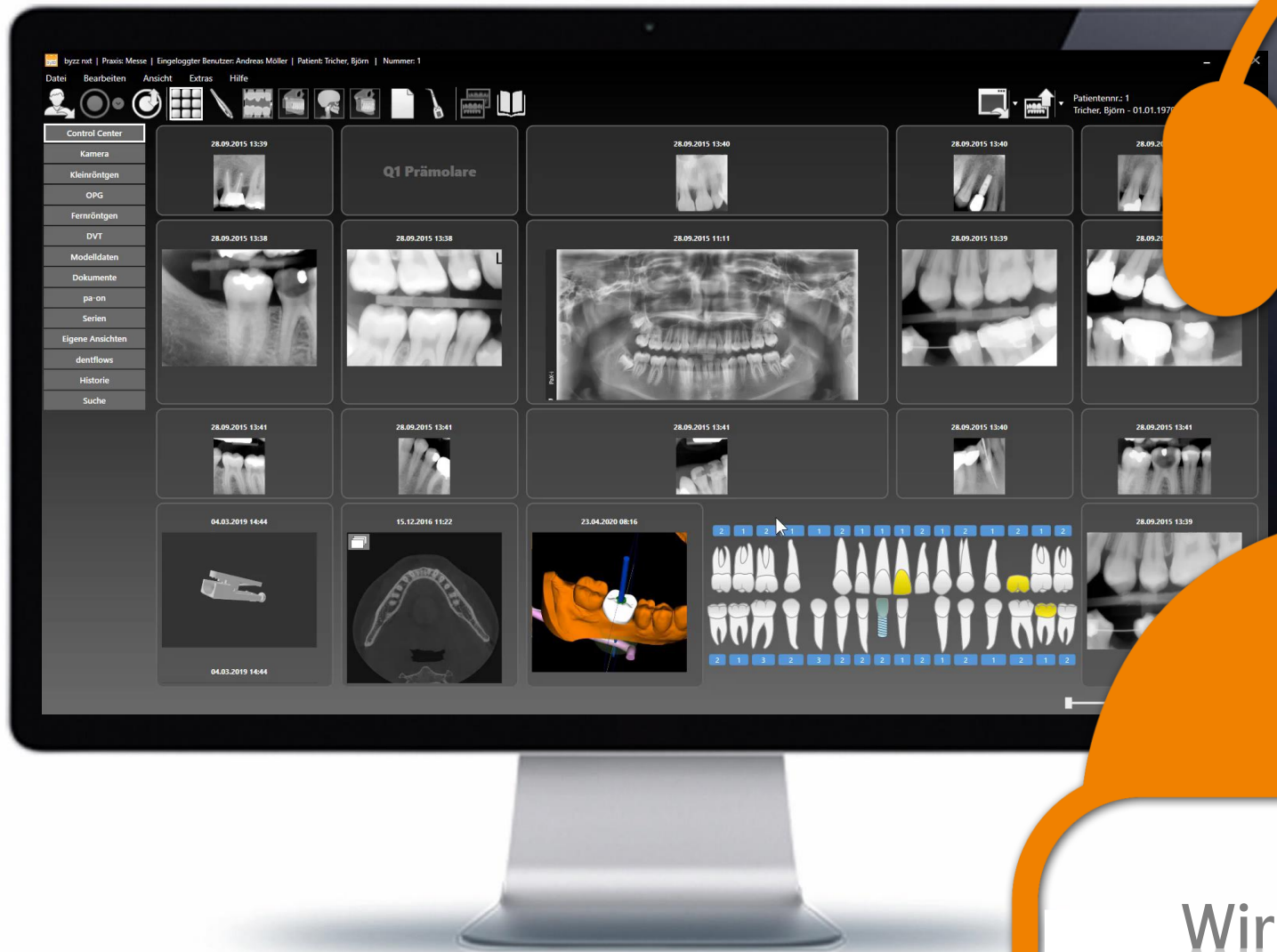

Wir starten um 18:30 Uhr

Willkommen beim od – Webinar Teil #2 1.1

byzz^{nxt} – Workshop (Teil 2)

byzz^{nxt} optimal einsetzen & die Effizienz der Praxis erhöhen

Ihre Moderatoren heute Abend


Aline Ziemba




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.

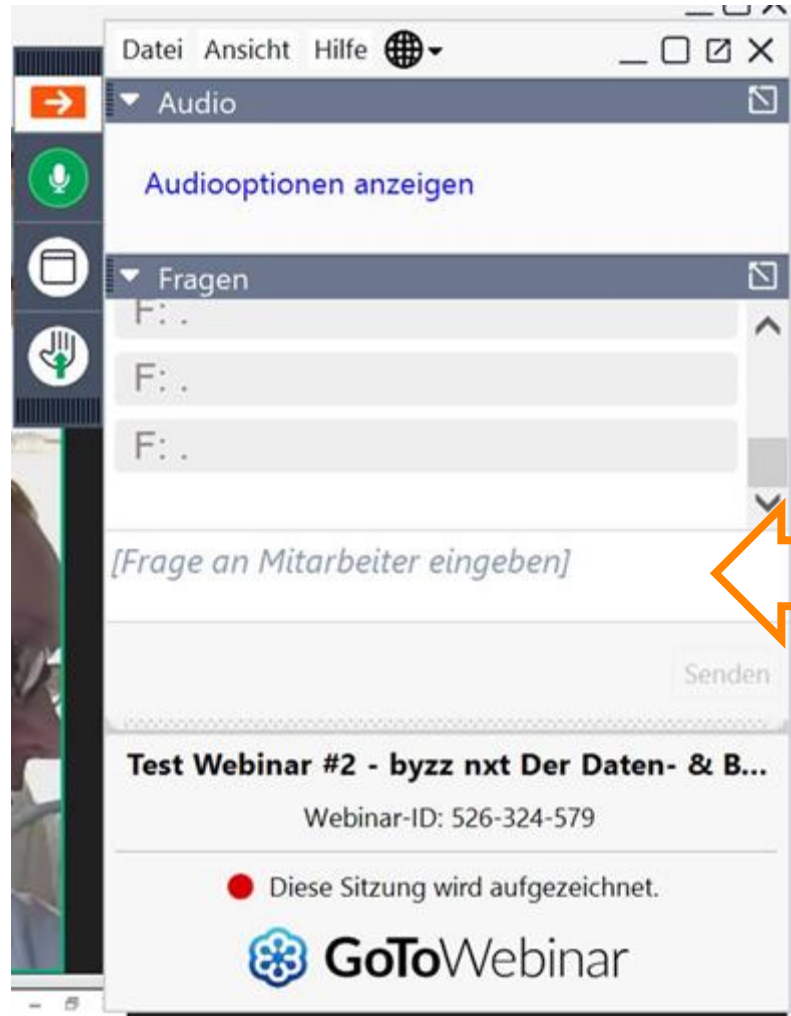

2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster

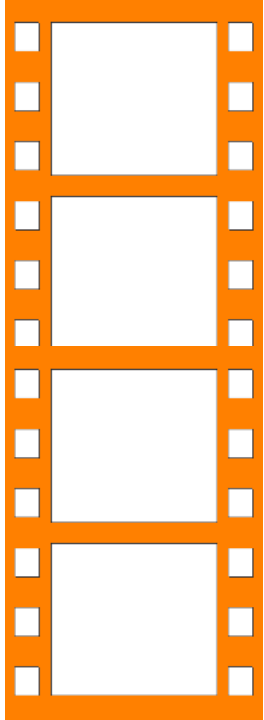

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auch für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.




Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.

- >> Integration von externen Geräten (Scanner, Kameras, Dental eyePad)
 - Anschlussmöglichkeiten
 - Integration des Beratungskatalog in die Patienten-Beratung
- >> Bearbeitungstools im Befundungsfenster
- >> Export und Verschlüsseln von Daten (Brennen, Senden, Drucken)

>> Integration von externen Geräten

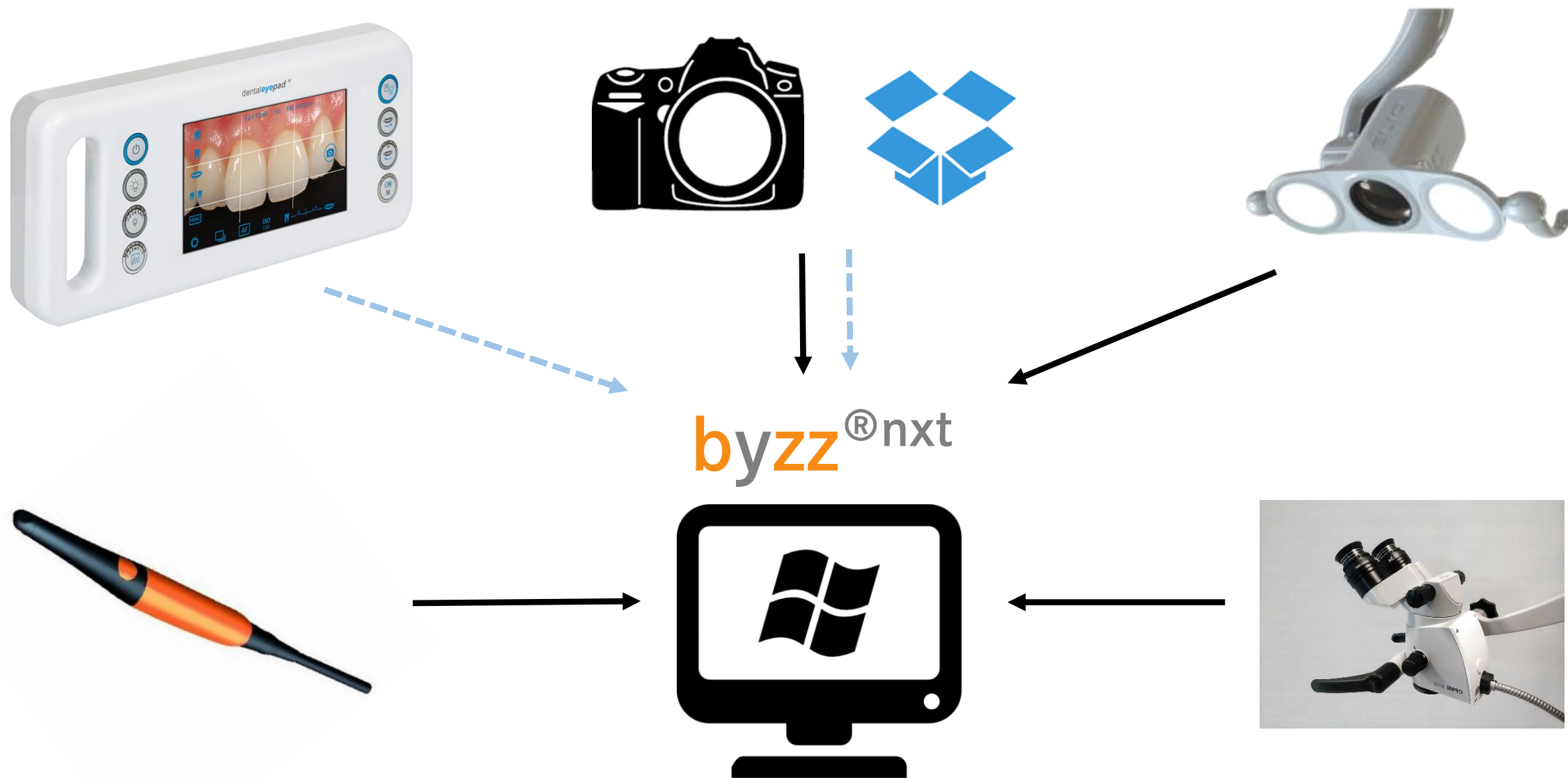




Patientenbezogene Ablage






Patientenbezogene Ablage

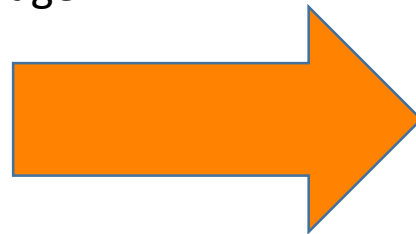

Beratungskatalog



byzz[®]nxt

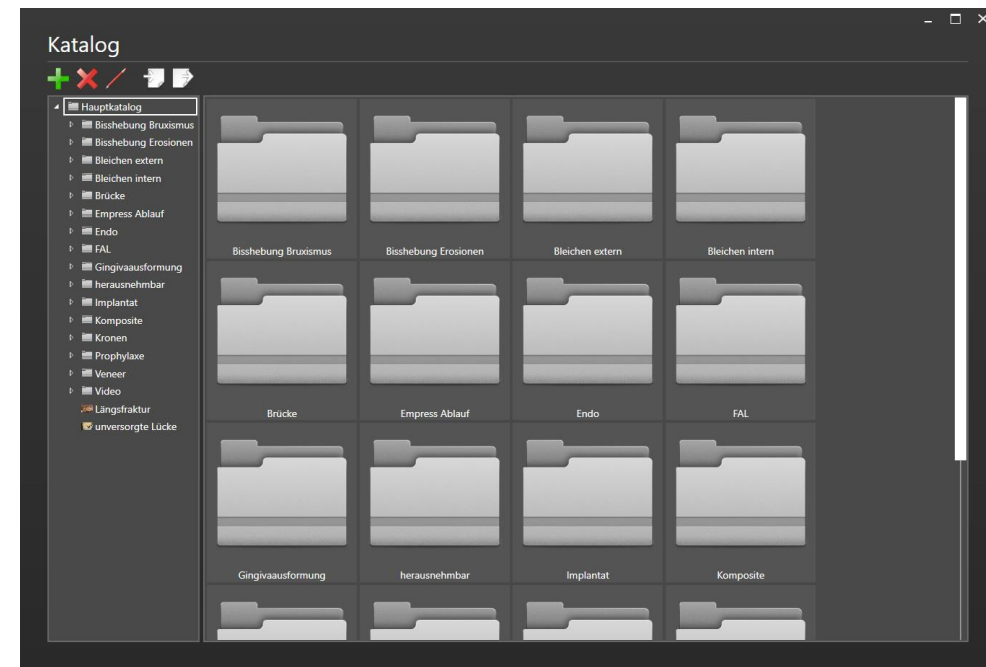

byzz[®]nxt

Ihre Fragen

Was kostet das Kamera-Modul?

Das Kamera Modul integriert alle optischen Quellen in die byzz Software – egal ob die Bilder von der digitalen Kamera, intraoralen Kamera, einem Mikroskop, SD-Karte oder dem DentalEyePad kommen. Das Modul byzz Vision kostet einmalig 1.190,- €, egal wieviel Kameras Sie anschließen möchten.

Kann die Linienstärke vordefiniert werden?

Nein noch nicht – wir haben diese Idee schon in den Kundenwünschen aufgenommen und wird voraussichtlich in der nächsten Version realisiert.

Muss das Bild kalibriert sein, um Implantate / Messung vorzunehmen?

Ja, das ist bei den Praxisaufnahmen jedoch meist die Regel – die Absolute Größe der Röntgenaufnahme (OPG, FRS, Kleinröntgen) muss eingetragen sein, um sinnvolle Messungen vornehmen zu können.

Alternativ kann eine Referenzmessung im Bild vorgenommen werden – z.B. mit einer Kugel oder einer Messspitze.

Patienteneinstellung und Messung im OPG.

Um eine aussagekräftige Messung im OPG vornehmen zu können, muss der Patient gut positioniert sein. Sollte der Patient nicht ordnungsgemäß in der mittleren Sagittalen stehen und eine Rotation des Kopfes vorliegen, so ist die eine Kopfseite näher am Sensor als die andere und somit ist die Messung fehlerhaft.

Welches Format hat die Zwischenablage?

Die Zwischenablage von Windows hat kein bestimmtest Format – es ergibt sich immer aus dem Quellformat. Wenn Sie eine Datei in die Zwischenablage schieben, ändert sich am Format nichts. Wenn Sie ein ScreenShot von einem Fenster aufnehmen um es in ein Anderes einzufügen, wird i.d.R. ein JPG übertragen. Bei verschiedenen Formaten müssen evtl. Zusatzprogramme installiert werden. Früher (unter Windows XP / 7) war das ein Adobe-Reader für PDF – heute ein Viewer z.B. für Dicom-Daten (DCM).

Was kostet ein Wartungsvertrag?

Der SW-Wartungsvertrag kostet 590,- € / Jahr und beinhaltet die SW-Pflege und die kostenfreie Benutzung der Hotline, die 365 Tage für Sie erreichbar ist. Ein Formular für den Wartungsvertrag finden Sie im Download-Link wo Sie auch die Aufzeichnung des Webinars finden:

<https://data.orangedental.de/d/4e41412497894b22999e/>

Was kostet ein Update der 41 Schichten OPG für mein PaX-i 3D green nxt?

I.d.R. liegt die Aufrüstung dieses neuen Modus bei 1.900,- € (ca. 2 Tage Arbeit) – Das Gerät (Firmware-Update), die Aufnahme-Software und die Rekonstruktions-Algorithmen werden auf den neusten Stand gehoben. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Dentalfachhändler ein individuelles Angebot erstellen.

Wie komme ich an die Aufzeichnung des Webinars und auch der vorherigen?

[Webinar #2 – byzz^{nxt}](#)

[Webinar #3 – byzz^{nxt} & Ez3D-i](#)

[Webinar #4: Diagnostik und Planung aus der Praxis für die Praxis](#)

[Webinar #5: ibyzz \(Update\) & byzz^{nxt} Workshop](#)

[Webinar #6.1 - 3D-Diagnostik in der zahnärztlichen Chirurgie / Bohrschablone: schnell & sicher](#)

[Webinar #6.2 - Implantat-Auswahl, Positionierung und Planung](#)

[Webinar #6.3 - Implantat-Auswahl, Positionierung und Planung](#)

[Webinar #21.1 – byzz nxt Workshop Teil 2](#)

>> Ihre Ansprechpartner im Außendienst



Martin Loeffen
Beratung & Verkauf

fon. +49 (0) 151 . 515 86 23 3
email. mlo@orangedental.de

PLZ
20-29, 30-34, 37, 38, 48-49



Rainer vom Stein
Beratung / Verkauf

fon. +49 (0) 170 . 189 40 02
email. rvs@orangedental.de


PLZ
35, 36, 40-47, 50-59, 60-63



Andreas Möller
Verkaufsleitung [BW/CH] /
Leiter Softwareentwicklung (BC)

fon. +49 (0) 173 . 966 84 36
email. am@orangedental.de

PLZ
64, 66-79, 88-89, Schweiz

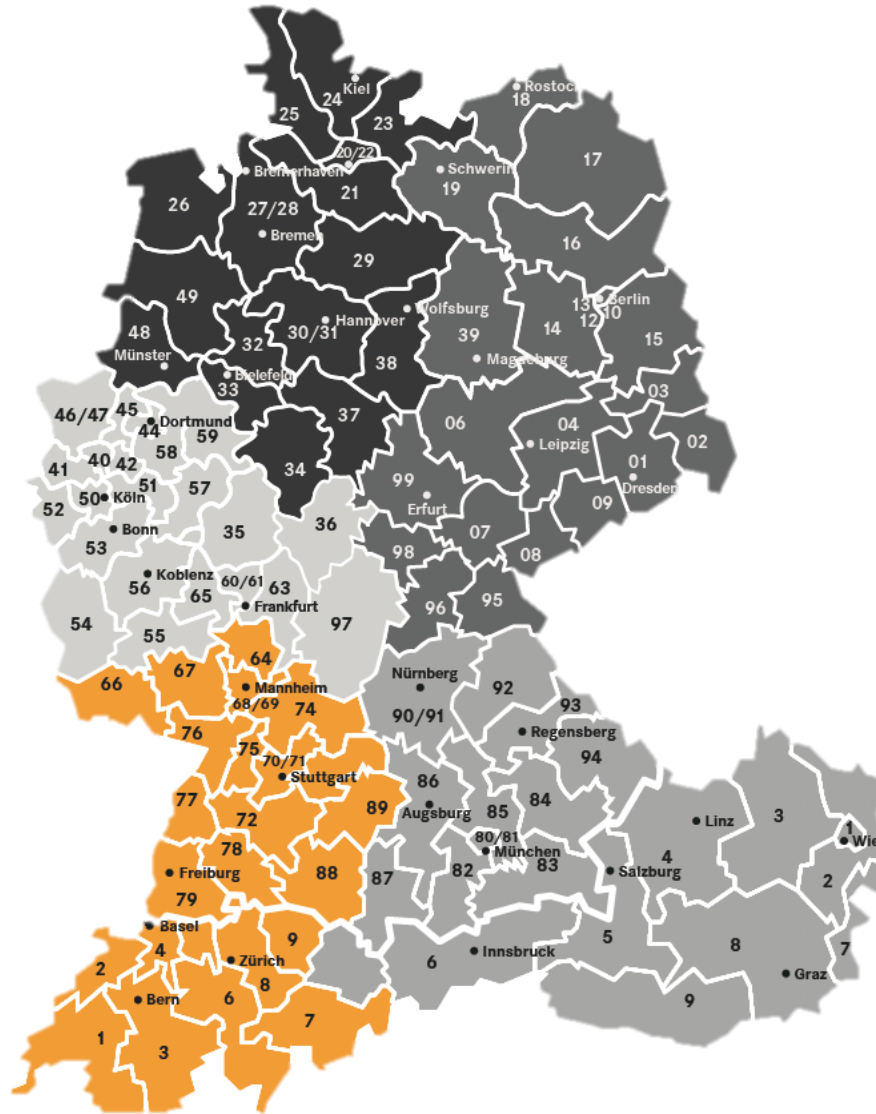

Aline Ziemba
Beratung / Verkauf

fon. +49 (0) 163 . 251 63 10
email. azi@orangedental.de

PLZ
01-19, 39, 95, 96, 98, 99



Stefano Soprano
Beratung / Verkauf

fon. +43 (0) 676 . 510 60 73 [A]
email. sso@orangedental.de

PLZ
80-87, 90-94
Österreich

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver
als jedes Lob.

od-Webinar



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend
und bleiben Sie und Ihr Team weiterhin gesund.

Ihr orangedental Team

Sie finden unsere News auch über:



Webinar

orangedental
premium innovations

DDI inside

