


Webinar Teil #3

Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind

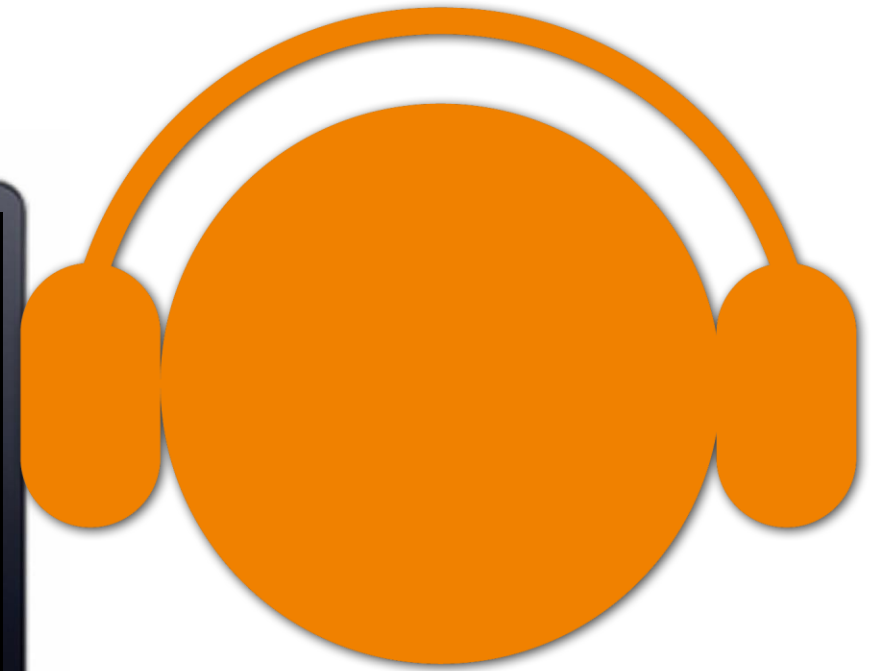

Wir starten um 18:30 Uhr

Willkommen beim Webinar Teil #3

byzz nxt & Ez3D-i - Einführung in den 2D / 3D Workflow

DVT-Diagnostik, Implantat-Planung und Matchen mit Abdruckdaten

Ihre Moderatoren heute Abend

Martin Loeffen



Aline Ziemba



Andreas Möller







Mit dem orangen Pfeil vergrößern Sie das Dialogfeld



>> Ablauf – Bevor wir starten ...

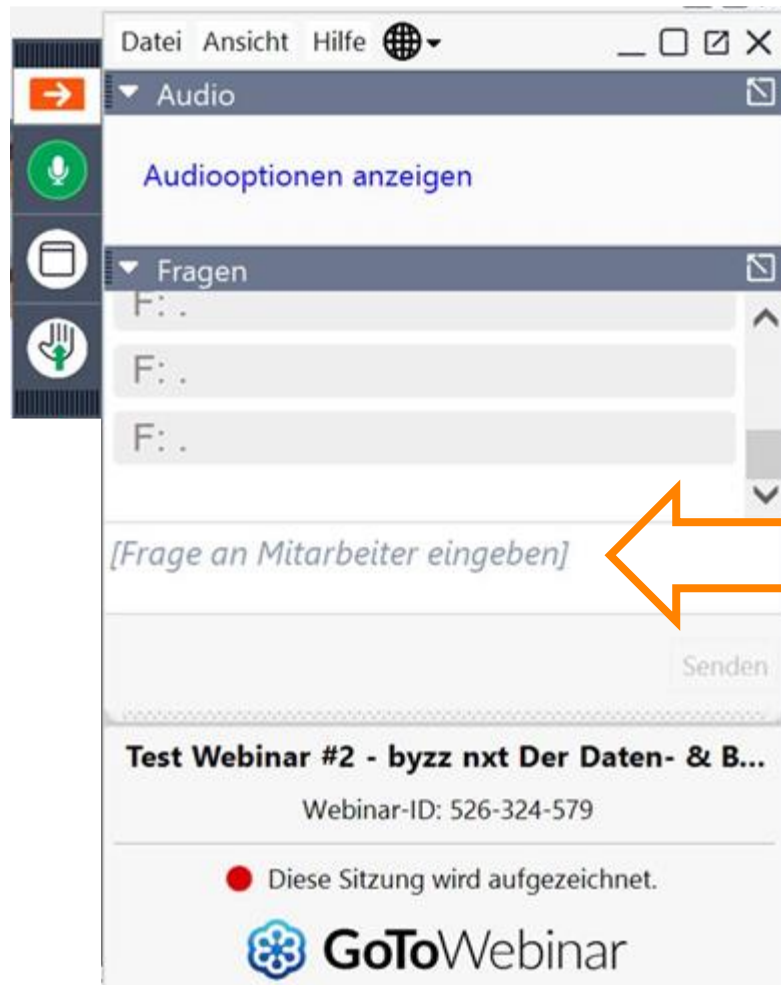

Stellen Sie uns die Ihre Fragen
im Fragen-Fenster

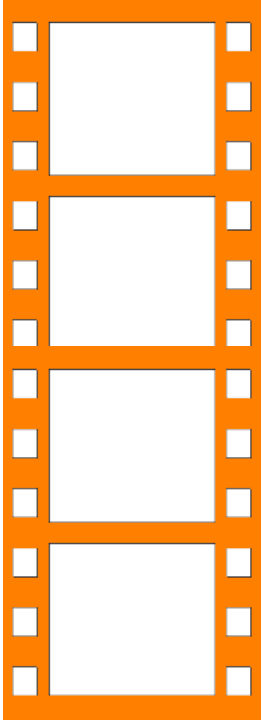

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auch für Ihre internen Praxis-Schulungen nutzen.



Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.

Vielen Dank!

>> Ablauf – Bevor wir starten ...

>> Und nun geht es los ...

>> Welche Datenformate können wir in byzz^{nxt} importieren?

>> Welche 3D-Programme sind mit byzz^{nxt} kompatibel?

>> Live Demo – byzz^{nxt} / Ez3D-i

>> Welche Datenformate können wir in byzz^{next} importieren?

- >> Alle gängigen 2D-Grafikformate (JPG, TIF, PNG, BMP) – digitale Kamera, Mikroskop, u.ä.
- >> Alle gängigen 2D- / 3D-Röntgendaten im Dicom-Standard (Kleinröntgen, OPG, DVT)
- >> 3D-Raumdaten von Intraoralscannern / Modelscannern (STL, PLY)
- >> Alle übrigen Datenformate können unter „Dokumente“ patientenbezogen abgelegt werden

>> Welche 3D-Programme sind mit byzz^{nxt} kompatibel?

>> die mitgelieferte Software von orangedental

>> CoDiagnostiX / Voxim

>> Simplant

>> SiCat

>> Smop


>> Blue Sky Plan

>> OnDemand 3D

byzz[®]nxt Live - Demo


1 von 2. Welche 3D-Software benutzen Sie zur Planung?

Multiple-Choice mit mehreren Antworten

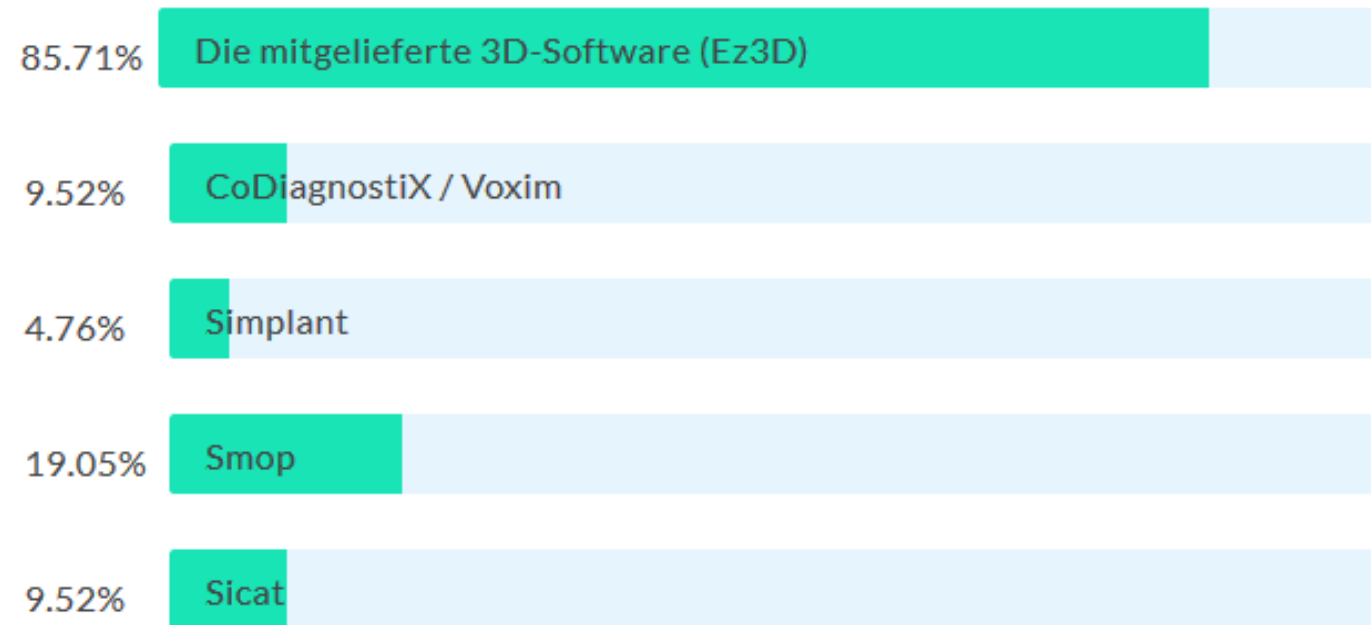

2 von 2. Arbeiten Sie schon mit digitalen 3D-Abdrücken / Intraoralscanner (Cerec, Trios, 3Shape, Green nxt, EzScan, Modelscanner)?

Multiple-Choice mit einer Antwort

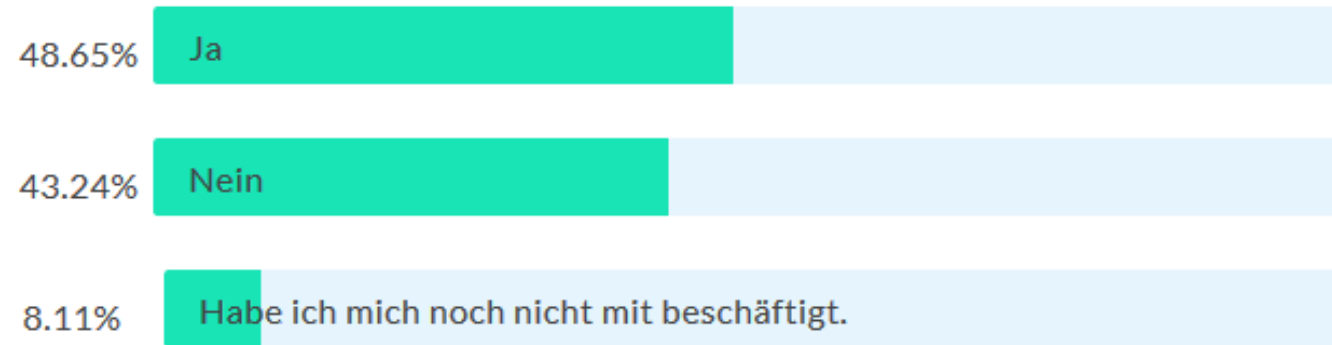

Ihre Fragen

Was kostet Ez3D-i ? Was kostet die SW zur Erstellung der Bohrschablonen?

Ez3D-i	5 Lizenzen	zub3D0493030	Euro	3.900,-	Euro	2.900,-
	10 Lizenzen	zub3D0493033	Euro	7.000,-	Euro	5.500,-

byzz[®]nxt 3D Free CAD: Dentale Freiform Modellierungs-Software

- >> Direkter STL Import
- >> Voxel Bearbeitung
- >> Objekt Erstellung/ Bearbeitung
- >> Oberflächen Bearbeitung
- >> Boolesche Operationen
- >> CT Scan Bereinigung
- >> Surgical Guide Designer
- >> Freier STL Export , z.B. direkt für 3D Drucker

Produkt	Kurzbeschreibung	Artikel-Nr.	Listenpreis	Aktionspreis
byzz nxt 3D FreeCAD	Dentale Freiform Modellierung-Software [Einzelplatzlizenz]	byz3D0493000	Euro 4.900,-	Euro 3.900,-

>> Bleiben Sie „up to date“

Wir bieten Ihnen den SW-Wartungsvertrag für byzz^{next} für 590 € / Jahr an – darin sind inkludiert:

>> kostenfreie 365-Tage-Hotline

Montag bis Donnerstag:	8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:	8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag / Sonntag:	10:00 bis 16:00 Uhr

>> alle zukünftigen byzz^{next} Updates

>> Kostenfreie Unterstützung telefonisch und per Fernwartung bei der Installation und Fehlersuche an Produkten von orangedental

>> Ihre Ansprechpartner im Außendienst



Martin Loeffen
Beratung & Verkauf

fon. +49 (0) 151 . 515 86 23 3
email. mlo@orangedental.de

PLZ
20-29, 30-34, 37, 38, 48-49



Rainer vom Stein
Beratung / Verkauf

fon. +49 (0) 170 . 189 40 02
email. rvs@orangedental.de


PLZ
35, 36, 40-47, 50-59, 60-63



Andreas Möller
Verkaufsleitung [BW/CH] /
Leiter Softwareentwicklung (BC)

fon. +49 (0) 173 . 966 84 36
email. am@orangedental.de

PLZ
64, 66-79, 88-89, Schweiz

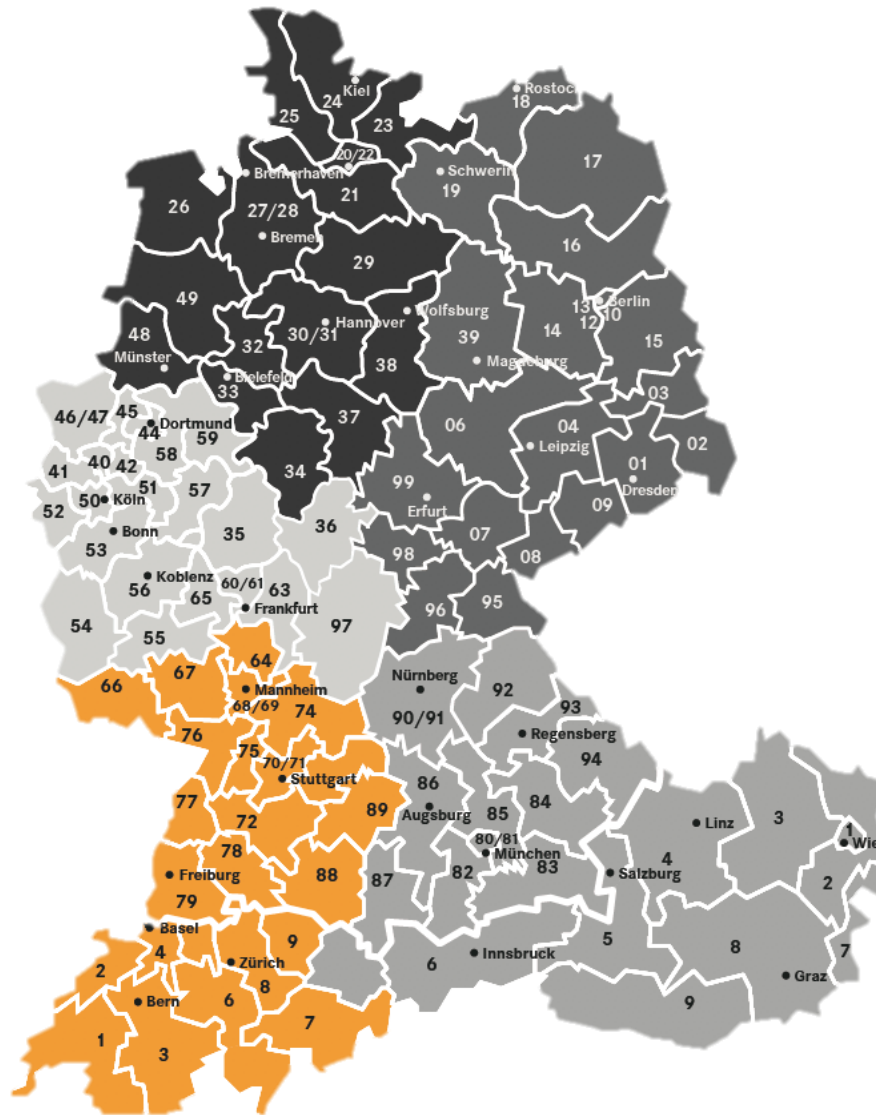

Aline Ziemba
Beratung / Verkauf

fon. +49 (0) 163 . 251 63 10
email. azi@orangedental.de

PLZ
01-19, 39, 95, 96, 98, 99



Stefano Soprano
Beratung / Verkauf

fon. +43 (0) 676 . 510 60 73 [A]
email. sso@orangedental.de

PLZ
80-87, 90-94
Österreich

Webinar #4 – 1.9.2020 – 18:30 Uhr

Diagnostik und Planung aus der Praxis für die Praxis

Referent:

Prof. Dr. Michael Naumann
Charité Berlin
Praxis Stahnsdorf



Ihr Anmelde-Link für Webinar #4: <https://attendee.gotowebinar.com/register/6833350825339092752>

Die weiteren Webinare finden Sie auf unserer Homepage, auf Facebook oder Instagram.

Lernvideos Ez3D-i

Download-Link:

<https://data.orangedental.de/f/b1155cd97eb34d43bda9/?dl=1>


Die Unterlagen inkl. Video können Sie unter folgenden Link herunter laden:

<https://data.orangedental.de/d/9d809c08cdeb49f9a2ce/>

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Wohltuende Kritik ist konstruktiver
als jedes Lob.

Webinar

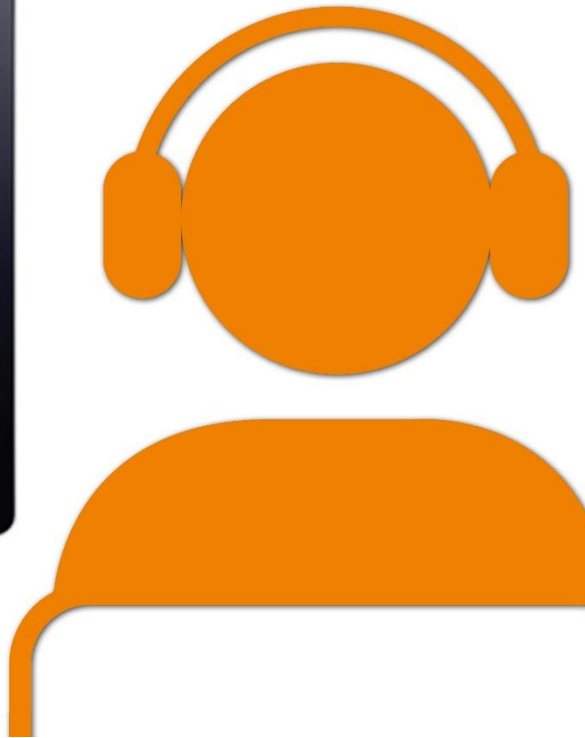

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie und Ihr Team weiterhin gesund.

Ihr orangedental Team

Sie finden unsere News auch über:

