


Webinar #8/2025

Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind

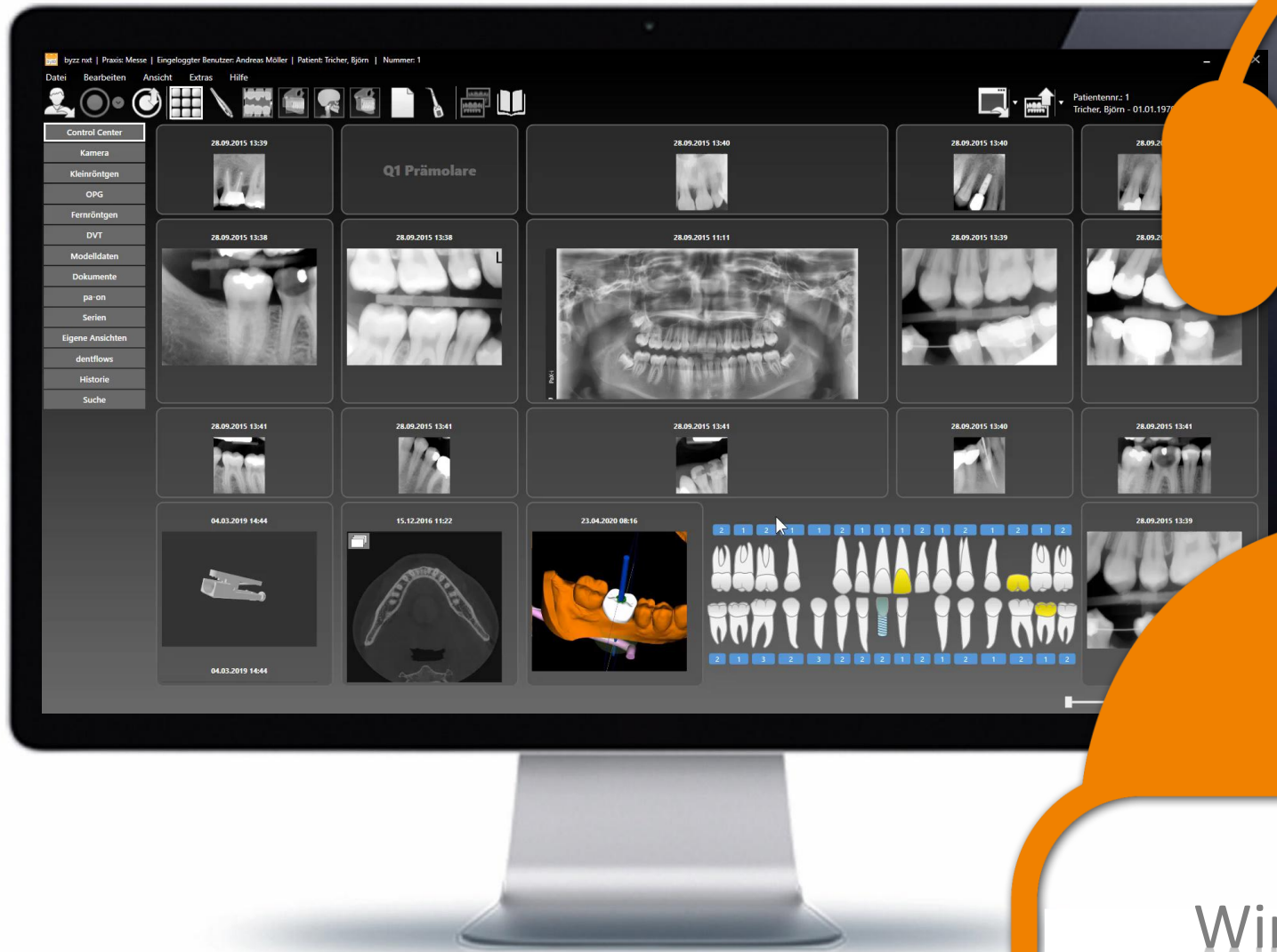

Wir starten um 18:30 Uhr

byzz^{nxt} Workshop

Ein bisschen mehr als nur byzz

Willkommen beim o|cademy – Webinar Teil #8/2025

Ihre Moderatoren heute Abend




Guido Gäßler




Andreas Möller



1. Bitte klicken Sie für Ihre Frage hier.

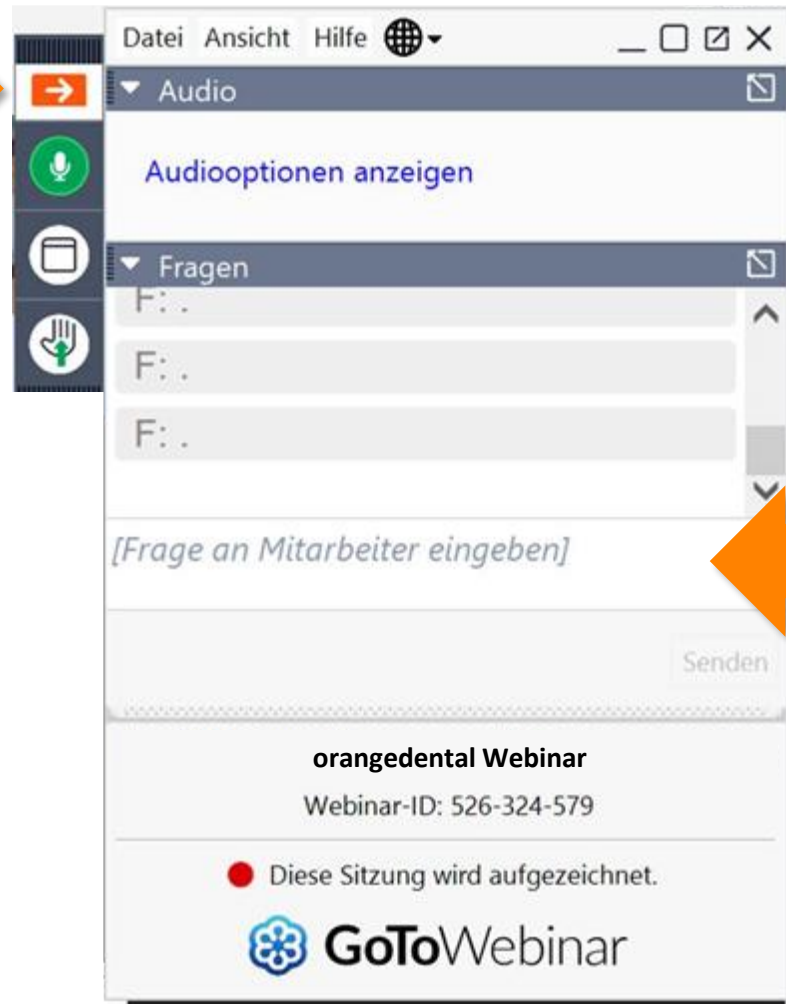

2. Stellen Sie uns die Ihre Fragen im Fragen-Fenster

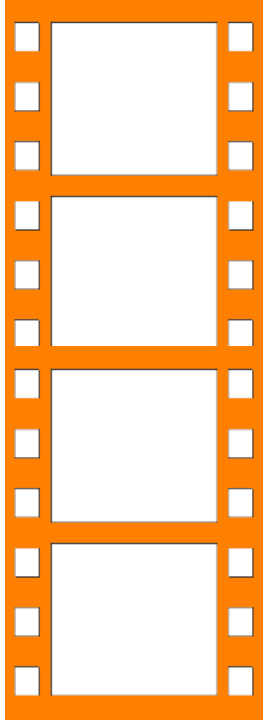

Sie erhalten das komplette, heutige Webinar als Video-Aufzeichnung zum späteren Anschauen.

Natürlich können Sie dieses Video auf für Ihre internen Praxis-Schulungen benutzen.





Ihre Meinungen und Wünsche sind uns sehr wichtig.

Bitte nehmen Sie an der Umfrage nach dem Webinar teil.



>> Und nun geht es los ...

>> Integration von extra- / intraoraler Kameras, DentalEyePad & Mikroskop

- Unterstützte Formate (Bilder, Videos)
- Intraorale / digitale Bilder aufnehmen und importieren (manuell / automatisch)
- Patientenbilder aufnehmen, in den Bilderkatalog übernehmen - Patienten beraten
- Dokumentationsmöglichkeiten (Metadaten benutzen / ändern)

>> neue Ansichten und Technologien

- Neue Ansicht (Kachel & Listen-Ansicht)
- Smart-Focus (Green X evo)

>> Neue Möglichkeiten durch Modeldaten

- Unterstützte Formate (STL / PLY / OBJ)
- Neue Möglichkeiten für die Patienten-Kommunikation & -Dokumentation
- Externe Scanner aktivieren – Daten erfassen und automatisch speichern

>> Offene Schnittstellen für den dentalen Workflow


- Dokumente einscannen & archivieren
- Drag & Drop benutzen

>> neue Wege in der PA-Therapie

- pa-on / Staging & Grading

Frage 1:

Welche Module von byzz benutzen Sie zurzeit?

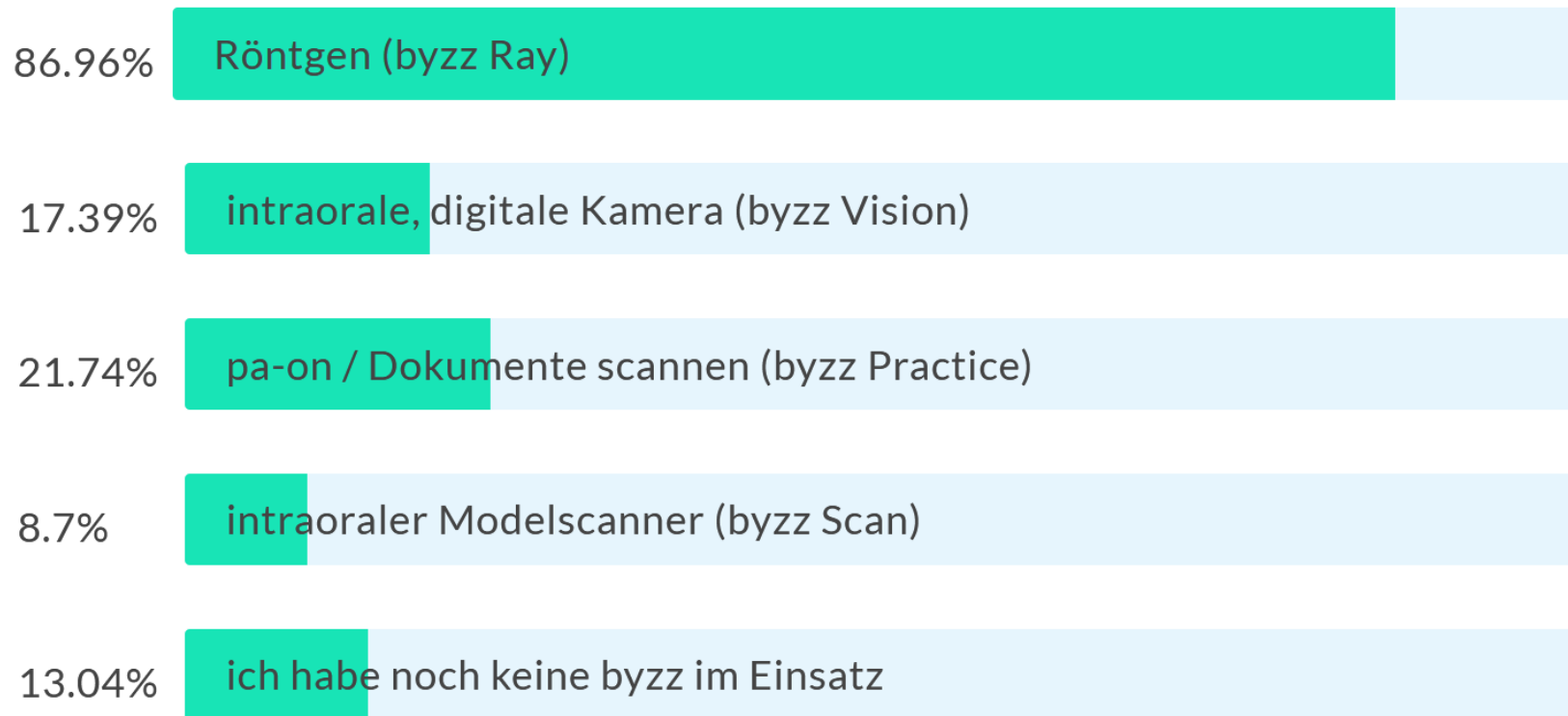


>> byzz Nxt Schnittstellen – seit über 20 Jahren



>> Offener Workflow in fast alle Richtungen

byzz Nxt Schnittstellen – Import

- OPG- / Ceph-Geräte
- Röntgen-Sensoren / -Folien
- 3D-Geräte von orangedental / vatech
- Alle DICOM-Daten (MultiFile, MultiSlice, DicomDir)
- Digitale Abdruckdaten (STL, PLY, OBJ)
- Intraorale Kameras
- Fotos (digitale Kamera, DentalEyePad, Mikroskop)
- Dokumente / Formulare
- Drag & Drop aus Mails oder von Datenträgern

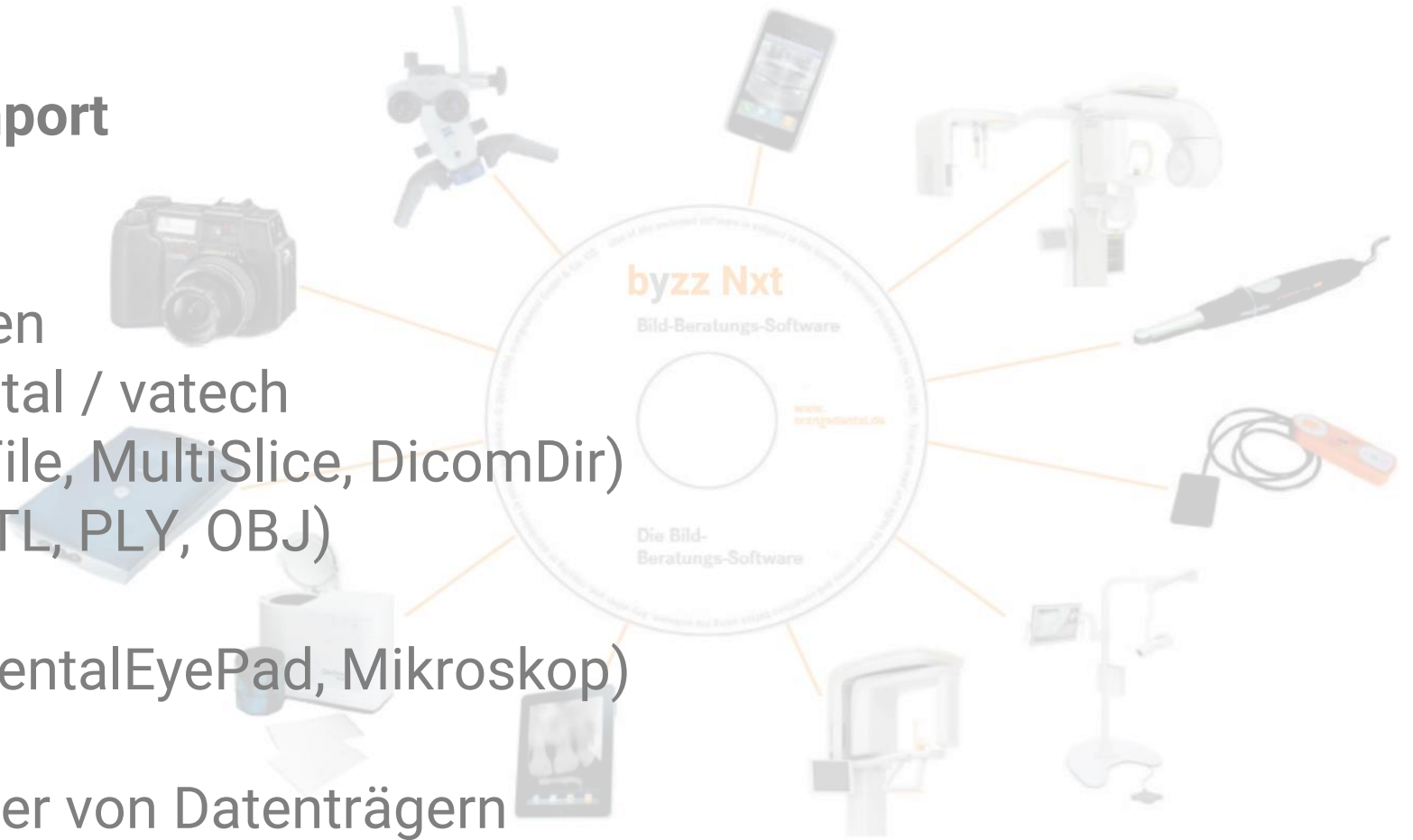

>> Offener Workflow in fast alle Richtungen

byzz Nxt Schnittstellen – **Export**


- 3D-Planungsprogramme (BlueSkyPlan, exocad, CodiagnostiX, Sicat, SimPlant, Smop)
- externe Programme über Programm-Definition
- Drag & Drop (Windows-Desktop, MS-Office, Browser)
- CD-Brenner
- Mail
- byzz4All (zum Labor) ab v11
- KI (Diagnocat, Nostic ab v11)



byzz[®]Nxt / v11 Live - Demo

byzz[®]Nxt / v11 pa-on


Stellenwert der Befunderhebung in der Praxis

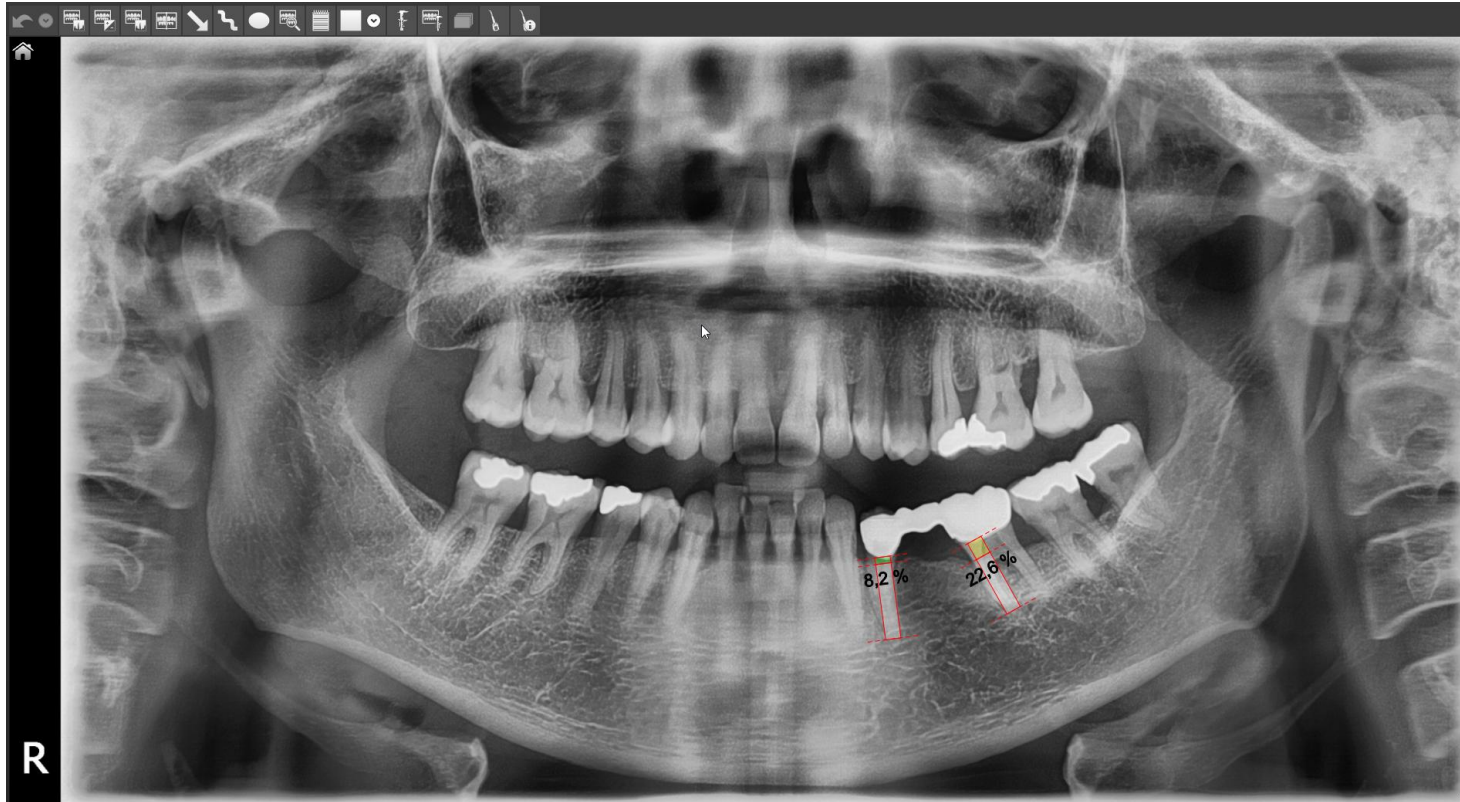


Komponenten und Messverfahren



**pa-on Sonde und
Dockingstation**
(Anschluss per USB an den PC
oder Laptop)



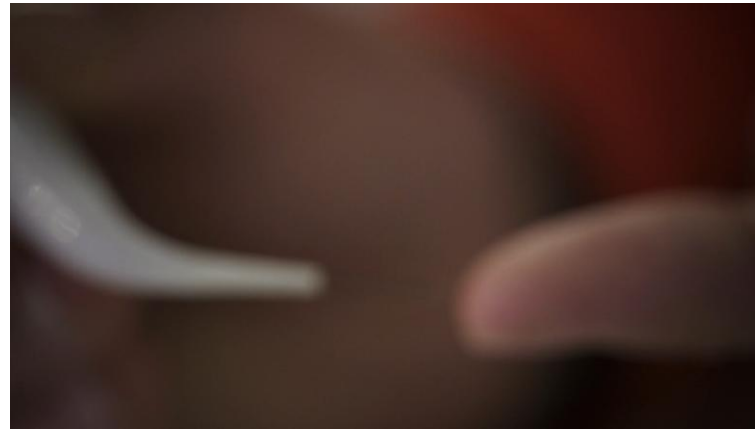


Messspitze (Druck konstant 20g)


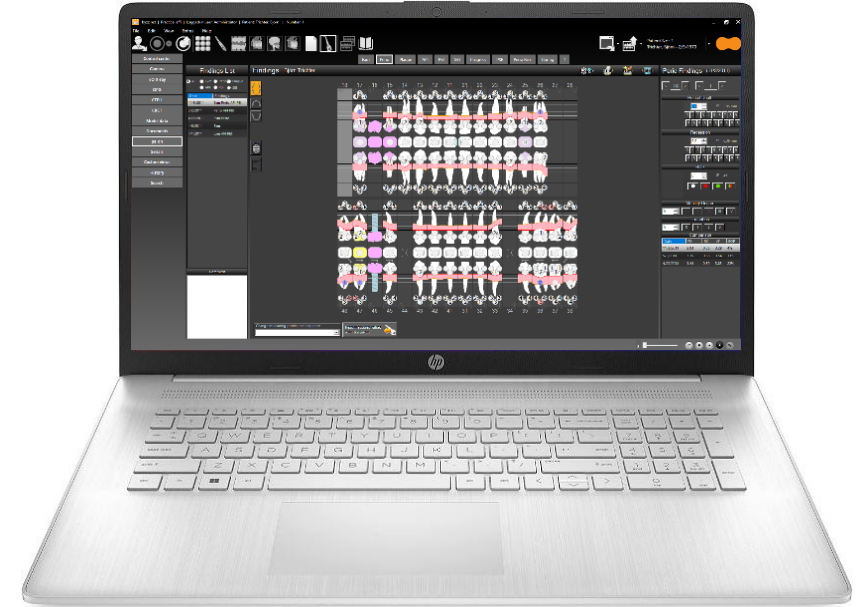


**Computer mit installierter
byzz® Paro Software**

Komponenten und Messverfahren

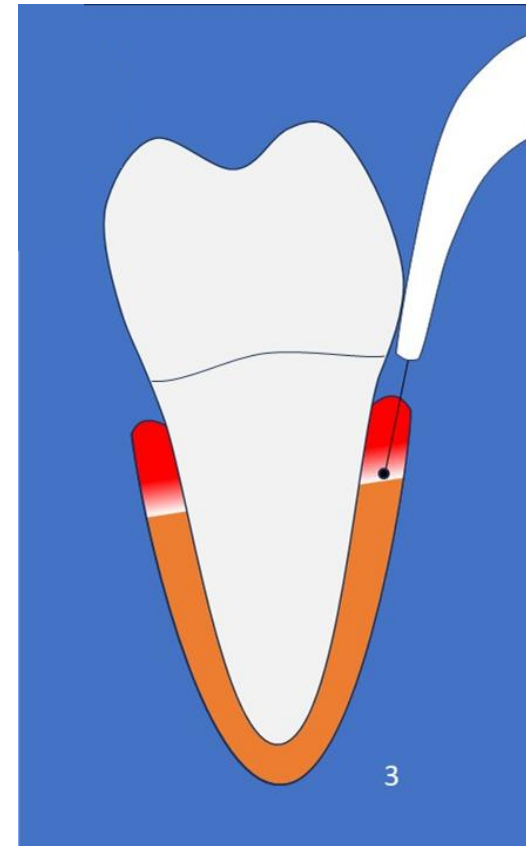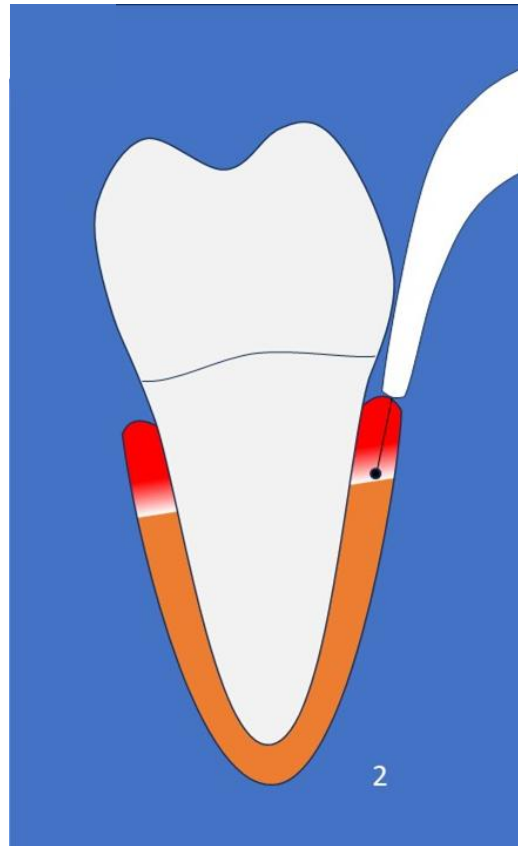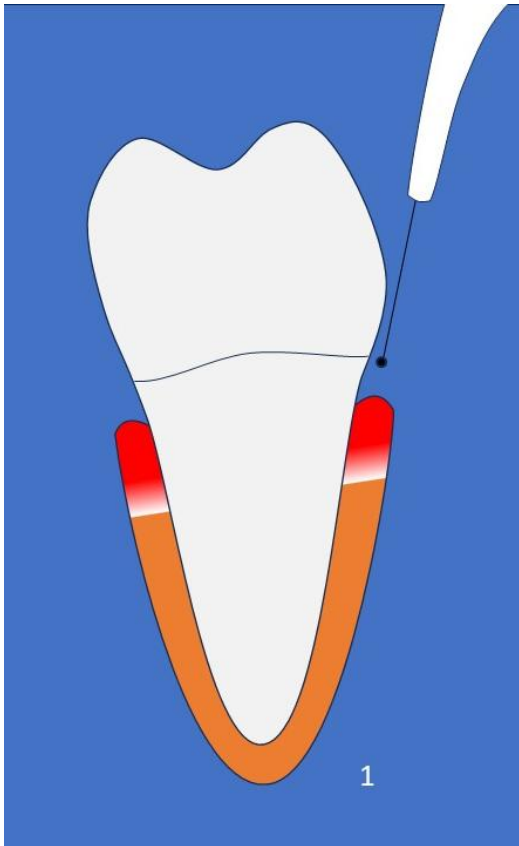

byzz® nxt und Konfigurationen der pa-on

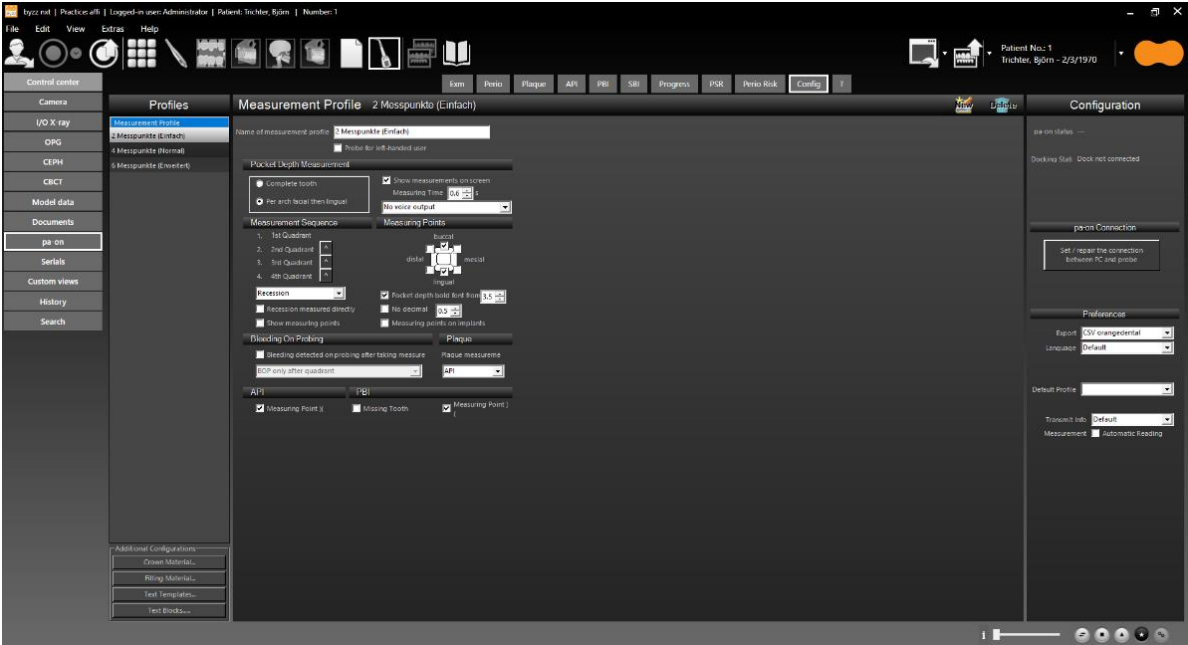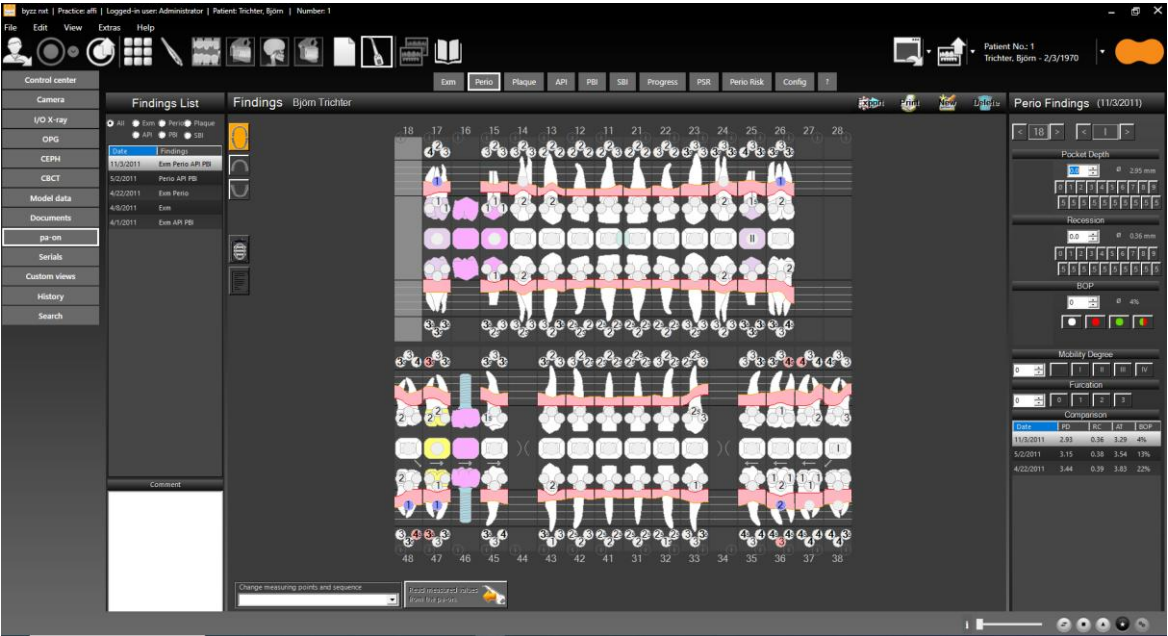

Praxismanagement Software und byzz® nxt

Auswahl Patient Leistungserfassung Akt.Befund HKP! KVA Labor KB! Formular View PAR Kerze Behandlungsplanung FA P I R M C O

Behandler: Greifenberg Parodontalstatus Blatt 2

	f		k	b	k		k	k							f
Rezeptionsist															
AIT		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CPT															

	f							k	k			k	b	k	f
CPT															
AIT		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Rezeptionsist															

Planung Abrechnung

4PA 1 Bemerkung
ATG 1
MHU 1
AITa 16
AITb 10
BEVa 1
UPT 4

☐ Gutachterlich befürwortet
☐ § 22 SGB V

465 09.07.2021 AIT
468 27.01.2022 BEVa
467 09.06.2022 CPT

PAR-Info UPT-Rechner 2

Behandler 1 Greifenberg

Genehmigung: 10.07.2021
Behandlungsbeginn: 09.07.2021
Abschluss AIT: 28.07.2021
Behandlungsende: . . .

Drucken Neu Löschen Rückgängig Übernehmen

Haben Sie Fragen ?

Ihre Anlaufstellen im Außendienst



Christopher Gremme / Beratung Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 432 079 82

Mail: cgr@orangedental.de

PLZ: 20 – 29



Martin Loeffen: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 151. 515 86 23 3

Mail: mlo@orangedental.de

PLZ: 41, 45-49



Uwe Baltes: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 170. 189 40 02

Mail: uba@orangedental.de

PLZ: 30-38, 40, 42, 44, 50-53, 57-59




Andreas Möller: Beratung / Verkauf
Schulungsmanager & LTG / SW (BC)

Mobil: +49 (0) 173. 966 84 36

Mail: am@orangedental.de

PLZ: 70-72, 75-79, 88

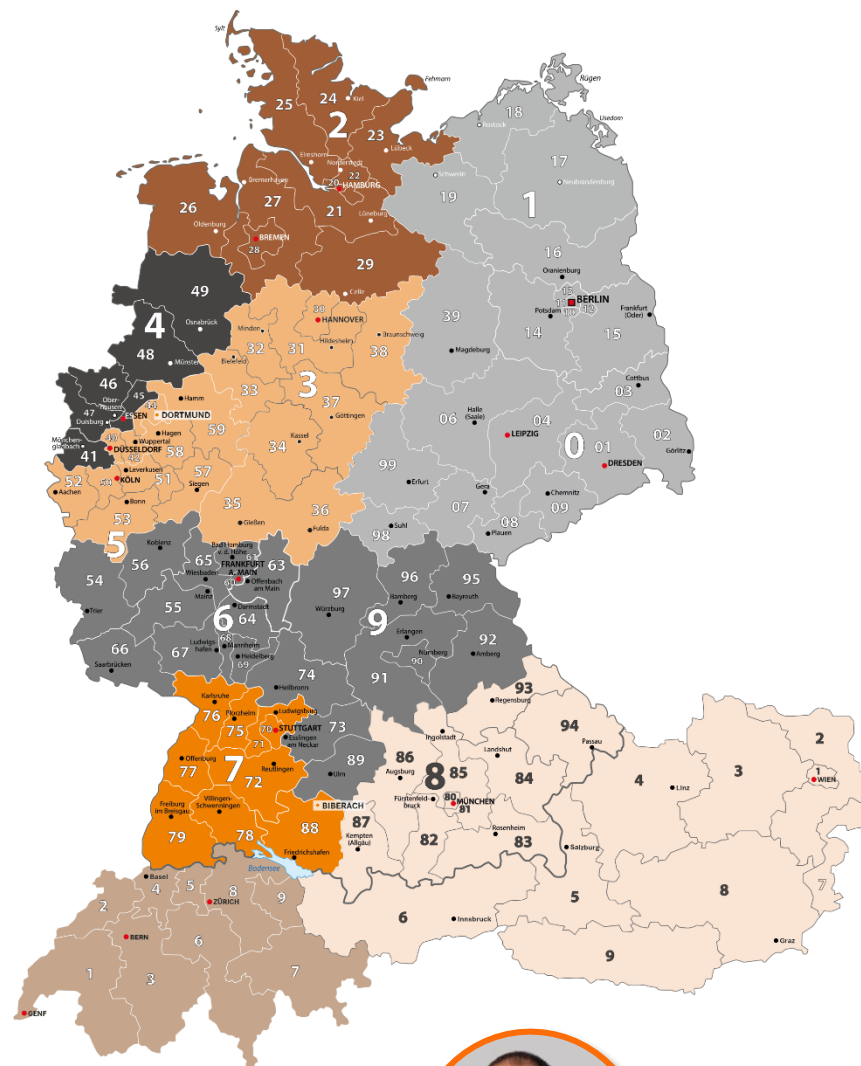

Gianluca Ventre: Beratung / Verkauf

Mobil: +41 (0) 76. 617 38 31

Mail: gve@orangedental.de

Gebiet: Schweiz




N / N

Mobil: +49 (0) 163. 2516310

Mail: info@orangedental.de

PLZ: 01 -19, 39, 98, 99

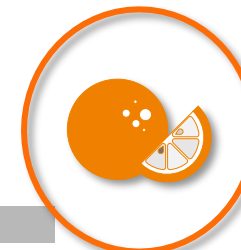

Frank Bartsch: Beratung / Verkauf

Mobil: +49 (0) 173. 967 55 11

Mail: fb@orangedental.de

PLZ: 54-56, 60-69, 73, 74, 89 - 92, 95 - 97



Stefano Soprano: Beratung / Verkauf
Röntgen, CAD/CAM & FUSSEN Scanner

Mobil: +43 (0) 676. 510 60 73 (AT)

+49 (0) 160 . 944 58 045 (D)

Mail: sso@orangedental.de

PLZ: 80-87, 93-94 + Österreich



Svetlan Molnar: Beratung / Verkauf
Lupenbrille, pa-on Sonde & EzCam

Mobil: +49 (0) 173 . 967 54 87

Mail: smo@orangedental.de

PLZ: 80-87, 93-94 + Österreich





Nächste Veranstaltungen / Kurse / Schulungen 2025:

7.10.	Webinar 9/2025
10. – 11.10.	infotage Fachdental Stuttgart
7. – 8.11.	infotage Fachdental Frankfurt
13. – 15.11.	59. Jahrestagung der NEUEN GRUPPE, Würzburg
20. – 22.11.	58. Jahrestagung der DGFDT Mainz
15.11.	DVT-Fachkudkurs Teil 1 – Biberach *

* Link zur Anmeldung

Alle bisher durchgeführten Webinare finden Sie mit diesem Link:



Wir freuen uns über Ihre Meinung und Kritik.

Ihr Feedback können Sie selbstverständlich vollkommen anonym abgeben

Wohltuende Kritik ist konstruktiver als jedes Lob.

Webinar



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie und Ihr Team gesund.

Ihr orangedental Team

Sie finden unsere News auch über:

